



▲  
Tear Here / Άνοιγμα εδώ

wellead® MD 0123

code: 0803112/ R01B06021F

### Ρινικά Γυαλιά Οξυγονοθεραπείας / Παιδικό Curved Prong Oxygen Nasal Cannula / Curved Prong Padiatric

#### Instructions of use / Οδηγίες Χρήσης 2.1m Length

**EN** 1. Attach the oxygen supply to the oxygen source.  
2. Set the oxygen to the prescribed flow.  
3. Insert the nasal tips into the nostrils with the two plastic. Tube over the Ears and under the chin.

**GR** 1. Συνδέστε τη σωλήνωση παροχής οξυγόνου στην πηγή οξυγόνου.  
2. Ρυθμίστε το οξυγόνο στην προκαθορισμένη ροή.  
3. Εισάγετε τις ρινικές άκρες στα ρουθούνια με τους δύο πλαστικούς σωλήνες πάνω από τα αυτιά και κάτω από το πηγούνι.

#### Note / Σημείωση

**EN** To fit smaller patients use not intended for reprocessing.  
**GR** Σε περίπτωση χρήσης από ασθενείς μικρότερου μεγέθους, δεν προτείνεται επανεξεργασία.

#### Caution / Προσοχή

**EN** - For single use. Discard after use.  
- Do not store in direct sunlight, at extreme temperatures or in high humidity.  
Store in dry conditions.  
- Do not use if package is open or damaged.

**GR** - Για ατομική χρήση μόνο. Απορρίψτε μετά τη χρήση.  
- Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως, σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε υψηλή υγρασία.  
- Αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι ανοικτή ή κατεστραμμένη.

**MOBIAC**  
MEDICAL GASES FIREFIGHTING est. 1977  
Kathiana-Akrotiriou  
Chania - Crete - Greece  
Tel: +30 28210 63222  
Web Site: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)

**Well Lead Medical Co., Ltd.** C-4  
Jinhu Industrial Estate, Hualong  
511434 Panyu, Guangzhou  
REPUBLICA POPULARĂ CHINA

**EC REP**  
**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)**  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg  
GERMANIA  
Fabricate in China

LOT :

:

:

1 PC