

▲
Tear Here / Άνοιγμα εδώ

wellead[®] MD           CE 0123

code: 0803118 / R01A02021F

Μάσκα Οξυγόνου Ενηλίκων με σωλήνα 2,10 μέτρων Oxygen Mask for Adults with tube 2,10 meters

Instructions of use / Οδηγίες Χρήσης

EN - Place the mask on a patient and ensure a comfortable fit. Adjust the nose clip on the portion of the mask, mold it to fit the face. This precludes leakage of oxygen into the corners of the eyes. If the patient feels respiration insufficient, please enlarge the exhalation ports with knife or scissors.


GR - Τοποθετήστε τη μάσκα στον ασθενή και εξασφαλίστε άνετη εφαρμογή. Ρυθμίστε το κλιπ μύτης στο τμήμα της μάσκας, διαμορφώστε το ώστε να ταιριάζει στο πρόσωπο. Αυτό αποκλείει τη διαρροή οξυγόνου στις γωνίες των ματιών. Εάν ο ασθενής αισθάνεται ότι η αναπνοή είναι ανεπαρκής, διευρύνετε τις θύρες εκπνοής με μαχαίρι ή ψαλίδι.

Caution / Προσοχή

EN - For single use. Discard after use.
Do not store in direct sunlight, at extreme temperatures or in high humidity.
Store in dry conditions.
Do not use if package is open or damaged.

GR - Για ατομική χρήση. Απορρίψτε μετά τη χρήση.
Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως, ακραίες θερμοκρασίες ή σε υψηλή υγρασία.
Αποθηκεύστε στο σε ξηρές συνθήκες.
Μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή έχει υποστεί ζημιά.


Kathiana-Akrotiriou
Chania - Crete - Greece
Tel: +30 28210 63222
Web Site: www.mobiacare.com


Well Lead Medical Co., Ltd. C-4
Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
REPUBLICA POPULARĂ CHINA


Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
GERMANIA
Fabricate in China

LOT :

 :

 :

1 PC