



## Oxigenoterapia și accesorii.

Umidificator 250ml cu supapă de siguranță 0,41 bar

Umidificator 250ml cu supapă de siguranță 6PSI

REF 0806204



Temperatura de depozitare: 15°C ~ 25°C  
Umiditate de depozitare permisă: <85%

### Instructiuni de utilizare

- RO -1.** Umpleți borcanul umidificatorului până la linia de umplere maximă cu apă. Nu lăsați apa să scadă sub linia minimă de umplere.
- Atașați capacul umidificatorului la borcan.
  - Atașați piulița-fluture de pe umidificator la sursa de oxigen.
  - Testați umidificatorul pentru scurgeri prin blocarea ieșirii umidificatorului. Supapa de siguranță ar trebui să se activeze. Dacă supapa nu este activată sau dacă apare vreo scurgere apreciabilă, verificați pentru a vă asigura că capacul umidificatorului este bine atașat la borcan și racordul la sursa de oxigen este bine strâns.
  - Conectați tubul de oxigen (nu este inclus) la niplul de pe capacul umidificatorului, asigurându-vă că toate conexiunile sunt sigure.
  - Porniți sursa de oxigen la LPM prescrisă,
  - Supapa de siguranță va alarma dacă există o îndoire sau blocare în sistemul de livrare.

- GR -1.** Umpleți umidificatorul cu apă până la linia de umplere maximă. Nu lăsați apa să scadă sub linia minimă de umplere.
- Atașați capacul umidificatorului la recipient.
  - Conectați piulița umidificatorului la sursa de oxigen.
  - Verificați umidificatorul pentru scurgeri prin blocarea ieșirii umidificatorului. Supapa de siguranță trebuie activată. Dacă supapa nu este acționată sau dacă apare o scurgere vizibilă, verificați pentru a vă asigura că capacul umidificatorului este bine fixat și conexiunea la sursa de oxigen este strânsă.
  - Conectați tubul de oxigen (nu este inclus) la duza de pe capacul umidificatorului, asigurându-vă că toate conexiunile sunt sigure.
  - Activați sursa de oxigen la litri pe minut specificați.
  - Supapa de siguranță va alerta dacă există o defecțiune sau blocare în sistemul de livrare.

### Atenție

- RO**-Umidificatorul este echipat cu o supapă de siguranță. Când sună supapa de siguranță, verificați tubulatura de alimentare din aval și terapia dispozitiv, îndepărtați orice obstacol înainte de a relua utilizarea.
- destinat utilizării de către personal calificat instruit.
  - Articolul este doar pentru uz personal, altfel poate provoca infecție încrucișată și poate reduce fiabilitatea și funcționalitatea produsului.
  - Apa trebuie schimbată la fiecare 8 ore de utilizare. Se recomandă utilizarea apei distilate.
- GR**-Umidificatorul este echipat cu o supapă de siguranță. Când supapa de siguranță emite un semnal sonor, verificați conducta de alimentare și dispozitiv de tratament, îndepărtați orice obstacol înainte de a continua utilizarea.
- Destinat utilizării de către personal calificat și instruit
  - Produsul este pentru uz personal, altfel poate provoca contaminare și poate reduce fiabilitatea și funcționalitatea produsului.
  - Apa trebuie schimbată la fiecare 8 ore de utilizare. Recomandateu n a tu folosești apionjă apă lăsată.

**QTY** bucătă

**LOT**

Distribuit de:  
**MOBIAC SA**  
Kathiana Akrotiri,  
Chania - Creta, Grecia  
Tel: +30 28210 63222  
www.mobiackcare.com

Fabricat de  
**HSINER Co., Ltd.**  
312, Jhongshan Rd., Shengang Dist,  
Taichung City 429, Taiwan  
Telephone: 886-4-25152480  
Fax: 886-4-25152482  
E-mail:[sales@hsiner.com](mailto:sales@hsiner.com) Site:  
<http://www.hsiner.com>

**EC REP** Reprezentantul UE  
mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71,  
D-30855 Langenhagen  
Tel: +49 511 3908 9530 Fax:  
+49 511 3908 9539 <http://www.mdi-europa.com>

**MD**

**CE**  
2460



**PHT**  
DEHP

