

Mască de față CPAP/VPAP și accesorii - Mască de față CPAP, medie

REF 0806360

LOT

Data fabricației:
AAAA-LLUtilizare de către:
AAAA-LL**Utilizare prevăzută**

Această mască este destinată a fi utilizată sub îndrumarea specifică a unui medic. Este utilizat împreună cu ventilatoarele neinvazive în medii de acasă, spitale și instituționale.

* Este pentru utilizarea unui singur pacient.

Atenție! Legea federală din SUA limitează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la ordinul unui medic.

Caracteristici

- * Cauciuc siliconic turnat dintr-o bucată; mic, ușor și confortabil.
- * Mască transparentă permite o vedere bună a gurii și a zonei nazale.
- * Spațiul mort scăzut are ca rezultat un nivel scăzut de CO₂ reconstruit.
- * Pivoare duble la 360 de grade la fixarea măștii și la punctul de atașare a tubului standard de 22 mm.
- * Articolele pentru cap cu elemente de fixare Velcro oferă versatilitate și mișcare maxime.

Instrucțiuni de curățare

- * Detașați călcarea de pe mască.
- * Spălați ușor de mână cu săpun ușor și apă caldă, clătiți bine masca și componentele.
- * Lăsați masca și componentele să se usuce la aer înainte de reutilizare.
- * Înlocuiți masca dacă există crăpături, rupturi sau decolorare excesivă.

Dezinfecție și sterilizare pentru mediul instituțional și spital

Consultați Ghidul de dezinfecție și sterilizare al măștii CPAP și VPAP

Atenție

Folosirea de înălbitor, clor, alcool sau soluții pe bază de aromatice poate provoca întărirea materialelor de construcție și poate reduce durata de viață a produsului.

Contraindicații

Această mască poate să nu fie potrivită pentru pacienții cu următoarele afecțiuni: afectarea funcției sfincterului cardiac, reflux excesiv, afectarea reflexului tusei și hernie hiatală. Nu trebuie utilizat dacă pacientul nu răspunde, este obstrucționat, nu poate îndepărta masca sau nu cooperează.

Avertismente

- * Această mască trebuie utilizată numai cu sistemele NIV recomandate de medicul dumneavoastră sau de terapeutul respirator.
- * Nu utilizați această mască decât dacă sistemul NIV este pornit și funcționează corect.

Nota: Când ventilatorul nu funcționează, nu va fi furnizat suficient aer proaspăt prin mască și aerul expirat poate fi reinspirat. Respirația aerului expirat mai mult de câteva minute poate duce, în anumite circumstanțe, la sufocare. Dacă se folosește oxigen cu sistemul NIV, fluxul de oxigen trebuie oprit atunci când ventilatorul nu este în funcțiune.

Nota: Când ventilatorul nu funcționează și fluxul de oxigen este lăsat pornit, oxigenul livrat în tubulatura de ventilație se poate acumula în incinta ventilatorului și poate crea un risc de incendiu.

Nota: La un debit fix de oxigen suplimentar, concentrația de oxigen inhalat va varia în funcție de setarea presiunii, modelul pacientului și rata de scurgere.


* Nu fumați dacă utilizați oxigen.

* Contactați un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți disconfort toracic, dificultăți de respirație, distensie abdominală, eructații sau dureri de cap severe.


* Evitați să mâncați sau să beți cu trei ore înainte de a utiliza această mască pentru a minimiza riscul de vărsături în timpul tratamentului.

* Nu folosiți această mască dacă luați medicamente care pot provoca vărsături.


Atenție: Trebuie utilizat numai de către persoane care au primit instruire și instruire adecvată din partea personalului medical calificat.

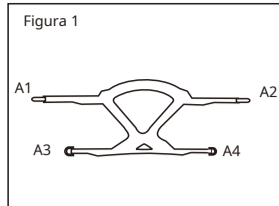Dacă este inclus un accesoriu pentru cap, urmați instrucțiunile de asamblare de mai jos:


Așezați accesoriul pentru cap cu partea velcro în jos pe o suprafață plană, detașați 2 benzi velcro pe A1 și A2.

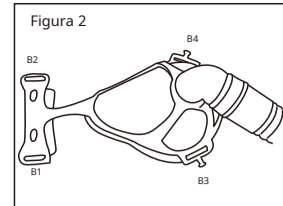


Identificați pozițiile de fixare a articolelor pentru acoperirea capului pe mască.

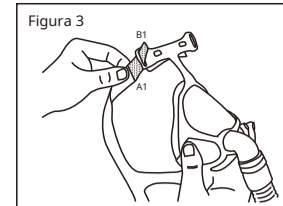


Trageți cureaua superioară A1 pentru acoperirea capului prin fanta B1 de pe mască, asigurându-vă că Velcro este orientat spre exterior.

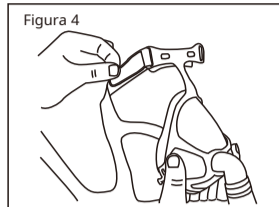


Fixați banda Velcro.

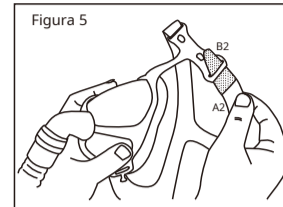


Trageți cureaua superioară A2 pentru acoperirea capului prin fanta B2 de pe mască, asigurându-vă că Velcro este orientat spre exterior.

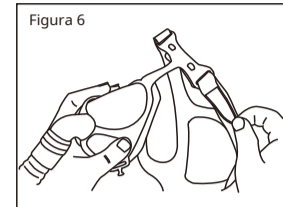


Fixați banda Velcro.

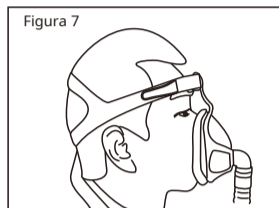

Așezați accesoriul deasupra capului și reglați ambele curele superioare pentru acoperirea capului la o tensiune confortabilă.

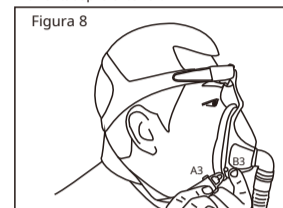


Agățați catarama de plastic A3 pe B3 și A4 pe B4 pe rama măștii.

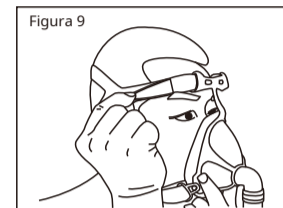

Reglați din nou ambele curele superioare A1 și A2 la o tensiune confortabilă.



Reglați ambele curele inferioare pentru acoperirea capului A3 și A4 la o tensiune confortabilă.

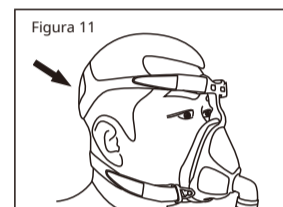

Asigurați-vă că cureaua de deasupra capului este în poziția corectă pentru a evita alunecarea în jos.

Temperatura de depozitare: 15°C - 25°C
Umiditate relativă de depozitare: <85%

* Pentru a scoate masca și accesoriul pentru cap, pur și simplu desfaceți ambele catarami de pe cadrul măștii și trageți cureaua superioară a capului departe de cap.

* Pentru a reutiliza masca și accesoriul pentru cap, pur și simplu plasați cureaua superioară deasupra capului și conectați-o la ambele catarami.

Fabricat de
HSINER Co., Ltd.
312, Jhongshan Rd., Shengang Dist,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480 Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com Site web: http://
www.hsiner.com

EC REP
Reprezentantul UE
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530 Fax:
+49 511 3908 9539 http://
www.mdi-europa.com

Distribuit de:
MOBIAM SA
Kathiana Akrotiri,
Chania - Creta, Grecia
Tel: +30 28210 63222
www.mobiakcare.com

CE
2460

EC0061044403
Rev.03 29/06/23

Ghidul de dezinfecție și sterilizare al măștii CPAP și VPAP

Următoarele metode de dezinfecție și sterilizare sunt destinate utilizării unui singur pacient în mediul spitalicesc/instituțional, iar acest ghid este folosit numai pentru uz profesional. Aceste metode sunt procedurile recomandate și vă sfătuim ca fiecare unitate de sănătate să-și consulte propriile proceduri înainte de a efectua următoarele instrucțiuni.

Ocazie de dezinfecție și sterilizare:

- Ori de câte ori masca este contaminată cu secreții, vărsături sau alte substanțe străine care sunt considerate periculoase pentru pacient.
- Judecata terapeutului respirator sau medicului dacă masca este pentru pacienții de terapie intensivă.
- La fiecare 7 zile continue de utilizare a aceluiași pacient.

Procedură:

- Dezasamblați perna din cadrul măștii și scoateți setul de accesorii pentru cap.
- Clătiți toate piesele cu apă curată pentru a îndepărta reziduurile.
- Mâinile spălați bine toate părțile măștii cu detergent neutru de curățare aproximativ 5 minute.
- Clătiți toate piesele cu apă curată pentru a îndepărta detergentul rămas și lăsați piesele să se usuce la aer.
- Dezinfectare/Sterilizare:
 - Autoclavarea nu trebuie să depășească 121 °C timp de 15 minute (Nu include setul de accesorii pentru cap)
 - Dezinfectare Cidex 2% Glutaraldehidă timp de 20 de minute (Nu include setul de accesorii pentru cap): Consultați furnizorul de dezinfectant înainte de prima utilizare. Clătiți bine cu apă sterilă.
- Uscați-le bine. Inspectați toate componentele pentru a vă asigura că sunt curate și uscate. Dacă piesele sunt uzate sau deteriorate, aruncați-le.
- Verificare funcțională:
 - Mască reasamblată trebuie verificată vizual complet înainte de utilizare și conectată la mașina de ventilație cu presiune pozitivă.
 - Purtați masca pe față pacientului cu accesoriul pentru cap și asigurați-vă că rezistența este suficientă.
 - Asigurați-vă că masca este reglată într-o poziție confortabilă și că nu există scurgeri evidente de la suprafața de atingere a pernei.
 - Dacă perna încă nu se poate etanșa bine, vă rugăm să înlocuiți una cu alta.

Atenție:

- Brida nu este potrivită pentru acest ghid; trebuie spălat ferm și nu reambalat cu mască dezinfectată/autoclavată înainte de următoarea utilizare.
- Eliminarea măștii trebuie să respecte legile locale referitoare la deșeurile spitalicești din mediul spitalicesc/instituțional.
- Principalele părți ale ciclurilor maxime de dezinfecție și sterilizare ale măștii CPAP/VPAP sunt recomandate de 30 de ori. Se recomandă spălarea cu detergent neutru de 90 de ori.
- Nu scoateți supapa anti-asfixie în timp ce demontați conectorul cot.
- Disclaimer: este responsabilitatea utilizatorului să califice orice abateri de la metoda recomandată de reprocesare.
- Contactați distribuitorul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Στοματορινική μάσκα και αξεσουάρ CPAP / VPAP- Στοματορινική μάσκα, Mediu

REF 0806360

LOT

 ημερομηνία παραγωγής:
AAAA-LL

 Χρήση από:
AAAA-LL

Προτεινόμενη Χρήση

Αυτή η μάσκα προορίζεται για χρήση υπό την οδηγία γιατρού. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με CPAP και VPAP σε οικιακό και νοσοκομειακό περιβάλλον.

* Είναι για χρήση ενός και μόνο ασθενούς.

Χαρακτηριστικά

- * Ελαστικό σιλκόννης από ενιαίο κομμάτι, μικρό, ελαφρύ και άνετο.
- * Η διαυγής μάσκα επιτρέπει την καλή θέα του στόματος και της ρινικής περιοχής.
- * Ο χαμηλός κενός χώρος έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή συγκέντρωση CO στο εσωτερικό της μάσκας.
- * Διπλή περιστροφή 360 μοιρών για την προσαρμογή της μάσκας και στάνταρ σημείο σύνδεσης σύνδεσης σύνδεσης
- * Τα καλύμματα κεφαλής με συνδετήρες Velcro παρέχουν μέγιστη ευελιξία και κίνηση.

Οδηγίες καθαρισμού

- * Αποσυνδέστε το κάλυμμα κεφαλής από τη μάσκα.
- * Πλύνετε απαλά το χέρι με ενα ήπιο αντισηπτικό ή σαπούνι και ζεστό νερό, ξεπλύνετε προστικά ή σαπούνι και ζεστό νερό σουάρ.
- * Αφήστε την μάσκα και τα αξεσουάρ να στεγνώσουν πριν τα χρησιμοποιήσετε.
- * Αντικαταστήστε τη μάσκα αν υπάρχουν ρωγμές, στίγματα ή υπερβολικός αποχρωματισμός.

Απολύμανση και Αποστείρωση για το νοσοκομείο

Ανατρέξτε στον Οδηγό Απολύμανσης & Αποστείρωσης της Μάσκας CPAP και VPAP

Προσοχή

Η χρήση χλωρίνης, αλκοόλης ή αρωματικών διαλυμάτων μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση των καλυμάτων υαλυμάτων ιώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Αντενδείξεις

Αυτή η μάσκα μπορεί να μην είναι κατάλληλη για ασθενείς με τις ακόλουθες καταστάσεις καταστάσεις καταστάσεις εξασταρισταθενείς κού σφικτήρα, υπερβολική παλινδρόμηση, ανεπιθύμητη βήχα ή και διαφραγματοκήλη. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται ή δεν είναι ικανός ναμαφαστα αφάστα .

Προειδοποιήσεις

- * Αυτή η μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με συστήματα NIV που συνιστώνται από το γιατρό σας.
- * Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μάσκα εκτός εάν το σύστημα NIV είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί λειστημα.

Detaili:Όταν ο αναπνευστήρας δεν λειτουργεί, δεν θα παρέχεται αρκετός φρέσκος αέρας μέσω της μάσκας μάσκα εκπνεόμενος αέρας μπορεί να ανακυκλωθεί. Η επανεισπονή του εκπνεόμενου αέρα για περισσότερο από μερικά λεπτά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις από μερικά λεπτά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις από μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις από Εξ. Εάν χρησιμοποιείται οξυγόνο με το σύστημα NIV, η παροχή οξυγόνου πρέπει να απενεργοποιηθεί δοποιτηνθεργοποιτηνθεργοποιτας να σε λειτουργία.

Detaili:Όταν ο αναπνευστήρας δεν είναι σε λειτουργία και η ροή οξυγόνου παραμένει ενεργοποιημένη, το ή οξυγόνο που παρέχεται στη σωλήνωση εξερισμού μπορεί να συσσωρευτεί μέσα στο περίβλημα εξερισμού εξερισμού μπορεί να συσσωρευτεί μέσα στο περίβλημα εξερισμού ήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Detaili:**Σε σταθερό ρυθμό ροής συμπληρωματικού οξυγόνου, το εισπνεόμενο οξυγόνο θα ποικίλει ανμάλει ανμάλота ρύθμιση της πίεσης, το μοτίβο λειτουργίας του ασθενούς και το ρυθμό διαρροής.
- * Μην καπνίζετε εάν χρησιμοποιείτε οξυγόνο.
 - * Επικοινωνήστε με ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε δυσφορία στο στήθος, δύσπνια γιατρό, διαταραχή στοχοστοστορία ρό πονοκέφαλο.
 - * Αποφύγετε να τρώτε ή να πίνετε τρεις ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα για να ελαχι τοστοντοστούσητε τη μάσκα τρεις ώρες πριν χρησιμοποιήσετε ου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 - * Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν παίρνετε φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν εμετό ή ναυτία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από άτομα που έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση και οδηγίες από ειδικείο ειδικείο λάβει επαρκή προσωπικό.

Οδηγός Απολύμανσης & Αποστείρωσης Μάσκας CPAP και VPAP

Οι ακόλουθες μέθοδοι απολύμανσης και αποστείρωσης προρορίζονται για χρήση από έναν ασθιοανήσθονΦονήσης κό περιβάλλον και αυτός ο οδηγός χρησιμοποιείται μόνο για επαγγελματική χρήση. Αυτές οι μέθοδοι είναι οι συνιστώμενες διαδικασίες και προτείνουμε κάθε μονάδα υγειονομικής υγειονομικής αι τις δικές της διαδικασίες πριν εκτελέσει τις ακόλουθες οδηγίες.

Περιπτώσεις απολύμανσης και αποστείρωσης:

- Όποτε η μάσκα έχει μολυνθεί από εκκρίσεις, εμετούς ή άλλες ξένες ουσίες που θεκρίσεις εμετούς ή άλλες ξένες ουσίες που θεγρούνται θεπνται θεπντας .
- Κατά την κρίση του αναπνευστικού θεραπευτή ή γιατρού, εάν η μάσκα είναι για ασθενείς ΜΕΕή.
- Έπειτα από κάθε συνεχόμενη για 7 ημέρες χρήση από τον ίδιο ασθενή.


Διαδικασία:

1. Αποσυναρμολογήστε το μαξιλαράκι από το πλαίσιο της μάσκας και αφαιρέστε το σετ καλύκεματος καλύκεμας.
2. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
3. Πλύνετε καλά όλα τα μέρη της μάσκας με ουδέτερο απορρυπαντικό για περίπου 5 λεπτά.
4. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο απορρυπαντικό καθαρό κατατασταταήτα εγνώσουν φυσικά.
5. Απολύμανση/Αποστείρωση:
 - Η διαδικασία στον κλίβανο αποστείρωσης να μην υπερβαίνει τους 121°C για 15 λεπτά (Δεν περιλαματάτο περιλαματάταμος λής)
 - Απολύμανση με Cidex 2% Γλυουταραλδεύδης για 20 λεπτά (Δεν περιλαμβάνεται το σετ καλύμματος καλύματος κεντοφολαμβάνεται), μηθευτή του απολυμαντικού πριν από την πρώτη χρήση. Ξεπλύνετε καλά με αποστειρωμένο νερό.
6. Στεγνώστε τα καλά. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για να επιβεβαιώσετε ότι είναι καθαρά και στεγνά. Εάν τα εξαρτήματα έχουν φθαρεί ή είναι κατεστραμμένα, πετάξτε τα.
7. Λειτουργικός Έλεγχος:
 - Η επανασυναρμολογούμενη μάσκα θα πρέπει να ελεγχθεί πλήρως οπτικά πριν από τη χρήση χρήση καρήση καρήση κασχει πλήρως ημα αερισμού θετικής πίεσης.
 - Φορέστε τη μάσκα με κάλυμμα κεφαλής στο πρόσωπο του ασθενούς και βεβαιωθείτε ότι η πίνετι ήρίνετα.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα έχει προσαρμοστεί σε μια άνετη θέση και ότι δεν υπάρχει εμφανήρι εμφανής εμφανής α επαφής του μαξιλαριού.
 - Εάν το μαξιλαράκι εξακολουθεί να μην σφραγίζει καλά, αντικαταστήστε το ένα με ένα άλλο.


Προσοχή:

- Το κάλυμμα κεφαλής δεν υπόκειται σε αυτόν τον οδηγό. Θα πρέπει να πλυθεί καλά και να μην επανασυσκευαστεί με την απολυμανθείσα/αποστειρωμένη μρώμενη μάρωμενη μάτανό μάσει με την ήση.
- Η απόρριψη της μάσκας θα πρέπει να ακολουθεί τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται με τονται με τοσκα νοποσκά νοποσκούς ομειακό/ιδρυματικό περιβάλλον.
- Οι μέγιστοι κύκλοι απολύμανσης και αποστείρωσης των κύριων μερών της μάσκας CPAP/VPAP συνιστας συνιστώς. Το πλύσιμο με ουδέτερο απορρυπαντικό συνιστάται για 90 φορές.
- Μην αφαιρείτε την αντισταφυκτική βαλβίδα κατά την αποσυναρμολόγηση του γνιακού συνδετήρα.
- Αποποίηση ευθύνης: είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει τυχόν αποκλίσεις από τη συνιστοχοχούσει μοποίησης.
- Επικοινωνήστε με τον διανομέα σας για πρόσθετες πληροφορίες.


Εάν, στην συσκευασία, περιλαμβάνεται το κάλυμμα κεφαλής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες οσυνγίες οσυνγίες οσυνγίες

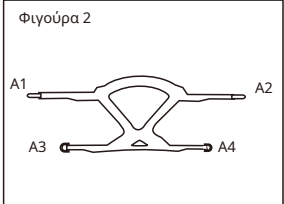


Τραβήξτε τον άνω ιμάντα κεφαλής A1 από την υποδοχή B1 στη μάσκα, βεβαιώνοντας ότι η velcro έχειετιόριξετωρ.

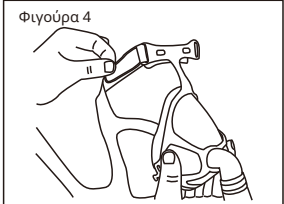


Σφίξτε την ταινία Velcro.

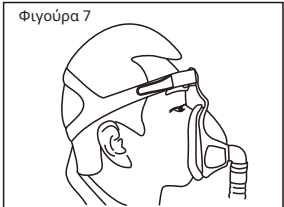


Τοποθετήστε τα καλύμματα κεφαλής πάνω από το κεφάλι σας και προσαρμόστε τους δύο ιμάντες επάνω σε μια άνετη τάση.

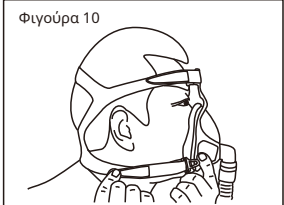


Ρυθμίστε και τις δύο κατώτερες λωρίδες κεφαλής A & A σε μια άνετη τάνυση 3 4.

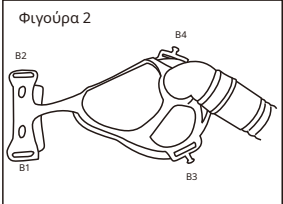


Προσδιορίστε τις θέσεις στερέωσης του καλύμματος κεφαλής στη μάσκα.

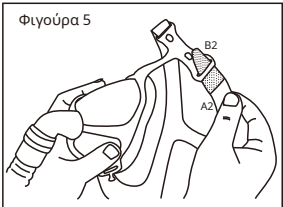


Τραβήξτε τον άνω ιμάντα κεφαλής A2 από την υποδοχή B2 στη μάσκα, βεβαιώνοντας ότι η velcro έχειετιόριξεοχή B2

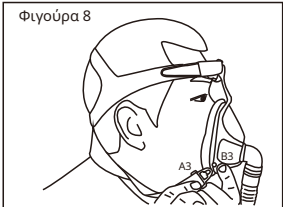


Γαντζώστε την πλαστική πόρπη A3 πάνω στις B3 και A4 πάνω στο B4 στο πλαίσιο της μάσκας.

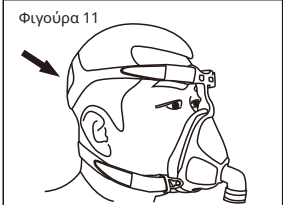


Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας είναι στην κατάλληλη θέση για να αποφύγετε την ολίσθηση.

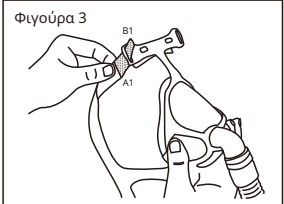


Τραβήξτε τον άνω ιμάντα κεφαλής A1 από την υποδοχή B1 στη μάσκα, βεβαιώνοντας ότι η velcro έχειετιόριξετωρ.

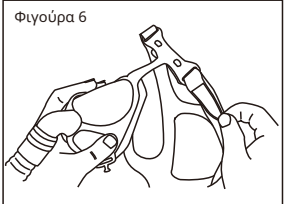

Σφίξτε την ταινία Velcro.

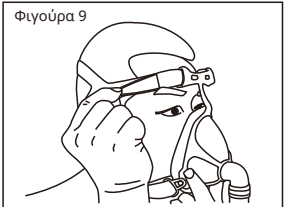

Ρυθμίστε και πάλι τους δύο άνω ιμάντες αφρού A1 & A2 σε μια άνετη τάση.

 Temperatura de temperatură: 15°C – 25°C
Temperatura de temperatură: <85%

 Κατασκευαστής
HSINER Co.,Ltd.
312, Jhongsan Rd., Shengang Dist,
Taichung City 429, Taiwan
Τηλ.: 886-4-25152480 Φαξ: 886-4-25152482
Ηλεκτρονική διεύθυνση:sales@hsiner.com
Ιστότοπος:<http://www.hsiner.com>

  Αντιπρόσωπος για την ΕΕ
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Τηλ.: +49 511 3908 9530
Φαξ: +49 511 3908 9539
<http://www.mdi-europa.com>

Διανέμονται από:
MOBIAK SA
Kathiana Akrotiri,
Chania - Creta, Grecia
Τηλ.: +30 28210 63222
www.mobiacare.com

CE
2460

EC006104403
Rev.03 29/06/23