

Ref.: 0805451

## ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ/ METAL CABINET



Το επιτοίχιο μεταλλικό κουτί απινιδωτή είναι κατασκευασμένο για αποθήκευση και προστασία των απινιδωτών. Είναι κατάλληλο για την ασφάλεια του απινιδωτή, χωρίς να εμποδίζει την πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης. Τοποθετείται εύκολα στον τοίχο και επιτρέπει τον εύκολο οπτικό έλεγχο, χάρη στο διαφανές τμήμα στο πορτάκι του.

*The wall-mounted metal cabinet is designed to store and protect defibrillators. It is suitable for the safety of the defibrillator, without obstructing access in case of emergency. It is easily mounted on the wall and allows easy visual control, thanks to the transparent part on its door.*

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Εσωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 42,5 x 18 x 42,5cm / *Internal Dimensions (LxWxH) 42.5 x 18 x 42.5cm*

Δεν περιλαμβάνονται βίδες στήριξης / *Mounting screws are not included*

Διαθέτει οπές για να κρεμιέται στον τοίχο / *With holes for hanging on the wall*

Εσωτερικής Χρήσης / *Internal Use*

Να αποφεύγεται η επαφή με το νερό / *Avoid contact with water*

WORLD HEADQUARTERS:  
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100  
T: +30 28210 63222

DISTRIBUTION CENTER: CENTRAL, SOUTHERN &  
INSLAND GREECE:  
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300  
T: +30 210 4614006

DISTRIBUTION CENTER: NORTHERN GREECE & BALKAN  
AREA:  
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009  
T: +30 2310 785668

DISTRIBUTION CENTER: CENTRAL & EASTERN CRETE:  
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION  
CRETE, P.C 71601, T: +30 2810 333151

## Εγκατάσταση Μεταλλικού Επιτοίχιου Κουτιού

### Πρώτα η ασφάλεια!

Πριν τοποθετήσετε το μεταλλικό επιτοίχιο κουτί σας σε έναν τοίχο, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες και οι αγκυρώσεις δεν θα διαπεράσουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες και αγωγούς μέσα στον τοίχο.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες βίδες με ούπα ή άγκυρες τοίχου (δεν παρέχονται με το προϊόν), τοποθετώντας & βιδώνοντας τις, στις 4 οπές που βρίσκονται στο εσωτερικό του επιτοίχιου κουτιού. Οι εν λόγω οπές φαίνονται παρακάτω:

### Installation of Metal Cabinet

#### Safety first!

*Before mounting your cabinet box to a wall, make sure that screws and anchors will not penetrate electrical wires, pipes and conduits into the wall.*

*Use suitable eyebolts or wall anchors (not supplied with the product) placing & screwing them, in the 4 designated holes located inside the cabinet. These holes are shown below:*



WORLD HEADQUARTERS:  
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100  
T: +30 28210 63222

DISTRIBUTION CENTER: CENTRAL, SOUTHERN &  
INSLAND GREECE:  
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300  
T: +30 210 4614006

DISTRIBUTION CENTER: NORTHERN GREECE & BALKAN  
AREA:  
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009  
T: +30 2310 785668

DISTRIBUTION CENTER: CENTRAL & EASTERN CRETE:  
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION  
CRETE, P.C 71601, T: +30 2810 333151