

UTILIZARE PREVENTATĂ:

Scaunul de baie permite utilizatorului să mearsească independentă în timpul dusului, în igiena personală zilnică, reducând oboseala musculară datorită poziției în picioare precum și riscurile de alunecare și accidentări. Picioarele din cauciuc anti-alunecare asigură tracțiunea cu podeaua, iar versiunile furnizate cu picioare reglabile pe înălțime permit utilizatorului să modifice cu ușurință înălțimea totală în funcție de cerințele sale. Spatarul scaunului oferă siguranță și confort suplimentar. Scaunul de baie poate fi mutat ușor datorită greutateii sale ușoare.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Scaunul de baie oferă suport persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a membrilor inferioare, a regiunii lombare și a soldului, și tuturor celor care au dificultăți în menținerea poziției drepte în timpul dusurilor zilnice de igienă personală.

Utilizatorul trebuie să fie capabil să se echilibreze atunci când stă și când ridică și să aibă capacitatea suficientă de a se menține în poziție șezând.

Scaunul de baie nu trebuie folosit dacă utilizatorul are probleme legate de tulburări de echilibru sau de percepție.

ATENȚIE (!):

- Dacă apare o problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați dealerul dumneavoastră autorizat și instruit.
- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAK S.A. respinge orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOVIK SA își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.
- Păstrați produsul departe de sursele de căldură.
- Vă rugăm să păstrați acest formular pentru referințe viitoare.
- Aveți grijă când sunt copii în preajmă și NU lăsați copii să se joace cu produsul.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrilor și rănirea.
- Nu încercați să ridicați produsul de la o piesă de asamblare.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.

AVERTIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

- Greutatea maximă a utilizatorului menționată în instrucțiuni nu trebuie depășită.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul este asamblat corespunzător într-o poziție stabilă.
- Scaunul poate fi folosit numai pe o suprafață fără obstacole.
- La asamblare, respectați cu strictețe ceea ce este scris în Manualul de utilizare.
- Riscul de rănire a degetelor poate crește în timpul procesului de instalare sau asamblare.
- Nu vă legănați pe scaun, deoarece acest lucru poate duce la alunecarea, răsturnarea sau chiar ruperea picioarelor. Dacă utilizați scaunul de baie păstrați întotdeauna suportul scaunului pe toate cele patru (4) picioare.
- Nu modificați în niciun caz scaunul de baie și accesoriile acestuia.
- Nu folosiți scaunul dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Fisurile și deformațiile pot afecta puternic performanța și siguranța dispozitivului.
- După utilizare, scaunul de baie trebuie îndepărtat din zonă pentru a evita orice obstrucție.
- Nu utilizați scaunul în alt scop decât cel prevăzut.
- Scaunul nu trebuie depozitat în aer liber.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE:

Pentru a asigura o utilizare în siguranță și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și dezinfectare, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie să purtați mănuși.
2. Îndepărtați impuritățile vizibile înainte de a trece la o dezinfectare mai aprofundată.
3. Utilizați apă sau detergent slab pentru procesul de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncându-vă produsul acum inutil la punctul corect de reciclare, ajutați în protecția mediului precum și în reexploatarea materialelor produsului dumneavoastră.

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declaram pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

UTILIZARE PREZENTATĂ:

Scaunul de duș permite utilizatorului o creștere a independenței în timpul etapei de duș a igienei personale zilnice, reducând oboseala musculară din cauza poziției în picioare, precum și riscurile de alunecare și accidentare. Picioarele din cauciuc antiderapante asigură aderența cu podeaua, iar versiunile prevăzute cu picioarele reglabile pe înălțime permit utilizatorului să schimbe cu ușurință înălțimea totală în funcție de cerințele acestuia.

Spatarul oferă siguranță și confort suplimentar. Scaunul de dus poate fi mutat ușor datorită greutateii sale ușoare.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Scaunul de dus se adresează persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a lombului, genunchiului sau soldului și tuturor celor care au dificultăți în menținerea poziției în picioare în fazele de dus ale igienei personale zilnice. Utilizatorul își cere să aibă autonomie de echilibru în timpul procedurilor de șezut și în picioare, precum și să aibă capacitatea adecvată de a menține șezut. Scaunul de dus nu trebuie folosit dacă utilizatorul are probleme legate de tulburări de echilibru sau de percepție.

ATENȚIE (!):

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual.
- MOBIAK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există un ± 3%. Abatere pentru dimensiunile produselor.
- Păstrați produsul departe de sursele de căldură.
- Salvați acest document pentru referințe ulterioare.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrilor și rănirea.
- Nu încercați să ridicați produsul cu ajutorul niciunei părți detașabile.
- Protejați produsul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.

AVERTIZĂRI ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

- Greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiuni nu trebuie depășită.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul este asamblat corect într-o poziție stabilă.
- Scaunul poate fi folosit numai pe suprafețe fără obstacole.
- În timpul asamblării, respectați cu strictețe ceea ce este prezentat în Manualul de utilizare.
- Riscul de rănire a degetelor poate crește în timpul procesului de montare sau asamblare.
- Nu vă balansați pe scaun, acest lucru poate duce la alunecarea, răsturnarea sau afundarea picioarelor. Dacă utilizați scaunul de duș, țineți întotdeauna scaunul pe cele 4 picioare.
- Nu modificați în niciun fel scaunul și componentele acestuia.
- Nu folosiți scaunul de duș dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Fisurile și deformațiile pot afecta puternic performanța și siguranța dispozitivului.
- După utilizare, scaunul de duș trebuie scos de pe cădița de duș pentru a evita orice obstrucție.
- Nu utilizați scaunul de duș în alt scop decât cel prevăzut.
- Scaunul de duș nu trebuie depozitat în aer liber.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE:

Pentru a garanta o utilizare în siguranță și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfectare.
3. Utilizați apă sau detergent ușor pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului: 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și sensul prezentat semn de reciclare).

- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produselor.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

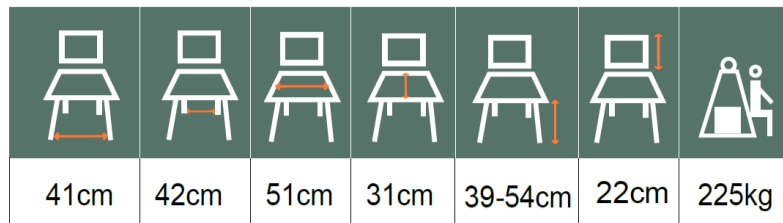
Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

GREUTATE MAXIMA UTILIZATOR / GREUTATE MAXIMA PACIENTUL:

COD ARTICOL	CU SPATE CU SPATAR	ÎNCĂRCARE MAX
0808523		225 Kg

**Montaj:**

Produsul se livrează asamblat și gata de utilizare. Poate fi necesar să asamblați spătarul scaunului. Produsul pe care îl aveți în mâini poate diferi de cel din fotografiile următoare. Procesul de asamblare este similar. NU sunt necesare unelte pentru asamblare.

Asamblare:

Produsul se livrează asamblat și gata de utilizare. Poate fi necesar să asamblați scaunul cu spătarul. Produsul pe care îl aveți în mână poate diferi de cel din fotografiile următoare. Procesul de asamblare este similar. NU sunt necesare unelte pentru asamblare.

Pentru a asambla Spatarul cu scaunul, treceti simultan tuburile spatarului in fantele speciale de sub scaun pana se blocheaza.

Pentru a instala spătarul pe scaun, introduceți în același timp tuburile spătarului în fantele speciale de sub scaun, până când se blochează pe loc.

GARANTIE:

Produsul este garantat să funcționeze timp de un (1) an de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Deteriorări sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (acolo unde este prevăzut), companiile de transport de asemenea nu sunt acoperite de garanție.

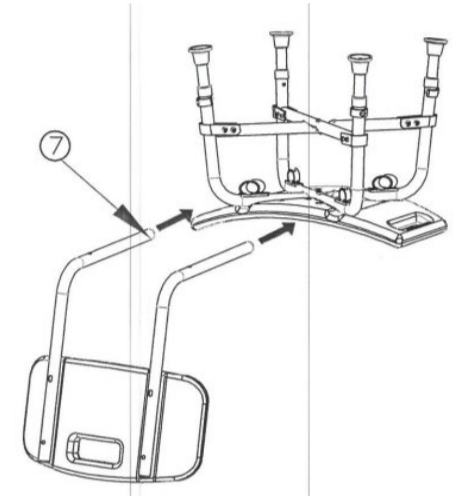
GARANTIE:

Produsul este garantat pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării. Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a produsului. operare instrucțiuni.

De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Daunele sau defecte cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperiți de garanție.

Nu se aplică niciun service sau piesă de schimb decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile aflate în garanție trebuie plătite de utilizatorul final-client sau de dealer.

**FORMUL DE GARANȚIE:**

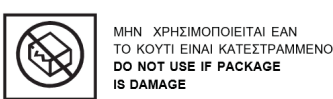
DETALII CUMPĂRĂTORI:	
NUMELE COMPLET	
NUMELE COMPLET:	
DATA CUMPĂRĂRII	
DATA CUMPĂRĂRII:	
TELEFON /	
Telefon:	
Lot:	
DETALII DEALER	
NUME /	
NUMELE COMPLET:	
ADRESĂ /	
ADRESA:	
TELEFON /	
Telefon:	
SIGILUL ȘI SEMNĂTURA MAGAZIN / SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA	

MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

MULTILINGVĂ
MANUALE

**Interpretarea contribuțiilor găsite pe eticheta de pe cutie sau & în instrucțiunile de utilizare a produsului**

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare



REF :0808523

MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

