



GHID RAPID – ROMÂNĂ



eFOLDi

Desfacerea scaunului electric eFOLDi

Înainte de a începe, așezați scaunul electric într-un spațiu deschis, departe de animalele de companie și copiii mici.

Desfășurarea este simplă și, cu puțină practică, o veți putea configura în câteva secunde.

Vă sfătuim să exersați cu Power Chair înainte de a vă aventura pentru prima dată.



1

Roțile anti-răsturnare și încărcătorul de baterie sunt furnizate împreună cu scaunul electric.



2

Montați roțile anti-răsturnare. Acestea pur și simplu se apasă și se blochează în loc.



3

Desfaceți scaunul electric prin simpla împingere a scaunului în jos în timp ce trageți pârghia de eliberare în sus.



4

Instalați suporturi pentru cotiere în sloturi și apăsați-le în jos până se blochează.

Țineți cablurile departe de punctele de prindere



5

Luați unitatea de control și tija și...



6

...introduceți tija controlerului în fittingul pentru cotieră de sub cotieră...



7

reglați poziția controlerului și strângeți cu butonul moletat.



8

... Scoateți controlul însoțitorului din buzunarul din spate și atașați-l pe bara din spate.



9

Trageți suportul pentru picioare în jos.



10

Instalați pernele de scaun așa cum se arată. Acestea sunt ținute în poziție prin velcro. Asigurați-vă că acestea sunt pliate peste spătar și sub scaun.



11

Introduceți bateriile până când se fixează. Scaunul dumneavoastră electric este acum gata.



12

Porniți scaunul electric apăsând butonul POWER. Consultați manualul dumneavoastră pentru informații complete.

Plierea scaunului electric eFOLDi



1 Opriti alimentarea folosind butonul POWER de pe controlerul manual. **Opriti întotdeauna alimentarea când scaunul nu este utilizat pentru a economisi energia bateriei.**



2 Slăbiți ușor butonul moletat și scoateți controlerul. Așezați controlerul și centura de siguranță pe suportul scaunului. **Strângeți din nou butonul pentru a preveni pierderea.**



3 Scoateți controlul insoțitorului și puneți-l în buzunarul din spatele scaunului.



4 Verificați că roțile din față sunt poziționate înainte pentru a asigura o pliere lină. *Sfatul trage scaunul înapoi pentru a alinia roțile*



5 Atingeți sub marginea scaunului și trageți bara de eliberare în sus pentru a elibera scaunul și...



6 ...trageți scaunul în sus și spre dvs. pentru a plia scaunul electric. Rabatați în suport pentru picioare.

Încărcarea bateriei scaunului electric eFOLDi



Pentru a încărca scaunul electric, conectați cablul de încărcare la baza controlerului joystick și conectați mufa de ca la o priză. Aceasta va încărca **AMBELE** baterii simultan.



Pentru a scoate bateriile pentru călătorie sau încărcare individuală, apăsați clapeta roșie în sus și glisați bateria înapoi.




Bateriile pot fi încărcate separat de scaun, utilizând adaptorul scurt „pigtail” care trebuie conectat mai întâi la cablul de încărcare.

Funcționarea scaunului electric eFOLDi



Controlerul receptorului are butoane pentru reglarea vitezei și afișaje pentru a indica puterea rămasă și setarea vitezei.

Puteți dezactiva sirena de marșarier apăsând butonul indicat.

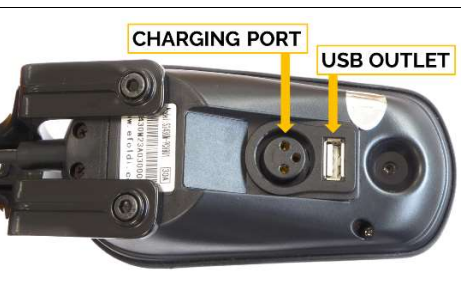

Portul de încărcare al scaunului dumneavoastră electric este situat sub receptor pentru a încărca **AMBELE** baterii simultan.

Există, de asemenea, o priză USB pentru alimentarea unui telefon sau alt dispozitiv USB.



Controlul insoțitorului poate fi setat pentru a regla viteza de mers pentru un insoțitor/ingrijitor și oferă, de asemenea, o verificare a bateriei.

Pârghia controlează mișcarea înapoi sau înainte.

Vă rugăm să rețineți că acest prospect este doar un ghid rapid. Pentru instrucțiuni complete, vă rugăm să consultați manualul produsului nostru de utilizare.

Orice întrebări, vă rugăm să ne sunați la 0800 915 0800 sau un e-mail hello@efoldi.com