



GR EN



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: **ŞAUN DE WC BEJ EZ**

MANUAL DE UTILIZARE: **SCAUN COMODĂ, BEJ GE**

REF: **0804455 și 0804456 și 0804457**

CE

UTILIZARE PREVENTATĂ

Toaletele pot fi folosite de persoane cu mobilitate redusă în casă și ca ajutor pentru vasul de toaletă fără recipient.



COD: 0804457
STABIL



COD: 0804455
Pliabil



COD: 0804456
RABATĂ-ROLĂ

CARACTERISTICKA

- Cadru de oțel
- Înălțime reglabilă
- Cărucior (**Cod: 0804456**)

DIMENSIUNI

COD:						
0804457	45 cm	40 cm	62 cm	41-56 cm	6 Kg	115 kg
0804455	45 cm	41 cm	55 cm	41-56 cm	6,5 kg	115 kg
0804456	45 cm	41 cm	55 cm	49-59 cm	7,2 kg	115 kg

SIMBOLULE

Vă rugăm să-l consultați **ANEXA A**

MONTAJ

Vă rugăm să-l consultați **ANEXA B**

Cod 0804457 vine asamblat, gata de utilizare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Vasul de toaletă trebuie curățat imediat după utilizare. În primul rând, clățiți cu multă apă caldă. Apoi utilizați o cârpă moale înmuiată într-un detergent blând sau soluție antiseptică. Ștergeți cu o cârpă moale curată.

ATENȚIE :Nu utilizați soluții acide și caustice.

Vă recomandăm să o curățați cu un detergent ușor pentru a o proteja de petele de ulei și praf.

O practică obișnuită este de a folosi o sticlă de pulverizare umplută cu un amestec de apă și săpun antibacterian. Pulverizați produsul și apoi ștergeți cu un prosop curat. Cea mai bună soluție este să curățați cu apă caldă amestecată cu săpun ușor și apoi să uscați bine.

Nu fumați și nu folosiți nicio flacără în apropierea produsului.

Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.

IMPORTANT (!)

Înainte de a folosi toaleta **ASIGURAȚI-VĂ CĂ**:

- Este complet extins și blocat în această poziție.
- Roțile (dacă sunt echipate) sunt bine fixate.
- Scaunul se potrivește corect și este blocat pe loc.
- Recipientul este plasat corect în fanta corespunzătoare.
- Nu există fisuri sau rupturi în cadru.



ATENȚIE

În cazul unei probleme cu oricare dintre cele de mai sus **NU** folosiți scaunul până când problema este corectată.

ALTE INSTRUCȚIUNI

- Când stați în picioare sau în picioare, trebuie să apăsați mânerul în jos, astfel încât toaleta să rămână staționară și anti-alunecare.
- Când stați în picioare, trebuie să vă sprijiniți de ambele mâneruri în mod egal. Sprijinul cu o singură mână (și fără însoțitor) poate provoca daune sau răni.
- Curățați toaleta în mod regulat.
- Nu lăsați toaleta umedă.
- Nu lăsați copiii lângă toaletă nesupravegheați

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.



PROTECȚIA MEDIULUI / ΑΝΤΟΣ

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncându-vă produsul acum inutil la punctul corect de reciclare, ajutați. În protecția mediului precum și în reexploatarea materialelor produsului dumneavoastră.

GARANȚIE

Produsul are garanție de buna funcționare timp de 1 an.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele de uzură, cum ar fi frânele, și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Deteriorări sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (acolo unde este prevăzut), companiile de transport de asemenea nu sunt acoperite de garanție.

FORMUL DE GARANȚIE

DETALII CUMPARATOR			
NUMELE COMPLET:			
DATA CUMPĂRĂRII:		TELEFON:	
NUMĂR DE SERIE:			
Lot:			
DETALII MAGAZIN			
NUME:			
ADRESA:			
TELEFON:			
SIGILUL ȘI SEMNATURA MAGAZINULUI			

MOVIAC SA
Kathiana din Akrotiri
Chania-Creta
+ 30-28210-63222, www.mobiakcare.com

 **MOBIAC**[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

UTILIZARE PREVENTIVĂ

Toaleta fixă întărită poate fi folosită de persoanele cu mobilitate redusă în interiorul casei, de asemenea, poate fi un ajutor pentru chiuveta de toaletă fără vas.



REF.: 0804457
STABIL



REF.: 0804455
Pliabil



REF.: 0804456
PLIABLE-CU ROȚI

SPECIFICAȚIUNI

- Cadru din otel.
- Înălțime reglabilă.
- Cu roțile (Ref: 0804456)

DIMENSIUNI

REF.:						
0804457	45 cm	40 cm	62 cm	41-56 cm	6 Kg	115 kg
0804455	45 cm	41 cm	55 cm	46-56 cm	6,5 kg	115 kg
0804456	45 cm	41 cm	55 cm	49-59 cm	7,2 kg	115 kg

SIMBOLULE

Vă rugăm să consultați ANEXA A

ASAMBLARE

Vă rugăm să consultați ANEXA B

Codul 0804457 este deja asamblat și gata de utilizare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățați recipientul de toaletă imediat după utilizare. Inițial, clătiți cu apă caldă. Apoi utilizați o cârpă moale impregnată într-un detergent blând sau soluție antiseptică. Ștergeți cu o cârpă curată și moale.

ATENȚIE: Nu utilizați diluții acide și caustice.

Vă recomandăm să curățați produsul cu un detergent ușor pentru a-l proteja de petele de ulei și praf. O practică obișnuită este de a folosi o sticlă de pulverizare umplută cu un amestec de apă și săpun antibacterian. Pulverizați suprafața și apoi ștergeți cu un prosop curat. Cea mai bună soluție este să fie curățată cu apă caldă amestecată cu un săpun blând și apoi uscată bine.

Nu fumați și nu folosiți nicio flacără în apropierea produsului.

Protejați produsul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.

IMPORTANT!

Înainte de a utiliza scaunul de comodă, asigurați-vă că:

- Este în extensie completă și este blocat în această poziție.
- Roțile (dacă sunt disponibile) sunt bine fixate.
- Scaunul este corect plasat și sigur în această poziție.
- Rezervorul este plasat corect în slotul corespunzător.
- Nu există fisuri sau fracturi în cadru.



AVERTIZARE

Dacă apar probleme în oricare dintre cele de mai sus, **NU** folosiți scaunul de comodă până când problema este rezolvată.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE

- Când stați sau vă ridicați de pe scaunul comod, împingeți mânerul în jos, asigurându-vă că va sta nemișcat și nu va aluneca.
- Când ieși din comodă trebuie să te bazezi pe ambele mâner în mod egal. Aplecarea doar de un mâner (fără escortă) poate provoca răni sau deteriora produsul.
- Curățați în mod regulat scaunul de comodă.
- Nu lăsați scaunul de comodă să se ude.
- Nu lăsați copiii să se apropie de scaunul de comodă fără supraveghere.

Declarație de conformitate CE

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că dispozitivul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați aparatul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncate aparatele dumneavoastră.
- 3) Aruncarea corectă a aparatului dumneavoastră ajută la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor aparatului.

GARANȚIE

Produsul are garanție de buna funcționare timp de 1 an. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă defectele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare a produsului. De asemenea, NU acoperă piesele uzate, cum ar fi frânele, și orice va fi deteriorat în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (acolo unde este prevăzut), companiile de transport nu sunt, de asemenea, acoperite de garanție.

FORMUL DE RECLAMARE GARANȚIE

DETALII CUMPĂRĂTORI:			
NUMELE COMPLET:			
DATA CUMPĂRĂRII:		TELEFON::	
NUMĂR DE SERIE:			
Lot:			
DETALII DEALER			
NUMELE COMPLET:			
ADRESA:			
Telefon:			
SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA			

MOBIAK Sa
Kathiana Akrotiriou
Chania-Creta
+ 30-28210-63222 www.mobiakcare.com





















ANEXA A. SIMBOΛEURI BOΛA

ANEXA A. SIMBOEURIS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοιβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

ANEXA B. COD DE MONTAJ: 0804455 & 0804456

ANEXA B. MONTAJ REF:0804455 & 0804456

Conținutul pachetului
0804456.

Conținutul pachetului pentru articol
0804456

*Cod 0804455 NU are roti

* Articolul 0804455 nu are
roti.



După deschiderea pachetului.

După deschiderea pachetului.



Ridicăm partea de legătură
paralelă cu spatele. Apoi
plasăm curbele în pozițiile
corespunzătoare și apăsăm
până când
butonul sus



Ridicați partea de conectare paralelă cu spatele. Apoi plasați curbele în pozițiile corespunzătoare și apăsați până se blochează.



Așezați recipientul în poziția t (din partea din față a căruciorului).

Așezați recipientul în poziția corectă (din partea din față a scaunului cu roțile).



Instalați scaunul.

Așezați scaunul.



Instalați capacul.

Așezați capacul.

