

BURMEIER

Noptiera Hermann




Model
61.3631.33

Tip
148128



Stand: 24.08.2007

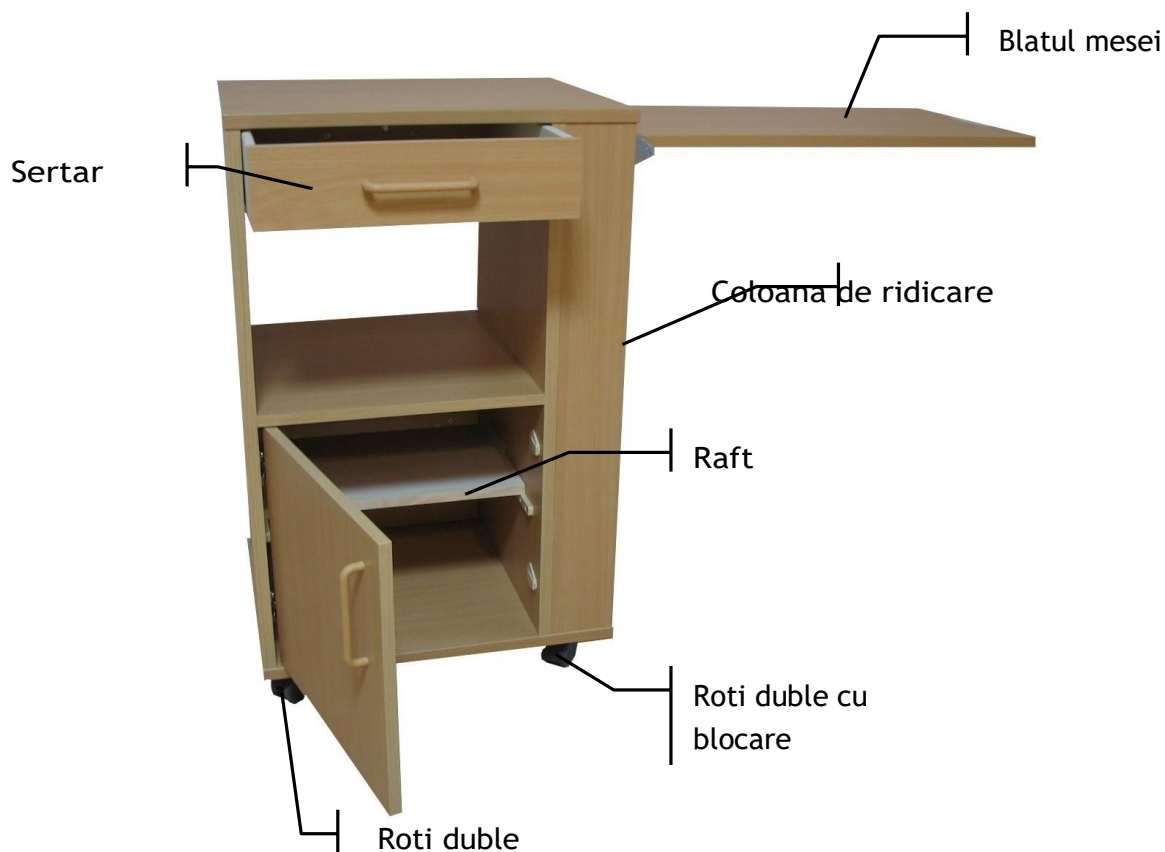

Cuprins

1	Introducere.....	3
2	Instructiuni de siguranta	3
3	Aplicatie.....	4
4	Instructiuni de ingrijire	4
5	Piese de schimb.....	5
6	Accesorii	5
7	Date tehnice	6
8	Instructiuni de eliminare.....	6

1 Introducere

Draga client,

Firma BURMEIER va multumeste pentru increderea acordata noua si produselor noastre prin achizitionarea noptierei „Hermann”.

Fiecare dispozitiv a fost testat în fabrică pentru siguranță și funcționalitate și a plecat din compania noastră în stare perfectă.

Aceste instrucțiuni de utilizare vă informează în calitate de operator și utilizatori în munca zilnică despre toate funcțiile care sunt necesare pentru o operare confortabilă și manipularea în siguranță a acestui dispozitiv.

Prin urmare, ar trebui să vedeți aceste instrucțiuni de utilizare ca o lucrare practică de referință și să le păstrați aproape de noptieră și gata la îndemână în orice moment.

Vă dorim mult succes dvs. și utilizatorilor dumneavoastră în operarea acesteia și suntem convinși că produsul nostru poate avea o contribuție pozitivă asupra acesteia.

Burmeier GmbH & Co. KG

2 Instructiuni de siguranta

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată:

Citiți complet aceste instrucțiuni de utilizare pentru a evita deteriorarea cauzată de o funcționare incorectă.

Curățați și dezinfectați noptiera înainte de a o folosi pentru prima dată și înainte de a o folosi din nou.

Instruiți utilizatorii cum să folosească noptiera în siguranță

Înainte de a utiliza o noptieră, asigurați-vă că noptiera și accesoriile sunt funcționale și în stare bună

Sarcina maximă pe blatul mesei este de 10 kg. Nu te sprijini!

Actionați întotdeauna franele!

3 Aplicație



Îndepărtează blatul mesei

Trageți blatul mesei

Blat de masa pe lateral

Atenționare! Blatul mesei trebuie să fie rotit cu partea plată a mâinii - risc de blocare

4 Instrucțiuni de îngrijire

Blatul noptierei este realizat din plastic ABS de înaltă calitate. Când plasticele ABS sunt amestecate cu lichide ușor uleioase (în funcție de valoarea PH), culoarea suprafeței se poate modifica.


Acest lucru poate duce la decolorarea inestetică și formarea de margini pe suprafață. Cu toate acestea, nu există nicio reducere a rezistenței plasticului.

Lichidele care pot provoca această decolorare și sunt cele mai frecvente în utilizare practică includ cafeaua, ceaiul etc.

Din acest motiv, vă rugăm să rețineți instrucțiunile de îngrijire pentru panourile din plastic ABS: Nu lăsați petele de cafea, ceai etc. să se usuce, dar ștergeți-le cât mai curând posibil cu agenți de curățare disponibili în comerț.

5 Piese de schimb

Piesele de schimb corespunzătoare sunt disponibile de la BURMEIER, menționând articolul și numărul de serie. Vă rugăm să consultați plăcuța de identificare de pe interiorul compartimentului de depozitare închis pentru informațiile necesare.

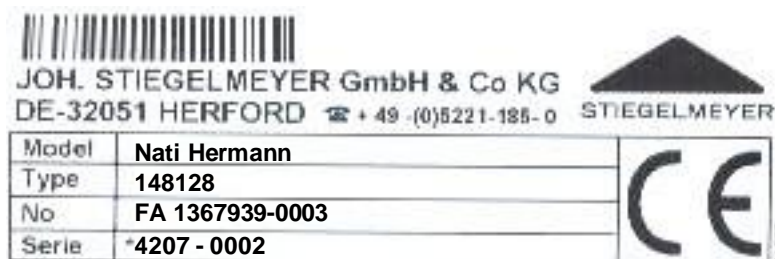

Pentru a menține fiabilitatea funcțională și revendicările de garanție, pot fi utilizate numai piese de schimb originale BURMEIER!

Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile generale pentru condițiile noastre de garanție.

Pentru comenzi de piese de schimb, întrebări de serviciu clienți și alte întrebări, vă rugăm să contactați:

BURMEIER GmbH & Co. KG

(Ein Unternehmen der STIEGELMEYER-Gruppe)

Pivitsheider Straße 270 · D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 0 52 32/98 41 – 0 · Fax: 0 52 32/98 41 – 41

Email: service-zentrum@burmeier.de

6 Accesorii

Următoarele accesorii sunt disponibile pentru noptiera Hermann:

- Inserție sertar din plastic
- Coș pentru sticle(pentru 3 sticle)

7 Date tehnice

Dimensiuni: Latime 45,5 cm, Lungime: 55 cm, Inaltime 88 cm Lungime totala: 123 cm (blat mese desfasurat) Inaltime blat: 84 cm

Blat masa: 75 x 36 cm

Încărcare maximă suport pentru masă: 10 kg (blat de mijloc)

Set roți: roți duble (2 cu frâne) Ø 50 mm

8 Instructiuni de eliminare

Toate materialele de ambalare trebuie eliminate în mod corespunzător (punctul verde).

- Dacă dispozitivul este casat, părțile din plastic, lemn și metal trebuie separate și eliminate în mod corespunzător.

Vă rugăm să contactați compania locală de eliminare a deșeurilor

Publicat de :

Burmeier GmbH & Co. KG

(Ein Unternehmen der STIEGELMEYER-Gruppe)

Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe

Tel. : 0 52 32/98 41- 0 • Fax: 0 52 32/98 41- 41

www.burmeier.de

Email: auftrags-zentrum@burmeier.de



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herausgebers!

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Hermann_v0_24082007.doc