

MULTILINGVĂ
MANUALE



Instrucțiuni de utilizare/Manual de utilizare

REF: 0811955

SCAUN ELECTRIC, "ESTIA III"
SCAUN ELECTRIC, „ESTIA III



23 decembrie

1. Prefață

Vă mulțumim că ați ales scaunul electric de ridicare „ESTIA III” MOVIAC S.A. Manualul produsului este un document important care vă oferă informații despre caracteristicile tehnice ale produsului, modurile de operare și asistența post-vânzare.

- **Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza acest produs manualul conține funcții, metode de asamblare.**
- **Aflați produsul și exerciți înainte de orice aplicare.**
- Acest manual se aplică modelelor noastre: **0811955**
- Oferiți acest manual ca referință atunci când alte persoane îl vor folosi produs.

- Adnotările și imaginile din acest manual pot diferi ușor de piese reale datorită îmbunătățirii calității sau modificării designului. Verificați-l cu atenție

- Produsul pe care îl ai în mâini poate să difere de cel din fotografiile următoare. Procesul de asamblare este similar.
- Contactați dealerul dumneavoastră dacă aveți îndoieli sau întrebări.
- Utilizarea necorespunzătoare a oricărui produs poate duce la vătămări. Non utilizarea în condiții de siguranță vă poate dăuna pe dumneavoastră și pe alții.
- Produsul este conceput doar pentru a transporta 1 persoană.
- Dacă apare o problemă NU utilizați produsul până când restaurat și contactați dealerul dumneavoastră autorizat și instruit
- Utilizarea produsului în cauză este interzisă în alte scopuri decât cele definite în acest manual.

- MOVIAC S.A. respinge orice responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOVIAC SA își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, pentru a-și îmbunătăți caracteristicile.
- Există o posibilitate de abatere în dimensiunile produselor din gamă $\pm 3\%$.
- Se recomandă întotdeauna să urmați procedurile concepute pentru tratamentul situațiilor de urgență.

- Urmați întotdeauna instrucțiunile medicului dumneavoastră.

2. Utilizare prevăzută

Scaunul cu roțile lift „ESTIA III” este destinat persoanelor cu dizabilități, bolnavi și vârstnici precum și persoanelor cu dificultăți de mobilitate și mobilitate redusă care au nevoie de ajutor suplimentar pentru deplasare.

Poate fi folosit pentru a transporta utilizatorul la și de la pat, scaun și/sau toaletă.

Poate fi folosit ca scaun de transport, ca scaun de toaleta și ca lift pelvin.

Scaunul cu roțile lift este potrivit pentru utilizare în interior, iar viteza de transport este ≤ 3 km/h.

3. Prezentarea Produsului

3.1 Caracteristicile și funcțiile produsului

Marea deschidere 180°. Facilitează portabilitatea utilizatorilor. Acest lucru vă permite să mutați utilizatorul foarte confortabil, ridicându-l ușor de pe pat, scaun sau canapea.

Înălțime reglabilă electric. Înălțimea produsului poate fi reglată cu ajutorul dispozitivului încorporat mecanism electric, astfel încât să se adapteze la orice suprafață fără ca utilizatorul să fie nevoit să se ridice de pe ea. Acest lucru ușurează, de asemenea, însoțitorului, deoarece nu trebuie să exercite multă forță fizică.

Sigur și ușor de utilizat. Rotile cu frane, maneta de blocare și centura în spate partea din spate, mânerul de împingere pliabil, perna de scaun pre-detașabilă și recipientul pre-detașabil fac produsul sigur și ușor de utilizat.

Îmbunătățirea stilului de viață. Ușurința de transport a utilizatorului pentru nevoile zilnice și facilitățile în toaleta lui îi ajută să-i stimuleze psihologia.

Confort. Perna de șezut căptușită oferă confort și permite dimensiuni mari perioadele de ședere. Include o husă de protecție care este ușor de spălat și detașabil.

Sarcina maximă este de 100 kg, potrivit pentru persoane cu diferite tipuri de corp.

Nivel de impermeabilitate IP25. Produsul a fost testat și marcat cu IP25 (2: Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12 mm. & 5: Protecție împotriva jeturilor de apă la presiune joasă din orice direcție.)


Oferă performanțe bune de impermeabilitate și poate fi folosit pentru duș.

Depozitare ușoară. Designul cu partea de șezut detașabilă și baza pliabilă a produsului ajută la depozitarea cu ușurință atunci când nu este nevoie să-l folosești.

3.2. Conținutul pachetului






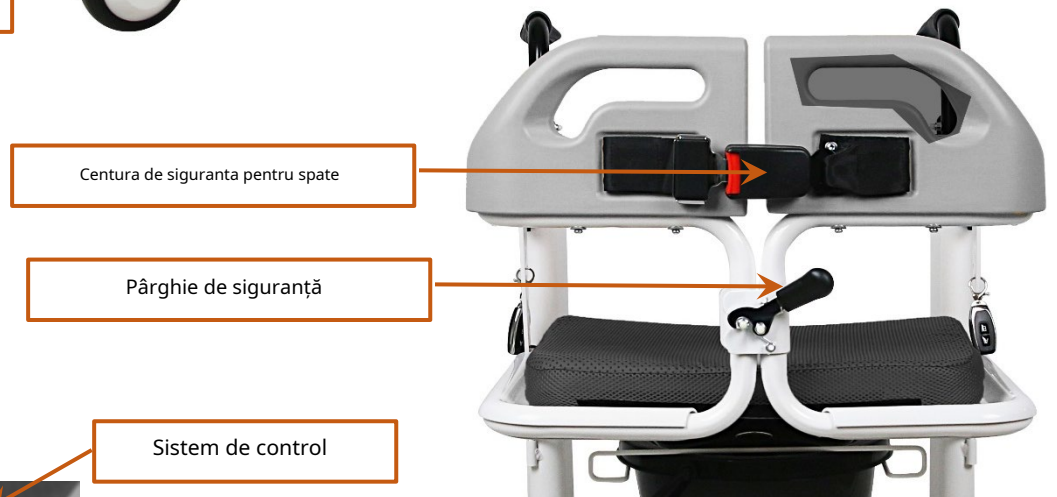



Pachetul include: cadru principal x1, parte scaun dreapta x1, parte scaun stânga x1, roți față x1, container x1, bază container x1, pernă pentru scaun x1, manual de utilizare x1, telecomandă x1, încărcător cu cablu de alimentare x1 și trusă de scule x1.

3.3 Elemente individuale & Structura produsului

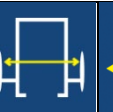

3.4. Caracteristici și dimensiuni

Cod model	0811955
Schelet	Aluminiu
Schelet	Pliabil și partea scaunului este detașabilă
Material pentru spate și braț	ABS
Material scaun	Otel, cu tuburi de mare rezistență în jurul perimetrului
Perna de scaun	Are husă pre-detașabilă și lavabilă
Roțile din spate	3". Cu frână și capacitate de rotație 360°
Roțile din față	5", cu frână
Frâne	Pe roțile din față și din spate
Taburet	Suport fix (platformă)
Raza minimă Rotație	77 cm
Cu sistem electric Ridicare	Sistemul electric de ridicare controlează ridicarea bazei scaunului din secțiunea verticală a cadrului produsului.
Zgomot	≤ 65 dB
Baterie	Litiu 1 PC X 24V X 4 AH (situat în interiorul cadrului)
Durata de viață a bateriei	După o încărcare completă, cu o baterie nouă și un utilizator de 100 kg, se calculează de 130 de ori Ridicare și Coborâre. Durata de viață a bateriei este estimată la 800 de cicluri de încărcare.
Alimentare electrică	INTRARE: 220 V AC, 50 Hz, 30 W / IEȘIRE: 24 V-29,4/1 A
Nivel Impermeabil	IP25
Sarcina maximă	100 Kg
Greutate totală (fără perna)	23 Kg

									
0811955	46 cm	40 cm	57 cm	77 cm	87- 115 cm	46- 76 cm	3"5"	100 kg	23 kg

3.5 Avertismente generale de siguranță (citiți cu atenție) ΕΚΤΙΚΟ

- Păstrați acest manual pentru utilizare ulterioară.
- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este mai bine să nu îl utilizați produsul sau alt accesoriu disponibil.
- Înainte de a utiliza produsul, verificați toate componentele electrice și neelectrice, dacă acestea au fost conectate cu siguranța și stabilitate.
- Sub nicio formă NU deconectați, tăiați sau modificați părțile cablajului care instalat sau conectat la produs.
- NU folosiți alte baterii care nu sunt adecvate.
- Înainte de instalare, citiți informațiile despre baterie și cele care este pe încărcător.
- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil dacă nu ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.
- Dacă nu puteți înțelege avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, un reprezentant sau un personal tehnic înainte de a încerca să utilizați produsul.
- Aveți grijă când sunt copii prin preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu el produs.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Nu fumați și nu folosiți flacăra în apropierea produsului.
- O atenție deosebită este întotdeauna necesară acolo unde există părți în mișcare care pot provoca blocarea membrelor și răni
- Nu încercați să ridicați produsul de pe orice piesă asamblată.
- În cazul utilizării pe teren în pantă, toate cele patru roți trebuie blocate.
- Creșteți atenția atunci când utilizați produsul pe covoare, suprafețe umede sau alunecoase.
- **Gradul de impermeabilitate al produsului este IP25. Poate fi folosit și la dus. Comutatorul de frână al tuturor celor patru roți trebuie blocat înainte de duș pentru a evita posibilele alunecări. Produsul nu poate fi folosit scufundat în apă. Dacă zona nu se scurge bine și apa se acumulează lângă partea inferioară a bateriei, vă rugăm să opriți dușul și mutați imediat scaunul de transfer într-un loc în care nu există apă.**
- Nu încărcăți niciodată bateria în timp ce produsul este încă ud, în timpul sau după dușul.
- Nu atingeți ștecherul de alimentare al încărcătorului cu mâinile ude pentru a evita acest lucru risc de electrocutare.
- Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat înainte de încărcare. Nu utilizați încărcătoarele deteriorate și contactați distribuitorul local dacă acest lucru s-a întâmplat.
- Nu utilizați produsul pe scări (rulant sau nu). În cazul în care există, nu este transferat utilizatorului împreună cu produsul. La urcarea sau la coborârea scărilor, operatorul nu trebuie să miște utilizatorul cu produsul.
- În caz de reparație folosiți numai piese de schimb originale, folosiți întotdeauna accesorii sau adaptoare aprobate de MOBIAK.

Nerespectarea cerințelor de mai sus poate duce la vătămări sau daune.

3.6 Înainte de utilizare și alte instrucțiuni.

- Scaunul cu roțile lift trebuie folosit numai în interior, în suprafață plană anti-alunecare pentru a asigura stabilitate.
- Utilizarea trebuie făcută întotdeauna sub supravegherea unui membru al familiei, a asistentei medicale personal sau însoțitor.
- Când utilizatorul stă sau se ridică de pe scaunul cu roțile liftului fără asistență necesită, de asemenea, forța și mobilitatea corespunzătoare în partea superioară a corpului.
- Asigurați-vă că este asamblat corect, baza este complet extinsă și are blocat în această poziție, scaunul este bine blocat și containerul, dacă urmează să fie utilizat, este așezat corespunzător în fanta corespunzătoare.
- Rotile sunt bine fixate.
- Nu există fisuri sau rupturi în cadru.
- La reglarea înălțimii scaunului, roata din față trebuie blocată. Operatorul folosește comutatorul electric pentru a controla înălțimea.
- Reglați înălțimea corespunzătoare și asigurați-vă că cadrul scaunului este pe ambele laturile rămâne la aceeași înălțime.
- Când utilizatorul se așează sau se ridică de pe scaunul cu roțile lift, asigurați-vă că roțile sunt asigurate.
- Când utilizatorul se așează sau se ridică de pe scaunul cu roțile lift, nu trebuie stând pe cadru deoarece există un risc mare de răsturnare. În timpul acestui proces, utilizatorul trebuie să stea pe pământ.
- Când utilizați scaunul cu roțile lift, cu utilizatorul în picioare și înainte porniți, asigurați-vă că încuietoarea de siguranță pentru spate și centura de siguranță sunt blocate.
- În timpul utilizării scaunului, nu ridicați obiecte de pe pământ.
- Când stați în picioare sau în picioare, trebuie să exercitați o forță verticală asupra mânelor, astfel încât scaunul cu roțile ridicați scaunul pentru a rămâne staționar și pentru a nu aluneca.
- Când stați în picioare, trebuie să vă sprijiniți de ambele mâneri în mod egal. Sprijiniți doar unul mâna (și neînsoțită) poate provoca daune sau răni.



AVERTISMENT:ΣΗ :

Când utilizați scaunul electric electric, la duș, înainte de a intra în zonă, opriți întotdeauna întrerupătorul central ON/OFF și acoperiți întotdeauna priza de încărcare cu capacul special.




Nerespectarea cerințelor de mai sus poate duce la vătămări sau daune.

4. Instrucțiuni de asamblare, încărcare și manipulare.

4.1. Instrucțiuni de asamblare


1. Scoateți corpul principal al scaunului de transport din cutie, scoateți cele două șuruburi $\Phi 8$ „D” de pe părțile corespunzătoare ale bazei, apoi pe ambele părți așezați picioarele bazei în poziția corespunzătoare, re- instalați știfturile pentru a fixa.

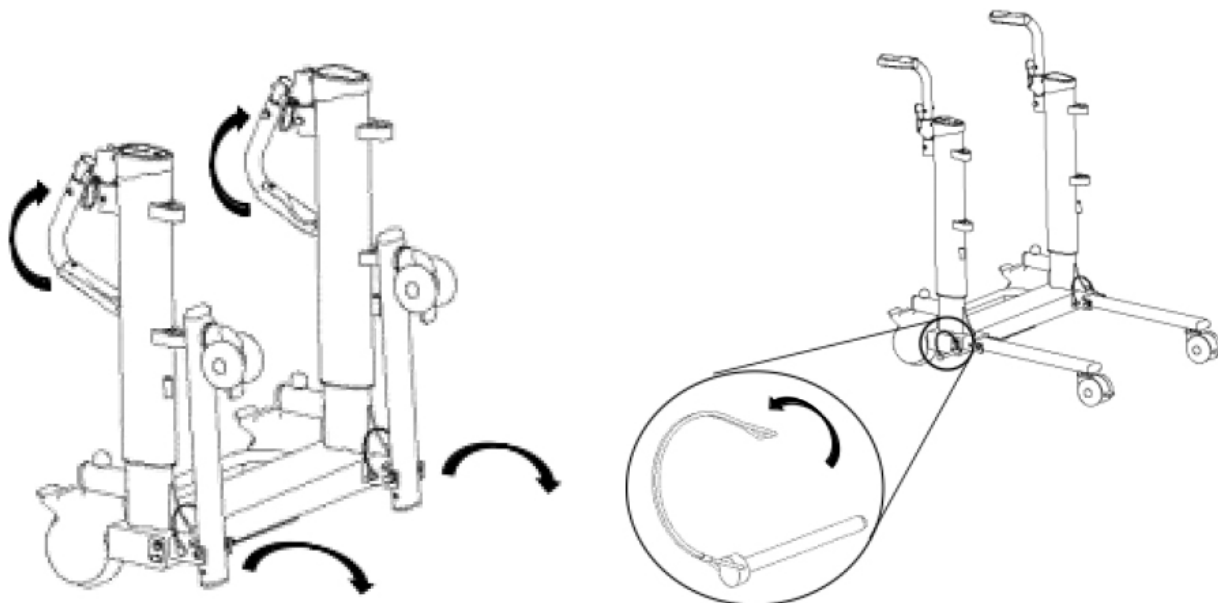

2. Mutați mânerul de împingere din stânga și din dreapta în poziția de utilizare.



3. Așezați partea dreaptă a scaunului direct peste fantele care sunt situate în tubul cadru drept. găurile sunt aliniată, așa că trebuie să aliniați și piesa. Apăsăți în jos și țineți apăsat știftul de eliberare rapidă din secțiunea dreaptă până când se fixează în poziție.

(folosiți aceeași metodă pentru cealaltă parte a scaunului)

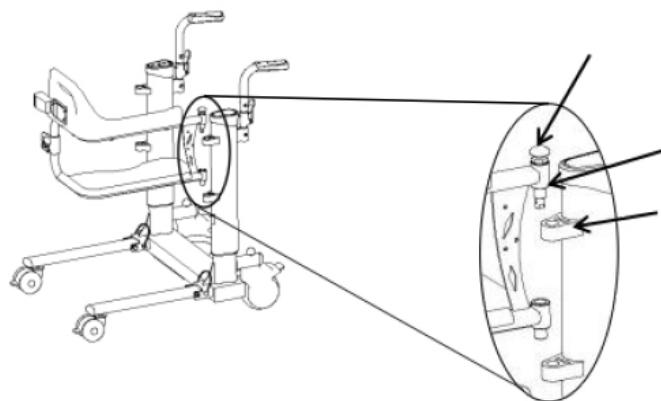

4. Baza scaunului nu este în mod evident slăbită și se poate roti flexibil.


5. Dacă trebuie să utilizați rezervorul, puneți mai întâi suportul rezervorului în orificiile sale de montare, care se află în tuburile verticale ale cadrelui, apoi instalați rezervorul din spate.

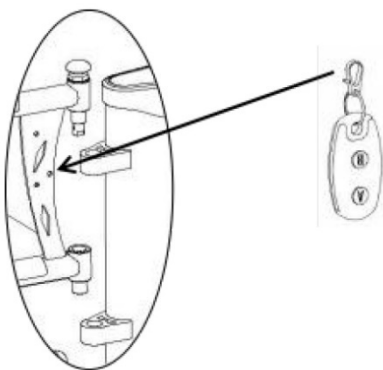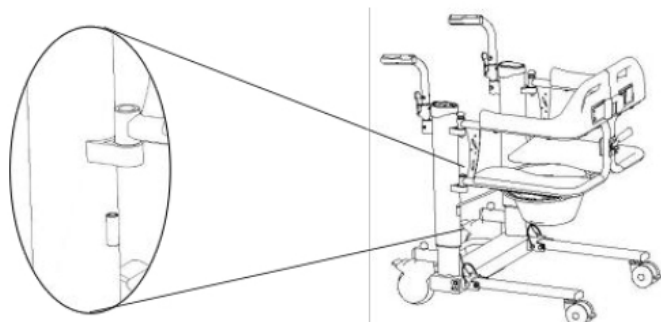

6. Controlerul wireless este atârnat în găurile sale placa laterală a brațului scaunului stâng sau drept.

4.2. Instrucțiuni de încărcare.

1. Trebuie să utilizați încărcătorul furnizat împreună cu pachetul astfel încât asigura o utilizare sigură.
2. Deschideți mai întâi capacul impermeabil al bazei de încărcare introduceți ștecherul încărcătorului în priză de pe produs și apoi ștecherul de alimentare, care se află la celălalt capăt al încărcătorului, în priză
3. În timpul procesului de încărcare, indicatorul luminos de pe încărcător este portocaliu și când lumina devine verde, înseamnă că bateria este complet încărcată. Când este complet încărcat, deconectați ștecherul de alimentare al încărcătorului și ștecherul de încărcare și **închideți capacul impermeabil.**
4. Păstrați încărcătorul într-un loc sigur, astfel încât să fie disponibil pentru utilizare ulterioară și opriți produsul atunci când nu îl utilizați pentru a economisi energie.
5. Timpul de încărcare depinde de puterea rămasă în baterie și nu trebuie depășește 12 ore. PENTRU PRIMA UTILIZARE bateria trebuie încărcată timp de 4-6 ore, astfel încât să fie complet încărcată.
6. Când încărcați produsul și pentru a evita pericolul, produsul trebuie să fie oprit (indicatorul luminos al comutatorului de alimentare este stins).
7. Durata de viață a bateriei este estimată la 800 de cicluri de încărcare. Când bateria nu mai funcționează, cumpărați o nouă baterie și înlocuiți-o după cum este necesar sau contactați producătorul pentru o înlocuire. Aruncați bateria veche la o unitate de reciclare specializată.

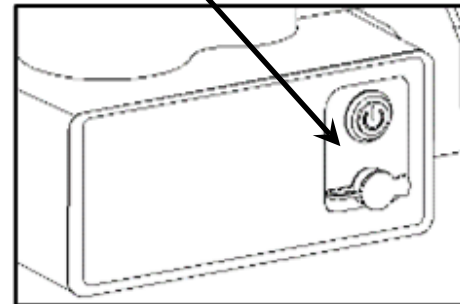

4.3. Prezentarea sistemului de control și control

1. Pentru sistemul de control, funcțiile sunt următoarele:



2. Pentru controler: butonul A este butonul corespunzător pentru ridicare, iar butonul B este butonul corespunzător pentru coborâre.



3. Conexiunea dintre sistemul de control și telecomandă se va face automat.

Indicator baterie	Indicator luminos	Nota
Plin (3 lumini)	Verde, Galben, Roșu, toate luminile sunt aprinse	
2 lumini indicatoare	Galben, Roșu. Verdele nu este aprins.	
1 indicator luminos	Roșu, Verde și Galben sunt dezactivate	Se recomandă încărcarea
Utilizarea este interzisă	Intermitent roșu, auziți un bip	Încărcare forțată

Notă: dacă încărcătorul este introdus în starea ON, luminile roșie, galbenă și verde se vor aprinde secvențial. Când toate cele trei lumini sunt aprinse, încărcarea este completă.

4.4. Instrucțiuni de operare.

1. Lăsați utilizatorul să stea cu spatele drept, porniți comutatorul de pornire (indicator luminos al comutatorului aprins), operatorul apasă butonul de ridicare sau telecomandă pentru a regla înălțimea scaunului. Reglați înălțimea scaunului astfel încât suprafața inferioară a scaunului să fie puțin mai înaltă decât nivelul utilizatorului.
2. Deschideți secțiunea scaunului pe ambele părți și mutați-o în fața utilizatorului, reglați scaunul de ridicare astfel încât centrul de greutate al corpului utilizatorului să fie în centrul cadrului scaunului și reglați din nou înălțimea scaunului astfel încât că partea inferioară a cadrului scaunului atinge ușor nivelul scaunului utilizatorului
3. Blocați frâna roții din față, ridicați piciorul utilizatorului și așezați-l pe suport pentru picioare. Lăsați utilizatorul să-și rotească corpul ușor la stânga și la dreapta și, în același timp, operatorul rotește cadrul scaunului lateral corespunzător (stânga sau respectiv dreapta), permițând utilizatorului să se așeze pe cadrul scaunului din stânga și din dreapta al scaunului lift. .
4. Când utilizatorul este așezat complet pe scaunul liftului, iar părțile din stânga și din dreapta ale scaunului sunt complet închise, operatorul trebuie să blocheze pârghia de blocare și centura de siguranță pe spate.
5. Apoi utilizatorul își poate regla postura astfel încât să fie confortabil și își poate pune mâinile pe cotiere.
6. Operatorul verifică distanța dintre suprafața inferioară a scaunului său și suprafețele pe care utilizatorul s-a așezat înainte, ridică cadrul cu 2-3 cm, eliberează frâna roții din față și îndepărtează încet scaunul de la fața locului folosind mânerle de împingere. .
7. Operatorul folosește mânerle de împingere pentru a duce utilizatorul în locul dorit.
8. Urmați procesul invers pentru a transfera utilizatorul de la produs pe scaun, pat sau canapea.

5. Condiții de depozitare și transport

Produsul trebuie depozitat și transportat ambalat în următoarele condiții

- Interval de temperatura: -20°C ~ 60°C.
- Interval de umiditate relativa: 25% ~ 95%.
- Intervalul de presiune atmosferică trebuie să fie 86~106kPa.

Pentru depozitare, produsul trebuie plasat într-un loc uscat și ventilat și nu trebuie plasat într-un mediu cu temperatură ridicată și schimbări rapide de temperatură. produsul trebuie izolat de substanțele chimice și corozive.

- La transport, manipulați produsul cu grijă.
- La ambalare, înălțimea maximă a stivei este de trei straturi.
- NUN depozitați produsul în locuri în apropierea surselor de temperatură ridicată sau expuse la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Dacă trebuie să îl salvați pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l întrerupător de alimentare după încărcarea completă a bateriei.
- Dacă produsul a fost depozitat mai mult de o lună, încărcați complet bateria și apoi utilizați-o sau continuați salvarea. Adică să verificăm nivelul și starea de sănătate a bateriei în fiecare lună.
- După depozitare pe termen lung, toate bateriile din primul ciclu de încărcare asigură mai mică decât capacitatea nominală. Capacitatea maximă poate fi atinsă după mai multe cicluri de încărcare/descărcare, de obicei cel puțin 3 cicluri.

6. Întreținere

Controlul periodic al produsului se face pentru a confirma funcționarea corectă a acestuia ca ajutor și trebuie făcut cel puțin o dată pe lună.

- Verificați starea recipientului pentru eventuale rupturi, fisuri și scurgeri.
- Verificați șuruburile cadrului. În cazul în care cineva este găsit liber, vă rugăm să o lăsați strânge.
- Verificați piesele din plastic și cadrul produsului pentru eventuale slăbiri, fisuri sau pauze.
- Verificați stabilitatea produsului.
- Verificați frânele roților și confirmați funcționarea acestora.
- Verificați uzura roților din față și din spate.
- În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb originale.



AVERTIZARE

În cazul unei probleme cu oricare dintre cele de mai sus **NU** utilizați produsul până când problema este rezolvată.

7. Curățenie

- Utilizatorul sau însoțitorul produsului este responsabil pentru curățare, inspecție și întreținere.
- Pe langa intretinere si control, se poate face si o curatare generala a ambelor sasiuri precum și tapet.
- NU lăsați produsul umed sau murdar cu praf sau noroi.
- Cadrul trebuie curățat regulat. Vă recomandăm să curățați cadrul și scaun cu un detergent blând. Pentru confortul dumneavoastră, puteți utiliza o sticlă cu pulverizator după adăugarea soluției. Pulverizați produsul și apoi curățați cu un burete.

- Folosiți o cârpă curată și moale pentru a șterge suprafața produsului.
- Recipientul trebuie curățat imediat după utilizare. În primul rând, clătiți cu multă apă caldă. Apoi utilizați o cârpă moale înmuiată într-un detergent blând sau soluție antiseptică. Ștergeți cu o cârpă moale curată
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături
- **ATENȚIE:** Nu utilizați soluții acide sau caustice.
- Husa de pernă este detașabilă și se poate spăla manual în apă rece.

8. Protecția mediului



Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. acum nefolositor la punctul corect de reciclare, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reexploatarea materialelor produsului dumneavoastră.
- 4) Produsele electrice datorate materialelor lor de construcție, dacă nu sunt eliminate în mod corespunzător, pot duce la riscuri suplimentare pentru mediu și pentru sănătate.

9. Raport de incident:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

10. Declarație de conformitate

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

11. Condiții de garanție

Produsul, de la data achiziționării, este garantat să funcționeze timp de doi (2) ani pentru cadrul principal și șase (6) luni pentru baterie.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură precum tapițeria, roata, anvelopa pentru roți, centura de siguranță, suporturile pentru picioare sau frânele și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Daunele sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie (acolo unde este prevăzut) și companiile de transport nu sunt, de asemenea, acoperite de garanție.

Nicio lucrare sau piese nu sunt acoperite decât dacă au fost inspectate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt plătite de către utilizator sau client sau de către comerciant.

Când faceți o cerere de garanție, vă rugăm să furnizați o dovadă validă de cumpărare și un formular de garanție completat, cu o fotografie a numărului de serie al produsului și o fotografie sau un videoclip cu problema care a apărut. În cazul în care utilizatorul nu poate furniza documentele de mai sus, dacă putem confirma că produsul sau piesa se află încă în perioada de garanție, este posibil să fim în măsură să satisfacem cererea utilizatorului de acoperire a garanției, dar nu suntem obligați să facem acest lucru.

FORMUL DE GARANȚIE Σ

DETALII CUMPARATOR	
NUMELE COMPLET:	
TELEFON:	
DATA CUMPĂRĂRII:	
NU. FACTURA:	
NUMĂR DE SERIE:	
Lot:	
DETALII MAGAZIN	
NUME:	
ADRESA:	
TELEFON:	
SIGILUL ȘI SEMNATURA MAGAZINULUI	



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



12. Exonerare de responsabilitate

Continutul manualului produsului este proprietatea intelectuală a MOVIAC S.A. (denumită în continuare „Companie”) și drepturile de autor sunt păstrate de Companie. Fără acordul scris al Companiei, nimeni nu poate copia, extrage sau traduce în alte limbi manualul sau orice conținut inclus în acesta sub nicio formă. Compania alcătuiește cu atenție manualul produsului cu simțul responsabilității față de utilizatori, dar nu garantează integritatea sau corectitudinea conținutului acestuia. Manualul produsului, ca document pur tehnic, nu conține conținut implicit sau conținut cu referire oblică la terți. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele erori de tipar care pot cauza ambiguități. În cazul pierderii directe sau indirecte a informațiilor sau al întreruperii activității din cauza manualului de produs sau a informațiilor despre produs conținute în acesta, Compania nu își asumă nicio responsabilitate.

La utilizarea tuturor produselor MOVIAC S.A. utilizatorii trebuie să urmeze cu strictețe manualul produsului și instrucțiunile de utilizare disponibile pe site-ul oficial al Companiei (www.mobiakcare.com) să opereze echipamentul și să nu încalce niciun avertisment marcat în manualul produsului la utilizarea echipamentului. În caz de vătămare a utilizatorilor sau a altor persoane, sau daune materiale din cauza manipulării echipamentului fără a respecta instrucțiunile de utilizare sau încălcarea avertismentelor marcate în manualul produsului, persoanele în cauză poartă răspunderile legale corespunzătoare.

Pe măsură ce Compania continuă să își îmbunătățească și să actualizeze produsele, este necesar să vă conectați în mod regulat pe site-ul său oficial pentru a consulta cele mai actualizate instrucțiuni și condiții de utilizare sau să contactați distribuitorul pentru cel mai recent manual de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui manualul produsului fără notificare.

Compania își rezervă dreptul de interpretare finală





















MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Interpretarea simbolurilor găsite pe etichetă, cutie sau instrucțiuni de produs

Descrierea simbolurilor care au fost tipărite pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare

	Dispozitiv medical. Dispozitiv medical.		Marcajul CE de conformitate. Marcaj CE.
	Producător. Producător.		Data producerii. Data producției.
	Cod produs. Numărul produsului.		Citiți instrucțiunile de utilizare. Citiți instrucțiunile de utilizare.
	Număr de serie. Număr de serie.		Nu utilizați dacă cutia este deteriorată. Nu utilizați dacă pachetul este deteriorat.
	Numărul lotului. Numărul lotului.		Locul cu acest timp. Drept Sus.
	Unic cod de identificare produs. Dispozitiv unic Identificare.		Țineți departe de soare. A se păstra departe de lumina soarelui.
	Păstrați uscat. Păstrați uscat.		Înălțime de stivuire 3 cutii. Înălțimea de stivuire.
	Manipulați cu grijă. Manipulați cu grijă.		Fragilitate. Fragil.
	Utilizați numai pentru Spațiul interior. Numai în ușă.		Aruncarea energiei electrice Accesorii. Deșeurile electrice și Echipamente electronice Directivă.

1. Introducere

Dorim să vă mulțumim pentru că ați ales Scaunul Electric Mobiak SA „ESTIA III”. Manualul de utilizare al produsului este un document important care vă oferă informații despre caracteristicile tehnice, modurile de operare și asistența post-vânzare ale produsului.

- **Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul. Acest manual conține specificațiile, funcțiile și metodele de asamblare ale produsului.**
- **Aflați produsul și exersați înainte de a-l folosi.**
- Acest manual se aplică modelelor noastre: **0811955**.
- Vă rugăm să furnizați acest manual pentru referință atunci când alte persoane vor folosi acest produs.
- Adnotările și ilustrațiile din acest manual pot fi ușor diferite cu părțile reale, datorită îmbunătățirii calității sau modificării designului. Vă rugăm să o verificați cu atenție.
- Produsul pe care îl aveți în mâini poate diferi de cel din fotografiile următoare. Procesul de asamblare este similar.
- Contactați dealerul dumneavoastră dacă există nelămuriri sau întrebări.
- Utilizarea necorespunzătoare a oricărui produs poate duce la vătămări. Utilizarea nesigură vă poate dăuna dumneavoastră și altora.
- Acest produs este conceput pentru a transporta doar 1 persoană.
- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual.
- MOBIK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există un $\pm 3\%$. Abatere pentru dimensiunile produselor.
- Este întotdeauna recomandat să urmați procedurile concepute pentru a face față situațiilor de urgență.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile medicului dumneavoastră.

2. Utilizare prevăzută

Scaunul Elevator Electric „ESTIA III” este destinat persoanelor cu dizabilități, bolnave și în vârstă, precum și persoanelor cu dificultăți de mobilitate sau persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă care au nevoie de asistență suplimentară pentru transfer.

Poate fi folosit pentru a transporta utilizatorul la și de la pat, scaun și/sau toaletă.

Poate fi folosit ca scaun de transport, ca scaun de toaleta și ca scaun de toaleta ridicat.

Scaunul electric „ESTIA III” este potrivit pentru utilizare în interior, iar viteza de transport este ≤3km/h.

3. Introducere de produs

3.1. Caracteristicile și funcțiile produsului

Deschiderea mare 180°. Facilitează transportul utilizatorului. Acest lucru vă permite să mutați utilizatorul foarte confortabil, ridicându-l ușor de pe pat, scaun sau canapea.

Înălțime reglabilă electric. Înălțimea produsului poate fi reglată cu mecanismul electric încorporat, astfel încât acesta poate fi reglat pe orice suprafață fără ca utilizatorul să se ridice de pe acesta. Acest lucru ușurează și însoțitorului deoarece nu necesită mult efort fizic.

Sigur și ușor de utilizat. Roțile cu frână, pârghia de blocare și centura pe spate, mânerul de împingere pliabil, perna scaunului detașabilă și comoda detașabilă fac produsul sigur și ușor de utilizat.

Îmbunătățirea stilului de viață. Ușurința de transport pentru nevoile zilnice ale utilizatorului și comoditatea utilizării toaletei, ajută la creșterea psihologiei utilizatorului.

Confort. Perna de șezut captușită detașabilă oferă confort și vă permite să stați pentru perioade mai lungi de timp. Include o husă de protecție care este ușor de detașat și lavabil.

Sarcina maximă este de 100 kg, potrivit pentru persoane cu diferite tipuri de corp.

Grad IP IP25. Produsul a fost testat și este evaluat ca IP25 (2: Protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12 mm. & 5: Protecție împotriva jeturilor de apă de joasă presiune din orice direcție.).

Oferă performanțe bune de impermeabilitate și poate fi folosit la duș.

Depozitare ușoară. Designul cu partea de șezut detașabilă și baza pliabilă a produsului ajută la depozitarea cu ușurință atunci când nu este nevoie să-l folosești.

3.2. Conținutul pachetului










Pachetul conține cadrul principal x1, partea dreaptă a scaunului x1, partea stângă a scaunului x1, roțile față x1, comoda x1, baza pentru comoda x1, perna de scaun x1, instrucțiunile de utilizare x1, telecomanda x1, încărcătorul cu cablu de alimentare x1 și trusa de scule x1.

3.3 Detalii și structura produsului



Specificații

Numărul de referință al modelului	0811955
Cadru	Aluminiu
Cadru	Pliabil și secțiunea scaunului este detașabilă
Spătar și cotieră Material	ABS
Materialul scaunului	Oțel, sudat în jur cu tuburi de înaltă rezistență
Perna de scaun	Are, Detasabil cu husa lavabila
Roțile din spate	3". Cu frana și 360° capacitatea de rotație
Roțile din față	5", Cu frână
Frână	Pe roțile din față și din spate
Support pentru picioare	Placă de picioare fixă (platformă)
Raza minima	77 cm
Cu sistem de ridicare electric	Sistemul de ridicare electric controlează ridicarea bazei scaunului din partea verticală a cadrului.
Zgomot	≤ 65 dB
Baterie	Litiu 1 buc X 24V X 4 AH (pachetul de baterii este ascuns în tubul inferior)
Durata bateriei	După încărcarea completă, cu o baterie nouă și utilizatorul de 100 kg este estimat pentru ridicare și coborâre de 130 de ori. Durata de viață a bateriei este estimată la 800 de cicluri de încărcare.
Alimentare electrică	IN: 220 V AC, 50 Hz, 30 W / IEȘIRE: 24 V, 2 A
Grad IP	IP25
Încărcare maximă	100 Kg
Greutate netă (fără perna scaunului)	23 Kg

									
0811955	46 cm	40 cm	57 cm	77 cm	87-115 cm	46-76 cm	3"5"	100 kg	23 kg

3.4 Avertismente generale de siguranță (citiți cu atenție)

- Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă.
- Înainte de a utiliza produsul, verificați toate componentele, electrice și non, dacă sunt conectate în siguranță și în siguranță.
- Sub nicio formă NU deconectați, tăiați sau modificați părțile cablurilor instalate sau conectate la produs.
- NU utilizați alte baterii care nu sunt adecvate.
- Înainte de instalare, citiți informațiile pentru acumulator și pentru încărcător.
- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.
- Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați dealerul sau persoana tehnică adecvată înainte de a utiliza produsul, deoarece pot fi cauzate daune.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și NU permiteți copiilor să se joace cu produsul.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare.
- Nu fumați și nu folosiți nicio flacără în apropierea produsului.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrelor și rănirea.
- Nu încercați să ridicați scaunul cu roțile cu ajutorul niciunei părți detașabile.
- Dacă este utilizat pe teren în pantă, toate cele patru roți trebuie blocate.
- Creșteți-vă atenția atunci când utilizați produsul pe covoare, suprafețe umede sau alunecoase.
- Gradul de impermeabilitate al produsului este IP25. Poate fi folosit și la dus. Toate cele patru roți trebuie blocate înainte de a face duș pentru a evita posibilele alunecări. Produsul nu poate fi folosit scufundat în apă. Dacă zona de duș nu se scurge bine și apa se acumulează lângă partea de jos a bateriei, vă rugăm să opriți dușul și mutați imediat produsul într-un loc în care nu există apă.
- Nu încărcați niciodată bateria în timp ce produsul este încă ud, în timpul sau după duș.
- Nu atingeți conectorul de alimentare al încărcătorului cu mâinile ude pentru a evita riscul de electrocutare.
- Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat înainte de încărcare. Nu utilizați încărcătoare deteriorate și contactați distribuitorul local dacă s-a întâmplat acest lucru.
- Nu utilizați produsul pe scări (scări rulante sau nu). Dacă există, nu transportați utilizatorul cu produsul. Când urcă sau coboară scările, operatorul nu trebuie să miște utilizatorul împreună cu produsul.
- În caz de reparație folosiți numai piese de schimb originale. Utilizați întotdeauna piese sau adaptoare aprobate MOBIAK.

În cazul nerespectării cerințelor de mai sus, pot apărea vătămări sau daune neașteptate.

3.5. Instrucțiuni înainte de utilizare și altele.

- Scaunul electric de ridicare „ESTIA III” trebuie folosit numai în interior, pe o suprafață plană, nealunecoasă, pentru a asigura stabilitate.
- Utilizarea trebuie să fie întotdeauna sub supravegherea unui membru al familiei, a asistentei medicale sau a îngrijitorului.
- Când utilizatorul stă sau se ridică în picioare de produs fără asistență, acesta necesită rezistența și mobilitatea corespunzătoare în partea superioară a corpului.
- Asigurați-vă că este asamblat corect, baza este complet extinsă și fixată în acea poziție, scaunul este în siguranță pe poziția sa și containerul, dacă trebuie utilizat, este poziționat corect în soclul corespunzător.
- Rotile sunt bine fixate.
- Nu există fisuri sau rupturi în cadru.
- La reglarea înălțimii scaunului, roata din față trebuie blocată. Operatorul folosește comutatorul electric pentru a controla înălțimea.
- Reglați-vă la înălțimea corespunzătoare și asigurați-vă că cadrul scaunului de pe ambele părți rămâne la același nivel.
- Când utilizatorul stă sau se ridică în picioare de produs, asigurați-vă că roțile sunt blocate.
- Când utilizatorul stă sau se ridică în picioare de produs, utilizatorul nu trebuie să stea pe cadru, deoarece există un risc mare de răsturnare. Utilizatorul trebuie să stea pe sol în timpul acestei proceduri.
- Când utilizați scaunul de ridicare, cu utilizatorul pornit și înainte de a începe transferul, asigurați-vă că pârgă de siguranță pentru spate și centura de siguranță pentru spate sunt blocate.
- În timpul utilizării scaunului, nu ridicați obiecte de pe pământ.
- Când stați în picioare sau în picioare, trebuie să împingeți în jos mânerul, astfel încât scaunul de ridicare cu roțile să rămână staționar și să nu alunece.
- Când stați în picioare sau în picioare, mânerul trebuie aplicată forță verticală, astfel încât Scaunul Lift cu roți să rămână staționar și să nu alunece.
- Când stați în picioare, trebuie să utilizați ambele mâneruri în mod egal. Dacă utilizați o singură mână (și fără un însoțitor), puteți provoca daune sau vătămare.



AVERTIZARE:

Când utilizați scaunul cu roțile cu lift electric, la duș, înainte de a intra în zonă, opriți întotdeauna întrerupătorul central ON/OFF și acoperiți întotdeauna priza de încărcare cu capacul special.




În cazul nerespectării cerințelor de mai sus, pot apărea vătămări sau daune neașteptate.

4. Instrucțiuni de asamblare, încărcare și manipulare.


4.1. Instrucțiuni de asamblare.

1. Scoateți cadrul principal al produsului din cutie, trageți cei doi știfturi $\Phi 8$ „D” de pe părțile corespunzătoare ale bazei, apoi din ambele părți trageți în jos picioarele bazei în poziția corespunzătoare, reintroduceți știfturile în stabilizați-l.

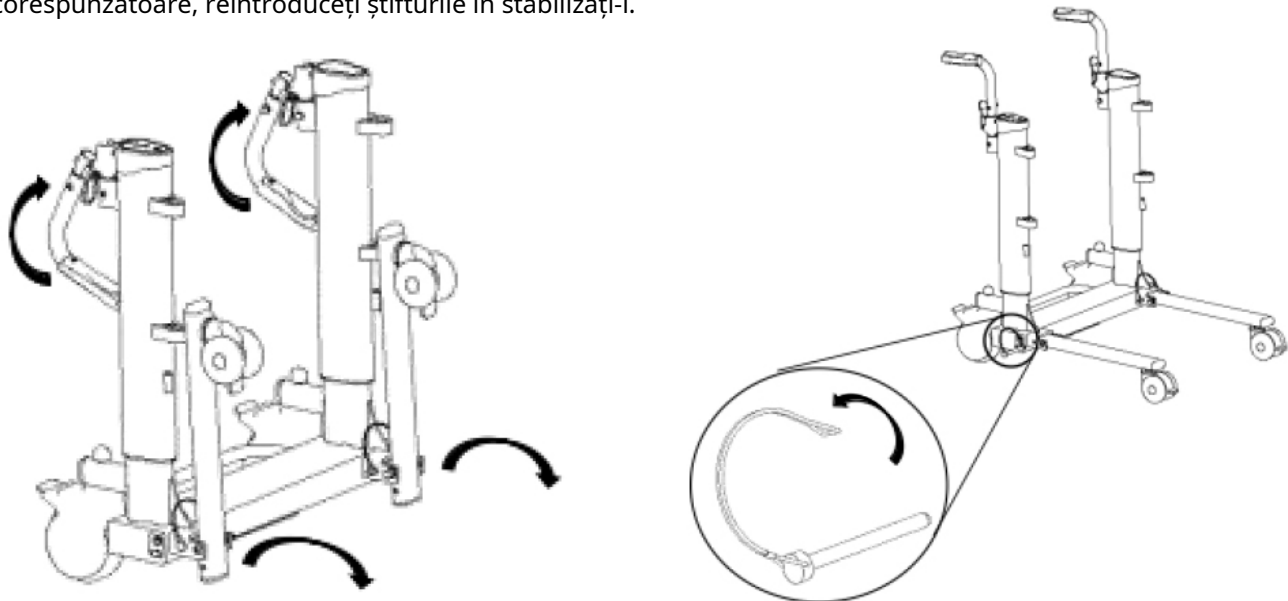



2. Deplasați mânerul din stânga și din dreapta în sus în poziția de utilizare.

3. Așezați secțiunea scaunului din dreapta direct peste fațetele de pe tubul cadru drept. găurile sunt aliniată, așa că trebuie să aliniați și piesa. Apăsați în jos și țineți apăsat știftul de eliberare rapidă din secțiunea dreaptă până când se fixează în poziție. (folosiți aceeași metodă pentru cealaltă parte a scaunului)

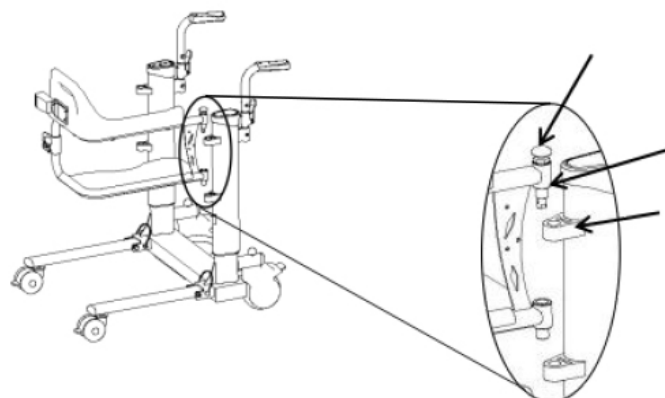

4. După instalare și deparare, cadrul scaunului nu este în mod evident slăbit și poate fi rotit în mod flexibil.


5. Dacă trebuie să utilizați comoda, instalați mai întâi suportul pentru comoda în orificiile de montare ale celor doi montanți, apoi instalați comoda din spate.

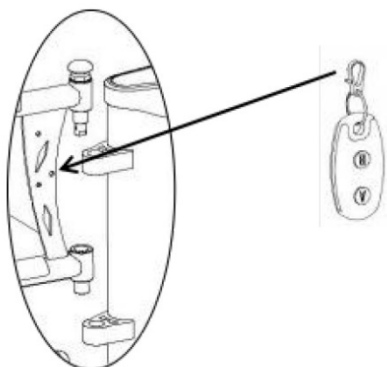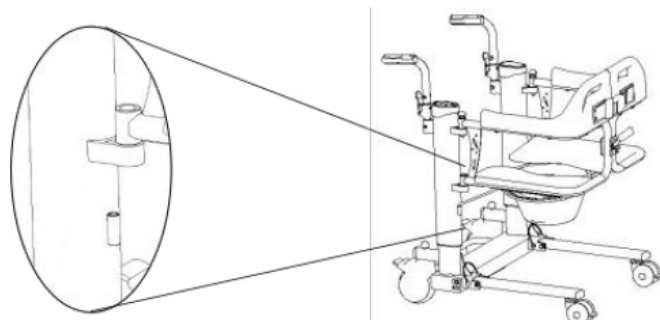

6. Telecomanda fără fir este atârnată de orificiile plăcii laterale ale suporturilor scaunului din stânga sau din dreapta.

4.2. Instrucțiunile de încărcare.

1. Trebuie să utilizați încărcătorul furnizat în pachet pentru a asigura o utilizare în siguranță.
2. Deschideți capacul impermeabil al bazei de încărcare și introduceți mai întâi ștecherul încărcătorului în priza de pe produs și apoi cablul de alimentare, care se află la celălalt capăt al încărcătorului, în ștecherul de alimentare.
3. În timpul procesului de încărcare, indicatorul luminos de pe încărcător este portocaliu, iar când indicatorul luminos devine verde, înseamnă că bateria este complet încărcată. Când este complet încărcat, deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la baza de încărcare și **închideți capacul impermeabil**.
4. Depozitați încărcătorul într-un loc sigur, pentru utilizare ulterioară. Opriti produsul atunci când nu îl utilizați pentru a economisi energie
5. Timpul de încărcare depinde de puterea rămasă în bateria originală și nu este permis să depășească 12 ore. **PENTRU PRIMA UTILIZARE** bateria trebuie încărcată timp de 4-6 ore, astfel încât să fie complet încărcată.
6. Când încărcați produsul și pentru a evita pericolul, produsul trebuie oprit (ledul indicator al comutatorului de alimentare este stins).
7. Durata de viață a bateriei este estimată la 800 de cicluri de încărcare. Când bateria nu mai funcționează, cumpărați o nouă baterie și înlocuiți-o după cum este necesar sau contactați producătorul pentru o înlocuire. Aruncați bateria veche la o unitate de reciclare calificată.

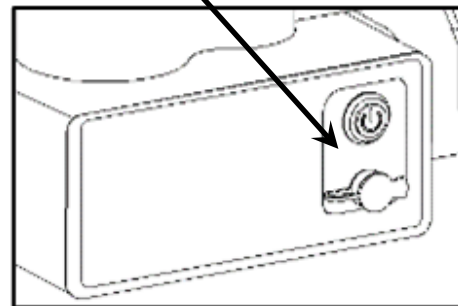

4.3 Sistem de control și instrucțiuni pentru telecomandă

1. Pentru sistemul de control, funcțiile sunt:



Buton comutator, ON/OFF

Buton pentru ridicare

Buton pentru coborâre

Afișaj baterie

2. Pentru controler: butonul A este butonul pentru Ridicare și butonul B este butonul pentru coborâre.
3. Conexiunea dintre controler și telecomandă va fi automată.



Indicator baterie	LightIndicator	Nota
Plin (3 lumini)	Verde, Galben, Roșu, toate luminile aprinse	
2 lumini indicatoare	Galben și Roșu. Verdele este oprit	
1 indicator luminos	Doar roșu. Verde și galben este dezactivat.	Încărcarea este recomandat
Nu utilizați	Roșu se aprinde intermitent și se aude un bip.	Încărcare forțată.

Notă: dacă încărcătorul este introdus în starea ON, luminile roșie, galbenă și verde se vor aprinde secvențial. Când toate cele trei lumini sunt aprinse, încărcarea este completă.

4.4. Instrucțiuni de manipulare.

- Lăsați utilizatorul să stea cu spatele drept, porniți comutatorul de pornire (indicator luminos al comutatorului aprins), operatorul apasă butonul de ridicare sau telecomandă pentru a regla înălțimea scaunului. Reglați înălțimea scaunului astfel încât suprafața inferioară a scaunului să fie puțin mai înaltă decât nivelul utilizatorului.
- Deschideți secțiunea scaunului pe ambele părți și mutați-o în fața utilizatorului, reglați scaunul de ridicare astfel încât centrul de greutate al corpului utilizatorului să fie în centrul cadrului scaunului și reglați din nou înălțimea scaunului astfel încât partea de jos a cadrului scaunului atinge ușor nivelul scaunului utilizatorului.
- Blocați frâna roții din față, ridicați piciorul utilizatorului și așezați-l pe suport pentru picioare. Lăsați utilizatorul să-și rotească corpul ușor la stânga și la dreapta și, în același timp, operatorul rotește partea corespunzătoare a cadrului scaunului (stânga sau dreapta), permițând utilizatorului să stea pe partea din stânga și dreapta a produsului. .
- Când utilizatorul este așezat complet pe scaunul „ESTIA III”, iar părțile din stânga și din dreapta ale scaunului sunt complet închise, operatorul trebuie să blocheze pârghia de blocare și centura de siguranță pe spate.
- Apoi utilizatorul își poate regla postura astfel încât să fie confortabil și să își așeze mâinile pe cotiere.
- Operatorul verifică distanța dintre suprafața inferioară a scaunului său și suprafața pe care s-a așezat înainte utilizatorul, ridică cadrul cu 2-3 cm, eliberează frâna roții din față și îndepărtează încet scaunul de la fața locului folosind mânerul de împingere. .
- Operatorul folosește mânerul de împingere pentru a duce utilizatorul în locul dorit.
- Urmați procedura inversă pentru a transfera utilizatorul de la produs pe un scaun, pat sau canapea.

5. Condiții de depozitare și transport.

- Produsul trebuie depozitat și transportat ambalat în următoarele condiții.
- Interval de temperatură: -20°C ~ 60°C.
- Interval de umiditate relativă: 25% ~ 95%.
- Intervalul de presiune atmosferică ar trebui să fie 86~106 kPa.
- Pentru depozitare, produsul trebuie așezat într-un loc uscat și ventilat și nu trebuie plasat într-un mediu cu temperatură ridicată și schimbări rapide de temperatură. produsul trebuie izolat de substanțele chimice și corozive.
- Pentru transport, manevrați cu grijă.
- La ambalare, înălțimea maximă a stivei este de trei straturi.
- Nu depozitați produsul pe termen lung în locuri care se apropie de surse de temperatură ridicată sau de lumina directă a soarelui.
- Dacă trebuie să o păstrați pentru o perioadă lungă de timp, mai întâi încărcați complet bateria și apoi opriți comutatorul de alimentare.
- Dacă produsul a fost depozitat mai mult de o lună, încărcați complet bateria, apoi utilizați-l sau continuați depozitarea. Adică să verificăm nivelul și starea de sănătate a bateriei în fiecare lună.
- După depozitare pe termen lung, toate bateriile din primul ciclu de încărcare oferă o capacitate mai mică decât capacitatea nominală. Capacitatea maximă poate fi atinsă după mai multe cicluri de încărcare/descărcare, de obicei puțin 3 cicluri.

6. Întreținere

Scopul verificării periodice a produsului, este de a confirma buna funcționare a acestuia ca ajutor și trebuie făcută cel puțin o dată pe lună.

- Verificați starea containerului pentru eventuale rupturi, fisuri sau scurgeri.
- Verificați șuruburile cadrului. Dacă se constată că unele sunt slăbite, vă rugăm să le strângeți.
- Verificați piesele din plastic și cadrul produsului pentru eventuale slăbiri, fisuri sau rupturi.
- Verificați stabilitatea produsului.
- Verificați frânele roților și confirmați funcționarea acestora.
- Verificați starea roților din față și din spate.
- În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb autentice.



AVERTIZARE

În cazul unei probleme cu oricare dintre cele de mai sus, **NU** utilizați produsul până când problema va fi rezolvată.

11. Curățenie

- Utilizatorul sau însoțitorul scaunului rulant este responsabil pentru curățarea, inspecția și întreținerea.
- Pe lângă întreținere și inspecție, se poate efectua o curățare generală a cadrului și a tapițeriei.
- **NU** lăsați produsul ud sau murdar cu praf sau noroi.
- Cadrul trebuie curățat în mod regulat. Vă recomandăm să curățați cadrul și scaunul cu un detergent ușor sau soluție antiseptică. Pentru confortul dumneavoastră, puteți utiliza o sticlă cu pulverizator după adăugarea soluției. Pulverizați produsul și apoi curățați cu un burete. Ștergeți suprafețele uscate cu o cârpă curată.
- Utilizați o cârpă curată și moale pentru a șterge suprafața produsului.
- Catargul de comodă trebuie curățat imediat după utilizare. În primul rând, clătiți cu multă apă caldă. Apoi utilizați o cârpă moale înmuiată într-un detergent blând sau soluție antiseptică. Ștergeți cu o cârpă curată și moale.
- Dacă trebuie să dezinfecțați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.
- **ATENȚIE:** Nu utilizați soluții acide sau caustice.
- Husa de pernă este detașabilă și se poate spăla manual în apă rece.



8. Declarație de protecție a mediului:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.
- 4) Produsele electrice datorate materialelor lor de construcție, dacă nu sunt eliminate corect, pot duce la pericole pentru mediu și pentru sănătate.

9. Raportarea incidentelor:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

10. Declarație de conformitate:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

11. Condiții de garanție:

Produsul este garantat pe o perioadă de doi (2) ani garanție pe cadru și șase (6) luni pe baterie, de la data achiziției.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp, cum ar fi tapițeria, roțile, anvelopa pentru roți, centura de siguranță, suporturile pentru picioare sau frâne.

Daunele sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție.

Niciun service sau piesă de schimb nu este acoperit dacă nu a fost inspectat de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile aflate în garanție sunt plătite de utilizator-client sau de dealer.

Atunci când utilizatorul sau furnizorul aplică la cererea de garanție, furnizați o dovadă validă de cumpărare și formularul de garanție completat, cu o fotografie a numărului de serie al produsului și o fotografie sau un videoclip cu problema care a apărut. În cazul în care utilizatorul nu poate furniza documentele de mai sus, dacă putem confirma că produsul sau piesa este încă în perioada de garanție, este posibil să putem onora cererea utilizatorului de acoperire în garanție, dar nu suntem obligați să facem acest lucru.

Formular de garanție

DETALII CUMPĂRĂTORI:	
NUMELE COMPLET:	
Telefon:	
DATA CUMPĂRĂRII:	
NUMĂR DE FACTURA:	
NUMĂR DE SERIE:	
Lot:	
DETALII DEALER:	
NUMELE COMPLET:	
ADRESA:	
Telefon:	
SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA DEALERULUI	



MOBIAC S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



12. Exonerare de responsabilitate:

Conținutul manualului produsului este proprietatea intelectuală a MOBIAK SA (denumită în continuare „Compania”), iar drepturile de autor sunt rezervate de către Companie. Fără acordul scris al Companiei, nimeni nu poate copia, exporta sau traduce manualul sau orice conținut inclus sub orice formă în alte limbi fără acordul scris al Companiei. Compania alcătuiește cu atenție manualul produsului cu simțul responsabilității față de utilizatori, dar nu garantează integralitatea sau corectitudinea conținutului acestuia. Manualul produsului, ca document pur tehnic, nu include conținut implicit sau conținut cu referire oblică la terți. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele erori de tipar care pot cauza ambiguități. În cazul pierderii directe sau indirecte a informațiilor sau al întreruperii activității din cauza manualului produsului sau a informațiilor despre produs conținute în acesta, Compania nu va fi răspunzătoare.

La utilizarea tuturor produselor MOBIAK SA, utilizatorii trebuie să respecte cu strictețe manualul produsului și instrucțiunile de utilizare disponibile pe site-ul oficial al Companiei (www.mobiakcare.com) pentru manipularea echipamentului și să nu încalce niciun avertisment marcat în manualul produsului la utilizarea echipamentului. În caz de vătămare a utilizatorilor sau a altor persoane, sau daune materiale cauzate de manipularea echipamentului fără respectarea instrucțiunilor de utilizare sau prin încălcarea avertismentelor marcate în manualul produsului, persoanele în cauză își asumă răspunderile legale respective.

Pe măsură ce Compania continuă să își îmbunătățească și să actualizeze produsele, este esențial să vă conectați în mod regulat la site-ul său oficial pentru a consulta cele mai actualizate instrucțiuni și condiții de utilizare sau să contactați distribuitorul pentru cel mai recent manual de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui manualul produsului fără notificare.

Compania își rezervă dreptul de interpretare finală.





















MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Interpretarea simbolurilor găsite pe etichetă, cutie sau instrucțiuni de produs

Descrierea simbolurilor care au fost tipărite pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare

	Dispozitiv medical. Dispozitiv medical.		Marcajul CE de conformitate. Marcaj CE.
	Producător. Producător.		Data producerii. Data producției.
	Cod produs. Numărul produsului.		Citiți instrucțiunile de utilizare. Citiți instrucțiunile de utilizare.
	Număr de serie. Număr de serie.		Nu utilizați dacă cutia este deteriorată. Nu utilizați dacă pachetul este deteriorat.
	Numărul lotului. Numărul lotului.		Locul cu acest timp. Drept Sus.
	Unic cod de identificare produs. Dispozitiv unic Identificare.		Țineți departe de soare. A se păstra departe de lumina soarelui.
	Păstrați uscat. Păstrați uscat.		Înălțime de stivuire 3 cutii. Înălțimea de stivuire.
	Manipulați cu grijă. Manipulați cu grijă.		Fragilitate. Fragil.
	Utilizați numai pentru Spațiul interior. Numai în ușă.		Aruncarea energiei electrice Accesorii. Deșeurile electrice și Echipamente electronice Directivă.