



Οδηγίες Χρήσης/ Manual de utilizare

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ "JOY" / STAND-UP WELCHELTHE "JOY"

REF 0805725



Prefață

Dragi clienti:

Vă mulțumim că ați ales Scaunul Rotile STAND-UP „JOY” sub MOBIAK SA *Manual de produs* este un document important, care oferă informații despre produsul robot, metode de operare și informații despre serviciul post-vânzare. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție *Manual de produs* pentru funcționarea și întreținerea corectă. Având în vedere importanța acestui manual, vă rugăm să păstrați în mod corespunzător *Manual de produs* într-un loc accesibil în mod regulat.

Manualul prezintă produsele robot și toate funcțiile. Este posibil ca funcțiile descrise să nu fie disponibile pe acest produs și să fie disponibile numai pe unele modele. Vă rugăm să consultați documentul de vânzare (contract de cumpărare sau lista de expediere) pentru informațiile de configurare a acestui produs și să inspectați produsul real și vă rugăm să contactați dealerul MOBIAK sau personalul oficial de service pentru clienți pentru detalii.

Toate datele din Manual sunt supuse stării de informare la momentul finalizării. Pentru a satisface nevoile clienților și a se conforma cu cerințele de reglementare, Compania va continua să optimizeze și să îmbunătățească configurația și performanța produselor noastre. Prin urmare, pot exista abateri între produs și instrucțiunile din manual. Toate datele, ilustrațiile sau explicațiile nu pot fi folosite ca bază pentru nicio revendicare.

-Dacă nu se specifică altfel, direcțiile precum față, spate, stânga, dreapta, sus și jos se referă de obicei la direcțiile corespunzătoare atunci când stați cu fața la panoul de control de pe pedala produsului și țineți cotiera cu ambele mâini.

-Ilustrațiile sunt folosite pentru a facilita înțelegerea și pot fi considerate și diagrame schematice, care pot diferi de produsul real.

Cuprins

I. Măsuri de siguranță	4
1.1 Descrierea simbolului	4
1.2 Persoane potrivite pentru utilizarea acestui produs	4
1.3 Persoane nepotrivite pentru utilizarea acestui produs	5
1.4 Măsuri de siguranță electrică	5
1.5 Precauții pentru mediul de depozitare	5
1.6 Notă de utilizare	6
II. Introducerea produsului	7
2.1 Corpul dispozitivului	8
2.1.1 Modul de susținere a corpului superior	9
2.1.2 Modulul brațului oscilant	9
2.1.3 Modulul superior	10
2.1.4 Modulul șasiu	11
2.1.5 Modulul de protecție pentru picioare	12
2.1.6 Modulul scaun	12
2.1.7 Modul de reglare a ridicării pedalei	13
2.2 Accesorii opționale	13
2.3 Purtarea echipamentului	13
2.4 Aplicația mobilă	14
III. Parametri tehnici	15
3.1 Parametrii de dimensiune	15
3.2 Parametri de performanță	16
IV. Instrucțiuni de utilizare	17
4.1 Pregătirea înainte de utilizare	17
4.1.1 Declarație de utilizare	17
4.1.2 Descrierea funcției panoului de control	17
4.2 Reglarea ergonomică	18
4.2.1 Reglarea înălțimii platformei pedalei	18
4.2.2 Reglarea înălțimii modulului superior	19
4.2.3 Reglarea protecției picioarelor	20
4.2.4 Reglarea lungimii modulului brațului oscilant	21
4.2.5 Reglarea pernei de susținere a corpului superior	22
4.4 Instrucțiuni de utilizare	22
4.4.1 Operațiunea de îmbarcare	22
4.4.2 Operarea de conducere a robotului	23
4.4.3 Comutator de postură corporală	23
4.4.4 Decuplarea de la robot	24
4.4.5 Încărcarea bateriei	24
4.4.6 Utilizarea modului de blocare pentru copii	24
4.5 Instrucțiuni de operare ale APP	25
4.5.1 Abordarea conectării	25
4.5.2 Scanați codul QR pentru a vă conecta	27
4.5.3 Căutare pentru a vă conecta	29
4.5.4 Telecomandă	30
4.5.5 Setări generale	32
4.5.6 Actualizarea dispozitivului	33
4.6 Descrierea scenariului de utilizare	34
4.6.1 Antrenamentul pasiv de genuflexiuni	34
4.6.2 Descrierea utilizării în scenariul exterior	35
4.7 Descrierea avertismentelor de siguranță	36
V. Descrierea serviciului produs	38
5.2 Formular de garanție	38
5.3 Garanția de service	39
5.4 Conținutul a trei garanții	39
5.4.2 Reglementări pentru trei garanții	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
5.4.3 Perioada de garanție pentru piesele de uzură	40
5.5 Achiziția de servicii	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
VI. Întreținere zilnică	42
VII. Exonerare de răspundere	43

I. Măsurile de siguranță

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție „măsurile de siguranță” și să utilizați corect acest produs în conformitate cu instrucțiunile din Manual.


Măsurile de precauție descrise aici vor fi utile pentru utilizarea corectă a acestui produs.

Pentru a indica în mod explicit gradul de vătămare și deteriorare, posibilele daune din cauza utilizării greșite sunt împărțite în „Avertisment” și „Atenție”. Deoarece ambele sunt importante pentru siguranță, asigurați-vă că urmați manualul.

1.1 Descrierea simbolului



■ Conținutul textului cu acest simbol înseamnă că, în caz de neglijare, pot exista vătămări grave.

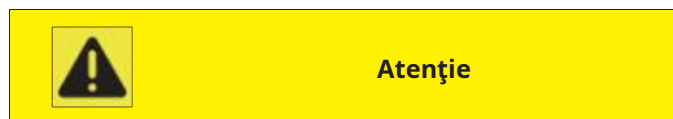

■ Conținutul textului cu acest simbol înseamnă că, în caz de neglijare, pot exista vătămări ușoare sau moderate sau daune materiale.



■ Conținutul textului cu acest simbol înseamnă că, vă rugăm să consultați conținutul casetei „Sfaturi” din acea secțiune.


1.2 Persoane potrivite pentru utilizarea acestui produs

Persoanele cu o gamă de înălțime de 1,1 m până la 1,5 m și o gamă de greutate de la 20 kg până la 60 kg, care au disfuncții motorii ale membrelor inferioare și nu pot să stea în picioare sau să meargă singure și se află în stadiile de recuperare și sechele, inclusiv, dar fără a se limita la:

■ Pacienți cu disfuncții motorii și senzoriale datorate leziunilor sistemului nervos central, precum: pacienți cu accident vascular cerebral, traumatisme cerebrale, leziuni ale măduvei spinării, poliomielită, paralizie cerebrală etc.;

■ Pacienți cu atrofie musculară spinală (SMA), distrofie musculară (congenitală, DMD, DMO, tip limb-gindle) și miastenia gravis (MG).

■ Persoane care au nevoie să se deplaseze pe distanțe scurte, dar care nu pot sau nu se pot deplasa singure.

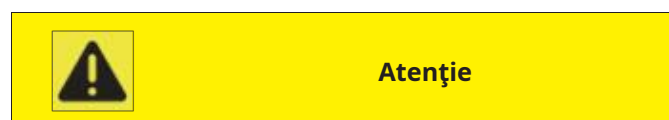


■ Pentru prima utilizare, persoanele trebuie instruite de către profesioniști, iar utilizatorii pot evalua sau consulta profesioniști relevanți în funcție de situația lor reală.

■ Copiii cu vârsta sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un tutore sau de un membru al familiei înainte de utilizare.


1.3 Persoane nepotrivite pentru utilizarea acestui produs Acest

produs nu este potrivit pentru următoarele persoane:

**Avertizare**

- Persoanele care au hipotensiune arterială ortostatică și au nevoie să se odihnească în liniște;
- Persoanele cu fracturi și luxații nevindecate, deformări articulare severe, scolioză severă, osteoporoză severă ($T < -2,0$) și diferențe de lungime a picioarelor care depășesc 2 cm;
- Persoanele al căror tonus muscular al membrelor inferioare este prea ridicat pentru a-și îndrepta picioarele;
- Persoane cu dizabilități intelectuale, deficiențe cognitive, deficiențe de vedere, deficiențe de auz și alte riscuri operaționale potențiale în timpul funcționării.


1.4 Măsurile de siguranță electrică

**Atenție**

- Produsul nu este impermeabil. Vă rugăm să evitați să vă umeziți sau să stropiți cu lichide în panoul de control sau în interiorul carcasei pentru a preveni defecțiunile.
- Nu utilizați sursa de alimentare peste tensiunea nominală pentru a evita incendiul sau deteriorarea produsului.
- Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare și nu atingeți încărcătorul cu mâinile ude în timpul încărcării pentru a evita șocurile electrice.
- Când încărcați, vă rugăm să conectați mai întâi priza de alimentare și apoi ștecherul corpului pentru a evita deteriorarea produsului.
- Nu încărcați în timpul întreruperilor de curent sau în timpul furtunii și deconectați ștecherul încărcătorului de la priză.
- Nu deteriorați, nu îndoiiți excesiv, nu trageți, răsuciți sau legați cablul de alimentare.
- Nu dezasamblați și înlocuiți cablul de alimentare deteriorat fără autorizație.

Contactați distribuitorul sau personalul de service pentru clienți MOBIAK pentru manipulare.

1.5 Precauții pentru mediul de depozitare

**Atenție**

- Nu depozitați acest produs într-un mediu peste 40°C sau sub 0°C. Nivelul bateriei ar trebui să fie peste 80%. Se recomandă păstrarea acestui produs la o temperatură de 15°C~25°C pentru utilizare pe termen lung.
- Vă rugăm să utilizați produsul pe un teren plat sau acces fără bariere. Nu utilizați produsul în medii rutiere speciale, cum ar fi noroi, nisip și iarbă etc.
- Nu depozitați produsul într-un loc apropiat de o sursă de temperatură ridicată sau de lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Dacă produsul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcați produsul complet și să opriți întrerupătorul de alimentare înainte de depozitare.
- Pentru depozitare pe termen lung, depozitați produsul într-un loc plat, stabil, bine ventilat, uscat și răcoros și acoperiți-l cu o cârpă impermeabilă.
- Dacă produsul este depozitat mai mult de o lună, vă rugăm să încărcați produsul complet, apoi continuați depozitarea și utilizarea.

1.6 Notă de utilizare



Atenție

■ Acest produs poate servi doar un utilizator la un moment dat. Nu îl utilizați de doi sau mai mulți utilizatori împreună.

■ Nu introduceți degetele sau alte obiecte în golurile dintre brațele mobile ale produsului, dintre brațele pivotante și cotiere sau între brațele pivotante și arcurile cu gaz pentru a evita rănirea sau funcționarea defectuoasă.

■ Nu dezasamblați componentele interne ale produsului fără autorizație pentru a evita defecțiunile.

■ Cu excepția personalului tehnic desemnat de Companie, este strict interzisă dezasamblarea, repararea și modificarea produsului. În cazul oricăror probleme, vă rugăm să contactați dealerul și personalul de service pentru clienți MOBIAK în timp util.

II. Introducere de produs

Acest produs este un robot mobil inteligent asistat dezvoltat independent de MOBIK SA. Poate oferi asistență de viață și suport de reabilitare pentru persoanele cu disfuncții motorii ale membrilor inferioare, inclusiv mișcare în picioare, autoîngrijire parțială, exerciții ghemuit etc. Produsul include în principal corpul dispozitivului și APP mobilă.


Corpul dispozitivului este suportul pentru realizarea funcțiilor produsului robot, cu multiple structuri reglabile pentru a se adapta utilizatorilor de diferite înălțimi și greutateți.

Aplicația mobilă poate fi utilizată pentru controlul de la distanță al robotului, monitorizarea în timp real a stării de utilizare și ajustarea parametrilor și setările pentru diferite module de control electronic.



2.1 Corpul dispozitivului

Corpul dispozitivului poate fi împărțit în următoarele module majore în funcție de modul: modul de susținere a corpului superior, modul de braț oscilant, modul de cotieră, modul superior, modul de șasiu, modul de protecție pentru picioare și modul de scaun.

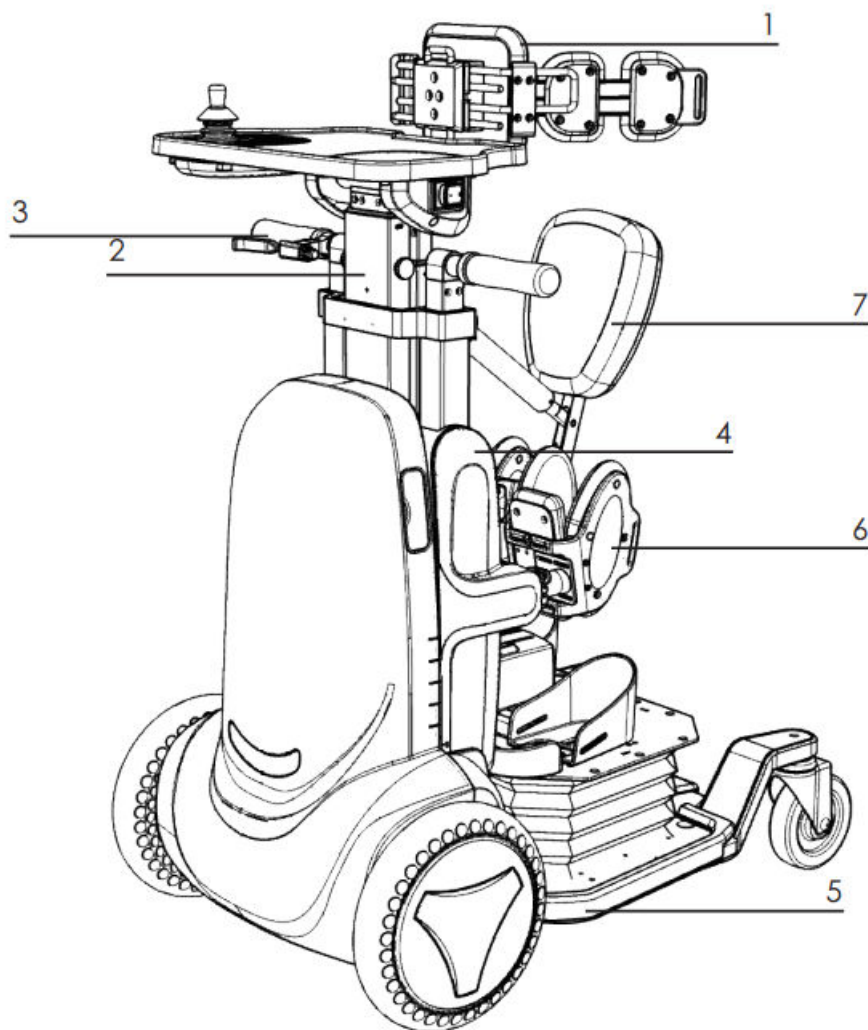


1 - Modulul de susținere a corpului superior 2 - Modulul brațului oscilant 3 - Modulul cotieră 4 - Modulul superior 5 - Modulul șasiu 6 - Modulul protecție picioare 7 - Modulul scaunului

2.1.1 Modul de susținere a corpului superior

Modulul de susținere a corpului superior este situat în partea de sus a robotului și este conectat la modulul brațului oscilant pentru a sprijini talia și abdomenul utilizatorului, împiedicând partea superioară a corpului utilizatorului să se aplece înainte. Modulul de susținere a corpului superior are un panou de control electric pentru a controla funcționarea și funcționalitatea produsului.

Pentru a îmbunătăți confortul și adaptabilitatea utilizatorului, modulul de susținere a corpului superior este echipat cu perne în contact cu oamenii, împărțite în două părți: pernă de susținere frontală a corpului superior și pernă de susținere laterală a corpului superior. Printre acestea, pernă de susținere frontală a corpului superior este folosită pentru a fixa poziția pieptului utilizatorului, care poate fi reglată în față, spate și înălțime prin instrumente de reglare. Perna de susținere a părții superioare a corpului este folosită pentru a fixa poziția părții taliei, care poate fi reglată în lățime la stânga și la dreapta prin instrumente de reglare. În plus, există și un dispozitiv portabil opțional pentru fixarea poziției spatelui utilizatorului.

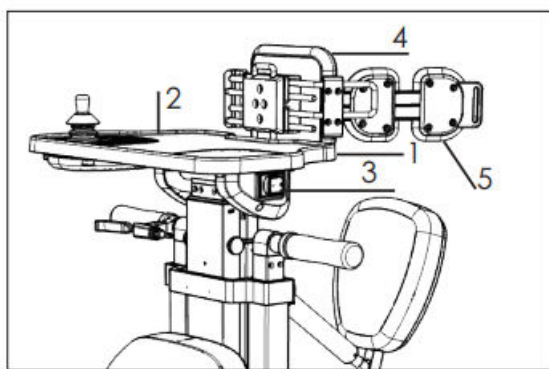

1 - Panou pentru

masă 2 - Panou


3 - Comutator de alimentare

4 - Pernă de susținere față a corpului superior 5 -

Pernă de susținere a părții superioare a corpului

2.1.2 Modul braț oscilant

Modulul brațului oscilant este conectat la modulul de susținere a corpului superior și la modulul superior. Brațul oscilant poate fi blocat în orice poziție din intervalul de balansare și este controlat de un motor pentru a se balansa în sus și în jos pentru a ajuta utilizatorul să stea în picioare și să stea așezat. În plus, brațul oscilant poate fi blocat și după pană de curent.

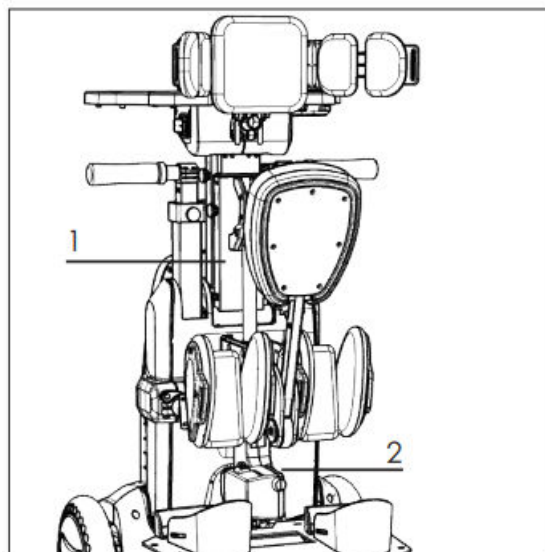


1 - Braț oscilant

2 - Motor cu braț oscilant

2.1.3 Modul superior




Modulul superior este conectat la cotiere, brațe mobile, șasiu și protecții pentru picioare, iar înălțimea acestuia poate fi ajustată pentru a se potrivi utilizatorilor în intervalul de înălțime specificat.

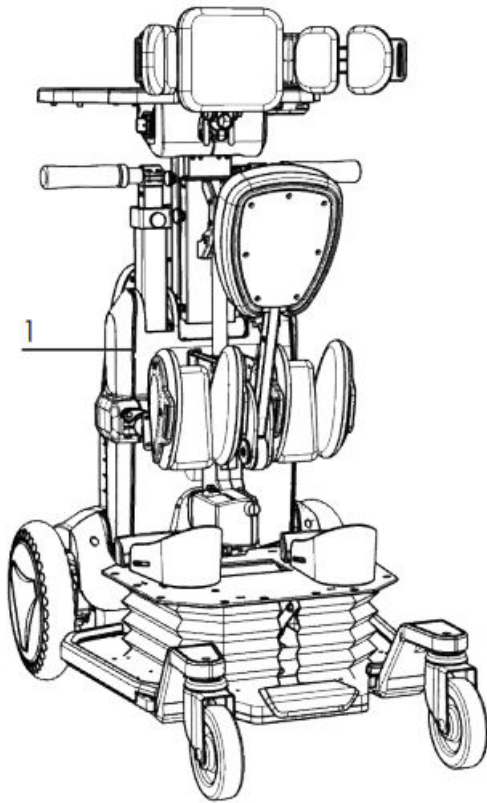

1 - Modul superior

2.1.4 Modulul șasiu

Șasiul este conectat la modulul superior și modulul de ridicare a pedalei, care este suportul pentru fiecare componentă a modului, inclusiv modulul roții din față a șasiului, lumina LED, roata din spate, comutatorul de blocare a motorului butucului, comutatorul de reglare a modulului superior etc.

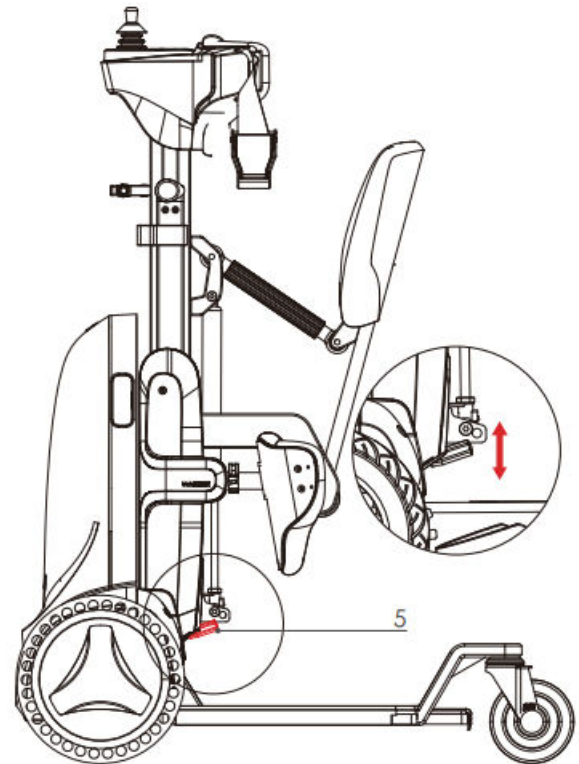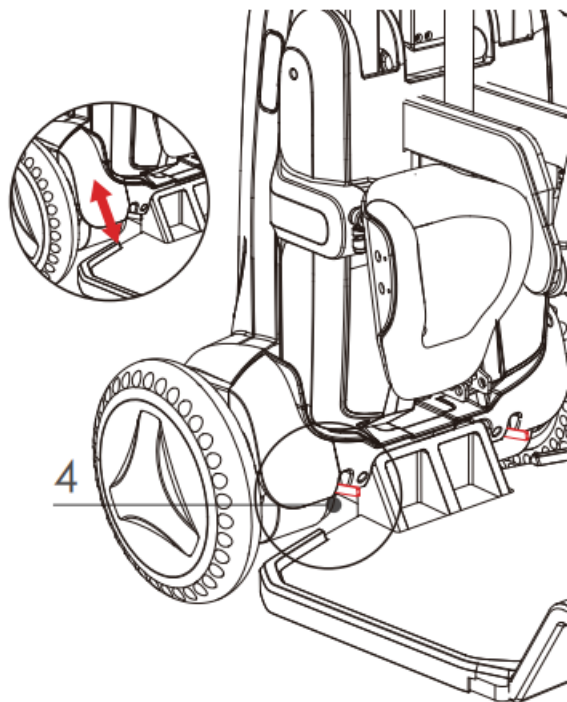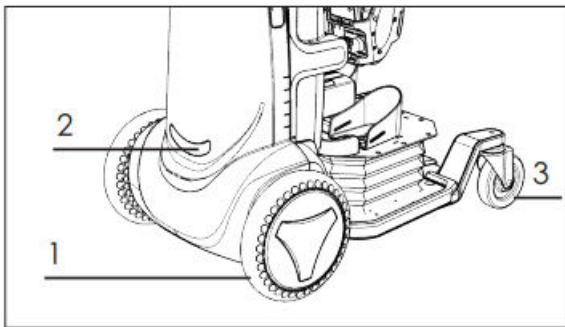

1 - Modul roată față șasiu 2 -

Lumină LED

3 - Roata din spate


4 - Comutator de blocare a motorului butucului (trageți în sus pentru a debloca)

5 - Comutator de reglare a modulului superior (trageți în sus pentru a debloca)

2.1.5 Modul de protecție pentru picioare

Modulul de protecție pentru picioare este utilizat în principal pentru a susține picioarele inferioare ale utilizatorului, care sunt una dintre principalele poziții de stres în timpul stării în picioare. Există perne în locurile în care modulul de protecție pentru picioare intră în contact cu oamenii pentru a îmbunătăți confortul utilizatorului. Pentru a se adapta utilizatorilor de diferite tipuri de corp, poziția pernei de protecție pentru picioare în raport cu modulul șasiului poate fi ajustată în direcțiile față, spate, stânga, dreapta și sus și jos.

Modulul de protecție pentru picioare poate fi, de asemenea, ajustat în lățime în funcție de adaptabilitatea diferiților utilizatori pentru a oferi o protecție și o fixare mai bună.

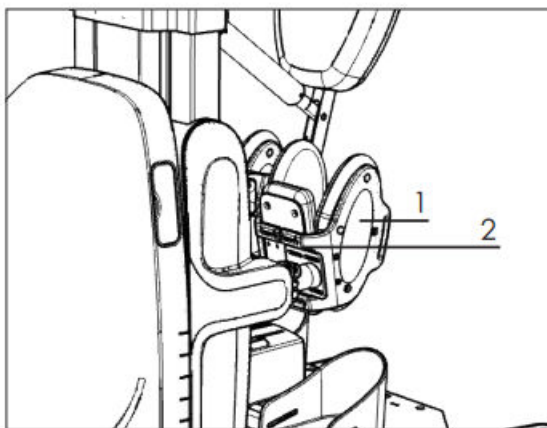


1 - Modul de protecție pentru picioare

2 - Modulul de reglare a protecției picioarelor

3 - Modulul de reglare a lățimii protecției picioarelor

2.1.6 Modul scaun

Modulul scaunului oferă în principal suport pentru fesele utilizatorului pe parcursul întregului proces, de la șezut până în picioare, și există perne în zonele în care modulul de scaun intră în contact cu oamenii pentru a îmbunătăți confortul de călătorie. Pentru a se adapta utilizatorilor de diferite tipuri de corp, distanța dintre scaun și protecția pentru piept poate fi ajustată prin legătura de reglare a scaunului.

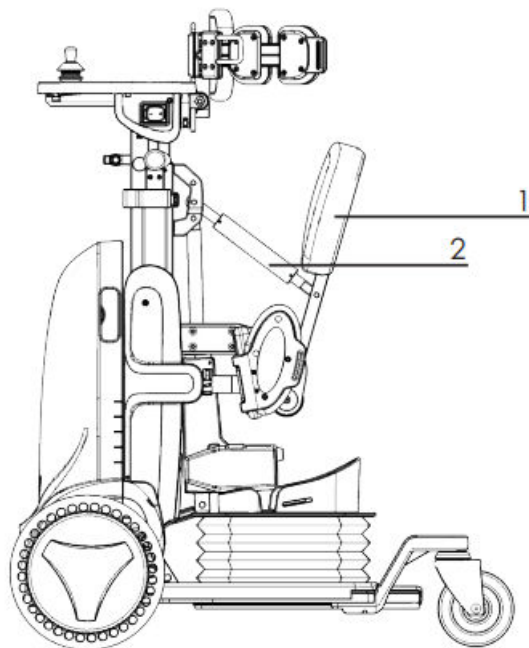


1 - Modul scaun

2 - Biela de reglare a scaunului

2.1.7 Modul de reglare a ridicării pedalei

Pentru a se adapta la înălțimea diferiților utilizatori și la modificările înălțimii acestora, este configurat un modul de reglare a ridicării pedalei; un comutator de reglare este setat în spate, iar înălțimea pedalei poate fi reglată cu instrumentele de reglare. Pe platforma de ridicare a pedalei este instalată o pedală, care este fixată de platformă folosind banda Magic. Utilizatorii pot ajusta dimensiunea și poziția de fixare a pedalei în funcție de propriile nevoi.

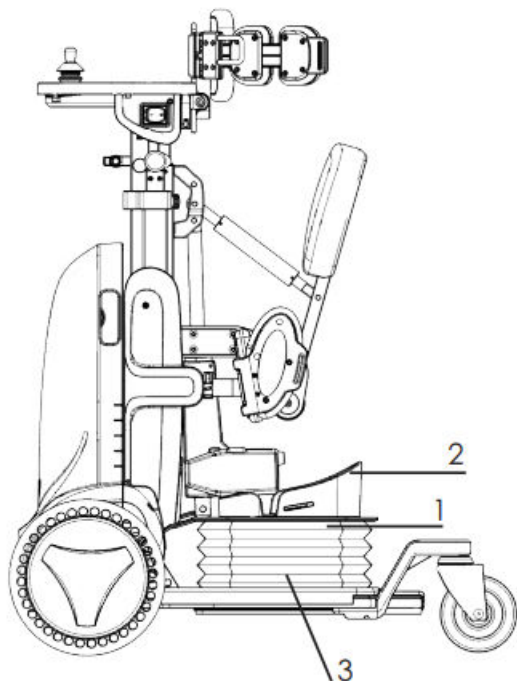

1 - Modul de reglare a ridicării pedalei 2 -

Comutator de reglare

3 - Pedale

2.2 Accesorii opționale

Utilizatorii pot întreba personalul serviciului pentru clienți MOBIK despre următoarele accesorii opționale și pot obține informații despre preț în funcție de propriile nevoi la achiziționarea produsului.

2.3 Purtarea echipamentului

Purtarea echipamentului este un accesoriu opțional utilizat pentru a oferi un sprijin fix pentru talie în timpul șederii și mersului utilizatorului.



Sfaturi

■ Purtarea echipamentului este un accesoriu opțional, iar utilizatorii cu rezistență puternică a corpului superior pot alege să nu îl poarte. Utilizatorii îl pot purta în funcție de propriile nevoi sau pot consulta personalul relevant!

2.4 Aplicația mobilă

Prin Bluetooth, aplicația mobilă poate fi conectată la robot.


În prezent, aplicația mobilă este potrivită pentru sistemele Android și ios, incluzând în principal următoarele funcții:

1. Efectuați controlul de la distanță al robotului.
2. Oferiți feedback cu privire la starea de utilizare a diferitelor funcții ale robotului.
3. Reglați și setați parametrii fiecărui modul de control electronic.
4. Efectuați actualizarea de la distanță a software-ului robotului.

III. Parametrii tehnici

3.1 Parametrii de dimensiune

Robotul are funcție de reglare a înălțimii, iar parametrii specifici de dimensiune sunt următorii:

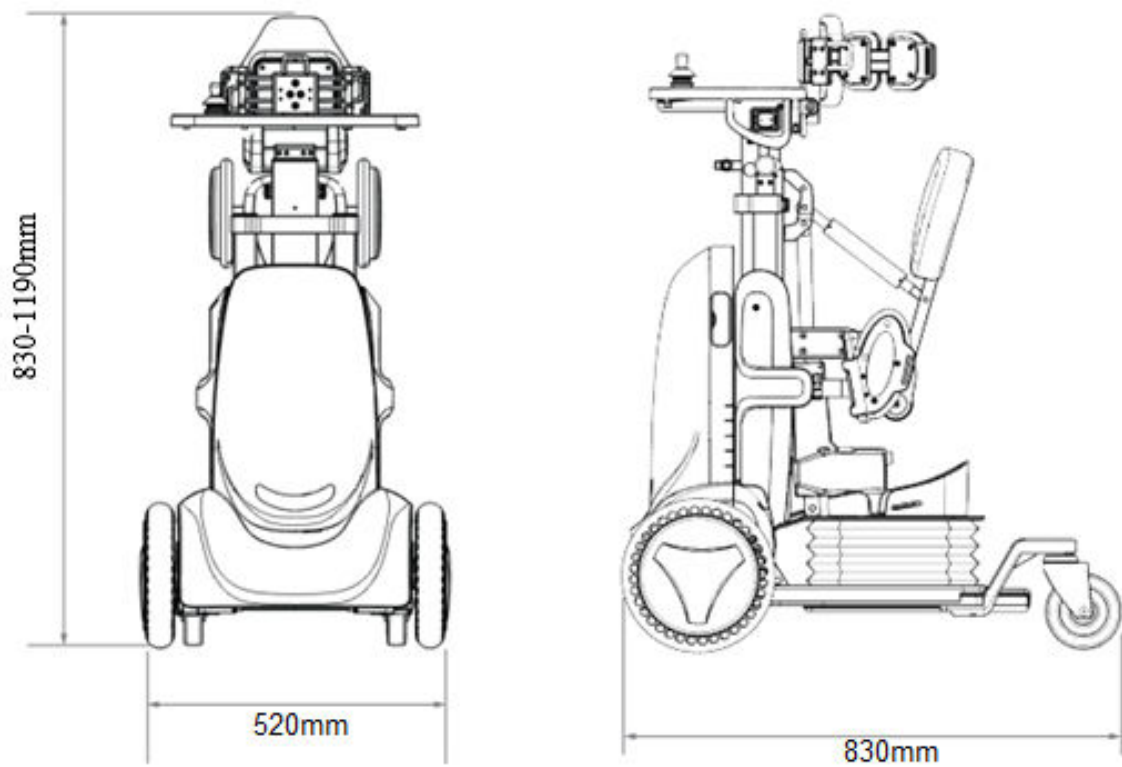

3.2 Parametri de performanță

Categoria articolului	Parametrii articolului
Viteza de conducere	≤4,5Km/h
Kilometraj de anduranță	Conduceți cu o viteză constantă de 15 km pe o suprafață plană a drumului într-un mediu de 25°C
Panta de conducere	5°
Înălțimea de trecere a obstacolelor	≤40mm
Lățimea de trecere a șanțului	≤50mm
Gama de înălțime	1,1 m-1,5 m
Gama de greutate	20 kg-60 kg
Raza minima de viraj	0,63 m
Greutatea corporală a dispozitivului	90 kg ± 3 kg
Sarcina maxima	60 kg
Bluetooth	2,4 GHz, 1 mW
Putere de intrare robot	DC29.4V4A
Intrare de putere a încărcătorului	AC220V

IV. Instrucțiuni de utilizare

4.1 Pregătirea înainte de utilizare

4.1.1 Declarație de utilizare

Înainte de a utiliza robotul (instalare, operare, întreținere și inspecție etc.):


Vă rugăm să citiți cu atenție *Manual de produs* atașat la produs, stăpâniți toate cunoștințele despre dispozitiv, cunoștințele privind siguranța și măsurile de precauție pentru o utilizare adecvată.

Pentru a explica detaliile, ilustrațiile din *Manual de produs* descrie uneori carcasa ascunsă și capacul de protecție. În timpul utilizării acestui produs, nu îndepărtați carcasa sau capacul de protecție, altfel va afecta serviciul de garanție. Vă rugăm să utilizați produsul în strictă conformitate cu *Manual de produs*.

Dacă informațiile sunt deteriorate sau pierdute și trebuie recomandate, vă rugăm să contactați distribuitorul sau personalul de service pentru clienți MOBIK.

4.1.2 Descrierea funcției panoului de control

Panoul de control este situat direct deasupra protecției pieptului și include un indicator luminos de stare, butoane funcționale, basculant și comutator principal de alimentare, așa cum se arată în următoarea figură:

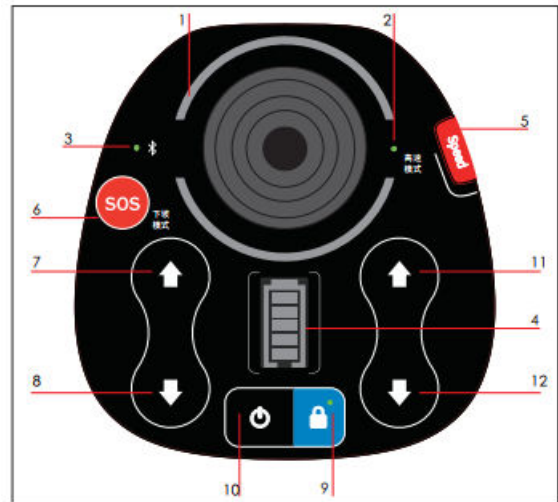

01 - Indicator luminos circular de stare

- ◆o. Verde pentru modul de conducere
- ◆b. Albastru pentru modul de blocare
- ◆c. Intermitent alternativ negru și albastru pentru modul de împingere
- ◆d. Roșu pentru balansier anormal

02 - Indicator luminos de viteză

- ◆o. Pornit pentru viteză mare
- ◆b. Oprit pentru viteză mică

03 - Indicator luminos al conexiunii Bluetooth


- ◆o. Clipește pentru deconectarea Bluetooth
- ◆b. În mod normal aprins pentru conectarea Bluetooth

Indicator luminos de alimentare a bateriei

- ◆ Fiecare grilă corespunde unei puteri de 20% a bateriei, iar bateria va clipi în timpul încărcării.

05 - Buton de viteză

- ◆ Comutați între viteză mare și viteză mică;

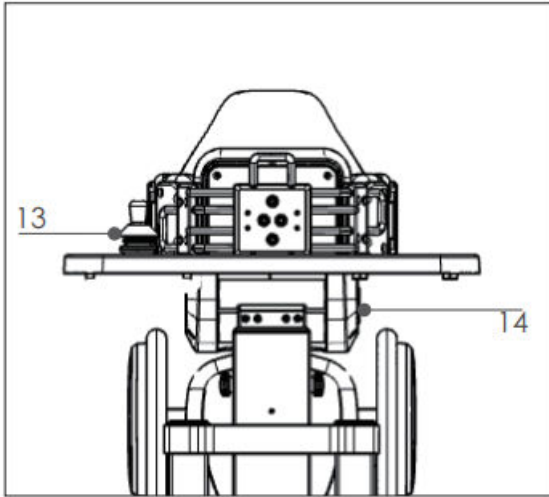

06 - Buton pentru modul Downhill

◆ Țineți apăsat scurt pentru a intra sau a ieși din modul de coborâre;

◆ Funcția SOS este o funcție opțională. După selecție, apăsați și mențineți apăsat pentru 3S pentru a intra în modul SOS;

07 - Controlați brațul oscilant pentru a se deplasa în sus 08 -

Controlați brațul oscilant pentru a se deplasa în jos 09 - Buton

de blocare

◆ Permiteți robotului să intre în modul de blocare și să blocheze funcția de telecomandă;

10 - Buton de comutare

◆ Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 s pentru a porni sau în așteptare robotul; 11

- Cheie de dezactivare a blocării pentru copii

◆ Apăsați și mențineți apăstate butoanele 11 și 05 simultan timp de cel puțin 3S pentru a dezactiva modul de blocare pentru copii;

12 - Cheie de activare blocare pentru copii

◆ Apăsați și mențineți apăstate butoanele 12 și 05 simultan timp de cel puțin 3S pentru a activa modul de blocare pentru copii. În modul de blocare pentru copii, butoanele și balansoarul nu reușesc să prevină operarea accidentală de către copii;

13 - Rocker

◆ Direcția de conducere a robotului poate fi controlată prin tragerea balansierului;

14 - Comutator de alimentare

◆ Întrerupătorul principal de alimentare al robotului poate fi folosit pentru frânare de urgență și repornire în caz de defecțiune;

4.2 Reglare ergonomică

Reglarea înainte de utilizare a robotului include reglarea modulară a întregului dispozitiv.

Reglare modulară a întregului dispozitiv

Reglarea modulară a întregului dispozitiv adoptă un design ergonomic, făcând robotul potrivit pentru utilizatori de diferite înălțimi și greutateți. Reglarea modulului include:

1 - Reglarea înălțimii platformei pedalei 2 -

Reglarea înălțimii modulului superior 3 -

Reglarea protecției picioarelor

4 - Reglarea lungimii modulului brațului oscilant 5 -

Reglarea pernei de susținere a corpului superior

4.2.1 Reglarea înălțimii platformei pedalei

Platforma pedalei este conectată la șasiu, iar utilizatorii pot regla manual înălțimea pedalei pentru a se adapta la diferite înălțimi.

Standard de ajustare:

Cu cât înălțimea este mai mare, cu atât va fi mai mică înălțimea platformei pedalei. Utilizatorii ar trebui să se refere la *Tabel de comparație pentru reglarea platformei pedalei*. Când înălțimea este mai mare de 145 cm, utilizatorul poate alege să scoată platforma pedalei.


Tabel de comparație pentru tabelul de reglare a platformei pedalei	
Înălțime/cm	Înălțimea platformei de ridicare
110-120	14-11 cm
120-130	11-8 cm
130-140	8-5 cm
140-145	5-4 cm

4.2.2 Reglarea înălțimii modului superior


Modul superior este conectat la braț◆coșuri, brațe mobile și șasiu; Utilizatorii pot regla manual înălțimea modului superior pentru a se adapta la diferite lungimi de picioare inferioare.

◆ Standard de ajustare

Utilizatorii ar trebui să se refere la *Tabel de comparație pentru reglarea cadrului superior* pentru ajustare.

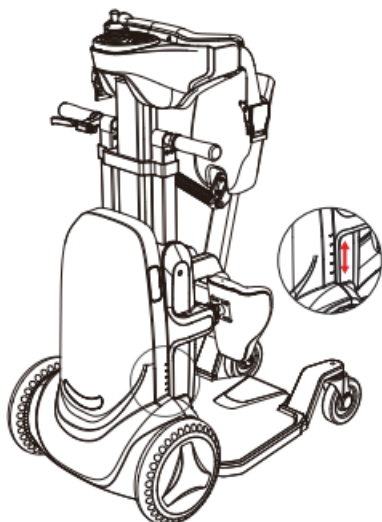

◆ Etape de ajustare

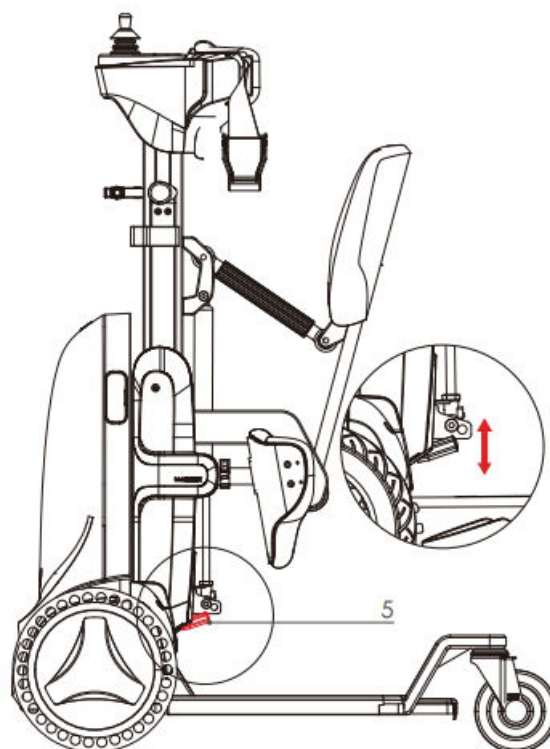


Sfaturi

Tabel de comparație pentru reglarea cadrului superior

Înălțime/cm	Linia de scară
110-150	0 grila
150-155	0~1 grilă
155-165	1~2 grile
165-175	2~3 grile
175-185	3~4 grile
185-190	4~5 grile

■ Liniile de scară din tabelul de comparație sunt valori de referință, iar utilizatorii le pot ajusta în mod corespunzător în funcție de situațiile reale.

◆ Etape de ajustare

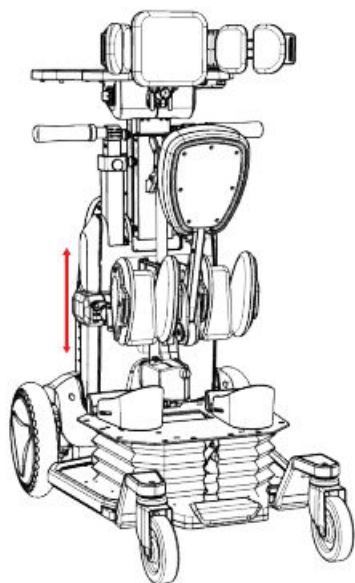

1. Ridicați cheia de reglare superioară în sus și mențineți starea de ridicare;
2. Țineți mânerul și ridicați sau apăsați în jos modulul superior pentru a-l regla în poziția dorită;
3. Eliberați cheia de reglare. În acest moment, cheia de reglare se va reseta automat în jos, iar înălțimea modulului superior va fi blocată automat.



Atenție

■ După reglarea cadrului superior, trebuie să se asigure că marginea superioară a genunchiului se află sub rotula genunchiului.

4.2.3 Reglarea protecției picioarelor

Lățimea, lungimea extensiei și unghiul protectorului pentru picioare pot fi ajustate pentru a satisface nevoile utilizatorului.

Reglarea lățimii protecției picioarelor

◆ Standard de ajustare

Tabel de comparație pentru reglarea protecției cu un singur picior:


Tabel de comparație pentru reglarea lățimii protectorului cu un singur picior	
Lățimea articulației genunchiului/cm	Poziția liniei la scară
6-7 cm	Scara 1
7-8 cm	Scara 2
8-9 cm	Scara 3
9-10 cm	Scara 4
10-12 cm	Scara 5

Tabel de comparație pentru reglarea dispozitivelor de protecție cu două picioare:

Tabel de comparație pentru reglarea piciorului dublu Protectori	
Distanța dintre genunchi în postura în picioare/cm	Poziția liniei la scară
15,5-18,5 cm	Scara 1
18,5-21,5 cm	Scara 2
21,5-24,5 cm	Scara 3
24,5-27,5 cm	Scara 4

◆ Etape de ajustare

1. Deșurubați șuruburile de fixare ale protecției picioarelor;
2. Lățimea protectorului cu un singur picior poate fi reglată în 5 trepte, în timp ce lățimea protectoarelor cu două picioare poate fi reglată în 4 trepte;
3. După reglare, strângeți șuruburile de fixare.

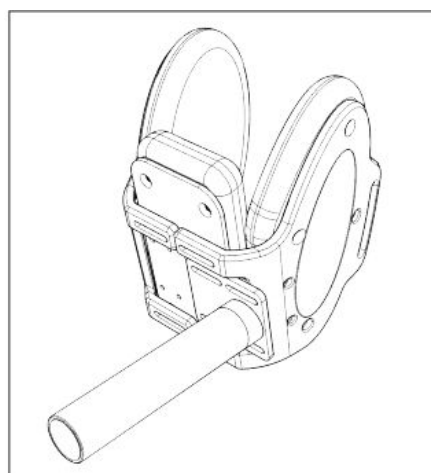



Atenție


- După reglare, asigurați-vă că verificați dacă șuruburile de fixare sunt bine blocate.

Protecție pentru picioare reglare lungime și unghi

◆ Standard de ajustare

Înainte de a sta în picioare: Este recomandabil să reglați modulul de protecție pentru picioare pentru a extinde o lungime de 3 cm.

După ce stați în picioare: Reglați protectorul pentru picioare în poziția corespunzătoare, asigurându-vă că piciorul inferior este într-o poziție verticală naturală și că un singur deget poate fi introdus între perna de protecție pentru picioare și piciorul inferior.

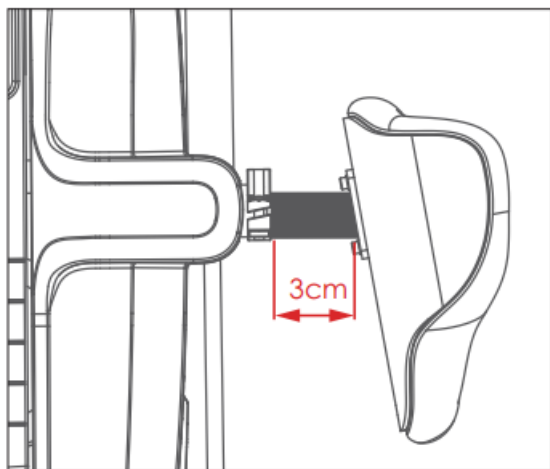

◆ Etape de ajustare

1. Desprindeți;
2. Reglați lungimea extensiei și unghiul protectorului pentru picioare;
3. Apăsăți catarama de reglare.



Atenție

- După reglare, asigurați-vă că verificați dacă catarama de reglare este blocată.

4.2.4 Reglarea lungimii modulului brațului oscilant

- ◆ Reglați intervalul de lungime a brațului oscilant pentru a se adapta la diferite lungimi ale coapselor utilizatorului

◆ Standard de ajustare

Utilizatorii ar trebui să se refere la *Tabel de comparație pentru reglarea brațului oscilant* pentru ajustare

◆ Etape de ajustare

1. Separați brațul oscilant de cotieră la un anumit unghi pentru operare manuală;
2. Slăbiți cele patru șuruburi strânse manual până când brațul oscilant poate fi reglat în sus și în jos prin extensie și retragere;
3. Extindeți sau scurtați brațul oscilant la lungimea necesară;
4. După reglare, strângeți șuruburile strânse manual.

4.2.5 Reglarea pernei de susținere a corpului superior

◆ Reglați partea din față, spate și lățimea pernei de sprijin pentru partea superioară a corpului pentru a se potrivi cu dimensiunea superioară a corpului diferiților utilizatori

◆ Standard de ajustare

Perna de susținere a corpului superior poate fi reglată în sus și în jos pentru a satisface confortul diferiților utilizatori în postura în picioare, în funcție de confortul utilizatorului; Lățimea pernei de sprijin pentru partea superioară a corpului poate fi ajustată pentru a se potrivi cu lățimea superioară a corpului, în funcție de confortul utilizatorului.

◆ Poziții superioare și inferioare și trepte de reglare a lățimii

1. Slăbiți șuruburile de fixare ale cotului pernei de sprijin
2. Reglați pozițiile superioare și inferioare și lățimea pernei de sprijin
3. După reglare, strângeți șuruburile

◆ Pași de ajustare a poziției față și spate

1. Deschideți clemele de blocare de reglare din față și din spate
2. Reglați pozițiile față și spate ale pernei de sprijin pentru partea superioară a corpului
3. După reglare, apăsați catarama de reglare

4.4 Instrucțiuni de utilizare

4.4.1 Operațiunea de îmbarcare

Pasul 1: Verificați pregătirile

1. Utilizați aplicația (vă rugăm să instalați aplicația pentru instrucțiuni specifice de utilizare) pentru a controla de la distanță robotul la 30 cm în fața corpului.



Atenție

■ Înainte de utilizare, asigurați-vă că verificați dacă echipamentul de purtare și clemele de siguranță sunt intacte și nedeteriorate și confirmați că puterea bateriei este suficientă;

2. Verificați dacă parametrii de dimensiune ai dispozitivului au fost ajustați. După reglare, continuați cu operațiunea de îmbarcare.

Pasul 2: Deplasați-vă pe scaun, strângeți centura și fixați curelele de protecție pentru picioare

1. Asistat de membrii familiei, mutați-vă pe scaun și puneți ambele picioare pe pedală;
2. Legați dispozitivul purtabil;
3. Fixați curelele de protecție pentru picioare.



Atenție


- Confirmați că picioarele inferioare sunt sprijinite în interiorul protecțiilor pentru genunchi;
- Asigurați-vă că centura este bine conectată.

Pasul 3: Stai

1. Apăsați butonul 7 sau împingeți balansoarul înainte în modul de blocare + viteză mare sau utilizați aplicația mobilă pentru a controla motorul brațului oscilant să ruleze în sus pentru a realiza procesul de staționare;
2. După ce ați stat în picioare, efectuați ajustări locale în funcție de confortul propriu al utilizatorului.

4.4.2 Operarea de conducere a robotului

După ce utilizatorul finalizează acțiunea în picioare și eliberează încuietoarea, robotul se poate deplasa înainte, înapoi și întoarce prin manipularea balansoarului.

**Atenție**

■ Nu conduceți robotul în poziții nedrepte (cu excepția situațiilor de coborâre);

■ Încercați să conduceți cu viteză mică, să conduceți cu prudență și să acordați atenție siguranței.

4.4.3 Comutator de postură corporală

◆ Etape de operare

1. Dacă utilizatorul trebuie să treacă temporar de la o poziție în picioare la o poziție așezată,

apăsați butonul 8 sau împingeți balansoarul înapoi în modul de blocare + viteză mare, sau utilizați aplicația mobilă pentru a controla motorul brațului oscilant pentru a merge în jos pentru a trece de la poziția în picioare la poziția șezând;

2. Când brațul oscilant se balansează în jos în poziția corespunzătoare, eliberați butonul, balansoarul sau butonul de control APP pentru a bloca brațul oscilant;

dacă utilizatorul trebuie să stea din nou în picioare, apăsați butonul 7 sau împingeți balansoarul înainte în modul de blocare + de mare viteză sau utilizați aplicația mobilă pentru a controla motorul brațului oscilant să ruleze în sus pentru a realiza procesul de staționare.



Diagrama comutatorului posturii corpului

4.4.4 Decuplarea de la robot

◆ Etape de operare

1. Conduceți robotul în poziția dorită;

2. Apăsați butonul comutatorului panoului pentru a bloca controlul basculant al dispozitivului pentru a preveni contactul accidental și pericolul;

3. Apăsați butonul 8 sau împingeți balansoarul înapoi în modul de blocare + viteză mare, sau utilizați aplicația mobilă pentru a controla motorul brațului oscilant pentru a merge în jos pentru a trece de la poziția în picioare la poziția șezut;

4. Deschideți curelele și cureaua de protecție pentru picioare și lăsați membrul familiei să asiste pentru a preveni răsturnarea;

5. Asistat de membrii familiei, deplasați-vă de pe scaun pentru a vă decupla de robot.




Atenție

■ După ce utilizatorul decuplează robotul, scaunul trebuie să fie în poziție orizontală pentru utilizare ulterioară.

4.4.5 Încărcarea bateriei

Timpul de încărcare a bateriei este de 4-6 ore. Când indicatorul luminos al puterii bateriei de pe panoul de control arată o singură rețea, robotul trebuie să fie încărcat. Când indicatorul luminos arată grila completă, indică faptul că bateria este complet încărcată.

Puterea bateriei robotului va fi afișată sincron pe clientul APP.

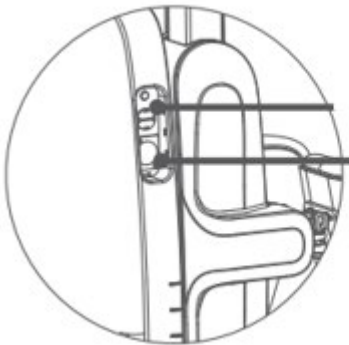

◆ Pași de încărcare

1. Deschideți capacul din cauciuc din stânga în fața robotului;

2. Conectați adaptorul de alimentare pentru a încărca bateria.



Atenție

■ Asigurați-vă că opriți întrerupătorul principal al robotului în timpul încărcării bateriei.

■ Pentru prima utilizare, vă rugăm să încărcați complet robotul mai întâi.

■ Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să vă asigurați că bateria este încărcată complet cel puțin o dată la două luni.

■ Când puterea bateriei este sub o rețea (20%), va apărea un mesaj vocal „Putere scăzută, vă rugăm să încărcați”, iar robotul ar trebui să fie încărcat cât mai curând posibil.

■ Asigurați-vă că utilizați un încărcător de marca, specificația și modelul specificat de MOBIK pentru încărcare.

4.4.6 Utilizarea modului de blocare pentru copii

Modul de blocare pentru copii este setat pentru a preveni operarea greșită a dispozitivului de către copii;

Apăsați și mențineți apăsat butoanele 12 și 05 menționate mai sus timp de cel puțin 3S pentru a intra în modul de blocare pentru copii și pentru a primi un mesaj vocal „Activare blocare pentru copii”. Promptul „Sub blocare pentru copii” va fi difuzat la fiecare 2 minute. În modul de blocare pentru copii, butoanele și balansoarul nu reușesc să evite operarea accidentală de către copii. Apăsați și mențineți apăsat butoanele 11 și 05 simultan pentru mai mult de 3 S pentru a ieși din modul de blocare pentru copii și pentru a primi un mesaj vocal „Blocarea pentru copii dezactivată”.

4.5 Instrucțiuni de utilizare ale APP

4.5.1 Abordarea conexiunii

◆ Etape de operare

1. Deschideți aplicația și faceți clic pe bara de navigare de jos pentru a intra în pagina „Dispozitiv”;
2. Țineți apăsat lung butonul circular din mijlocul ecranului;
3. Așezați telefonul aproape de capul robotului de conectat;
4. Așteptați o clipă. Aplicația se va conecta automat la robotul țintă.



Sfaturi

■ Alte situații la care să acordați atenție atunci când vă apropiați de robotul conectat:

1. Interfața APP solicită „Nu au fost găsite dispozitive disponibile”. Indică faptul că APP nu a găsit niciun hotspot Bluetooth pentru roboți de mult timp. În acest moment, vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru a elibera degetul și pentru a verifica dacă dispozitivul este complet încărcat și dacă alimentarea este pornită.

Asigurați-vă că dispozitivul este pornit corect înainte de a încerca să vă conectați din nou.

2. Interfața APP solicită „Telefonul nu se apropie de niciun dispozitiv disponibil”. Indică faptul că telefonul dvs. nu este suficient de aproape de capul robotului pentru a fi conectat. În acest moment, vă rugăm să eliberați degetul și să vă apropiați telefonul de capul robotului care urmează să fie conectat înainte de a încerca să vă conectați din nou.

4.5.2 Scanați codul QR pentru a vă conecta

◆ Etape de operare

1. Deschideți aplicația și faceți clic pe bara de navigare de jos pentru a intra în pagina „Dispozitiv”;
2. Faceți clic pe butonul „Scanați codul QR pentru a vă conecta” din colțul din dreapta sus al paginii pentru a intra în pagina de scanare a codului QR;
3. Aliniați camera telefonului cu codul QR lipit pe dispozitiv și faceți clic pe „Conectați dispozitivul” în fereastra pop-up pentru a iniția conexiunea;
4. Așteptați o clipă. Aplicația se va conecta automat la robotul țintă.



■ Pe pagina de scanare a codului QR apare un ecran gol.

1. Deoarece camera telefonului trebuie utilizată pentru funcția de scanare a codului QR, pe interfața de scanare a codului QR va apărea un ecran gol atunci când nu ați acordat permisiunile camerei pentru aplicație, iar funcția „Scațați codul QR pentru a vă conecta” nu va fi disponibilă în acest moment.

2. Metoda de activare a funcției „Scațați codul QR pentru a vă conecta” Faceți clic pe textul „Apare un ecran gol?” în partea de jos a ecranului și faceți clic pe „Mergeți la Setări” în fereastra pop-up. Telefonul va trece automat la pagina de detalii APP.

Paginile de detalii ale aplicației pentru diferite modele de telefoane sunt diferite. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe pagina dvs. pentru a activa permisiunea camerei pentru aplicație. (Conținutul figurii atașate este doar pentru referință. Conținutul paginii diferitelor modele de telefoane poate varia. Vă rugăm să acordați atenție setărilor cu cuvinte similare, cum ar fi „permisiune”, „fotografie”, „cameră foto”, etc.)

4.5.3 Căutați pentru a vă conecta

◆ Etape de operare

1. Deschideți aplicația și faceți clic pe bara de navigare de jos pentru a intra în pagina „Dispozitiv”;
2. Faceți clic pe butonul „Căutare manuală” din colțul din stânga sus al paginii pentru a intra în pagina de căutare Bluetooth;
3. Faceți clic pe butonul de căutare din mijlocul ecranului pentru a începe căutarea prin Bluetooth;
4. Faceți clic pe dispozitivul care urmează să fie conectat în lista cu rezultatele căutării pentru a iniția conexiunea;
5. Așteptați o clipă. Aplicația se va conecta automat la robotul țintă.

4.5.4 Telecomandă

APP oferă control de la distanță al robotului, inclusiv: control de la distanță al mișcării robotului și reglarea componentelor electrice reglabile ale robotului.

Control de la distanță al mișcării robotului

◆ Etape de operare

1. Conectați robotul și intrați în pagina principală de monitorizare a dispozitivului;
2. Faceți clic pe butonul „Comandă de la distanță” din colțul din dreapta jos al paginii pentru a intra în pagina de telecomandă;
3. Acționați manual balansoarul virtual pentru controlul de la distanță al mișcării robotului;

Reglarea componentelor electrice reglabile ale robotului

■ Etape de operare

1. Conectați robotul și intrați în pagina principală de monitorizare a dispozitivului;
2. Faceți clic pe butonul „Ajustare” din colțul din stânga jos al paginii pentru a intra în pagina de ajustare;
3. Faceți clic pe numele componentei electrice reglabile afișat în partea de sus a paginii și selectați componenta țintă care trebuie ajustată;
4. Acționați manual balansoarul virtual orizontal de sub pagină pentru a regla componenta țintă.



Sfaturi

■ În timpul ajustării componentelor electrice reglabile ale robotului, este important să rețineți că:

Componentele electrice reglabile afișate în partea de sus a paginii se pot modifica din cauza diferitelor opțiuni pentru robot. Figura atașată arată doar componentele electrice reglabile corespunzătoare unei anumite opțiuni. Pentru mai multe opțiuni, vă rugăm să contactați personalul oficial de serviciu pentru clienți.

4.5.5 Setări generale

APP oferă setări de bază pentru funcțiile robotului, inclusiv: setări de voce și setări de iluminare frontală

Setări de voce

◆ Etape de operare

1. Faceți clic pe „Setări de voce” pe pagina de setări generale pentru a intra în pagina de setări de voce;
2. Controlați pornirea/dezactivarea solicitărilor vocale și a alarmelor vocale în funcție de solicitările paginii și reglați volumul vocal.

Setările luminii fata

◆ Etape de operare

1. Faceți clic pe „Setări lumini frontale” pe pagina de setări generale pentru a intra în pagina de setări lumini frontale;

2. Controlați pornirea/stingerea luminilor frontale conform instrucțiunilor de pe pagină și reglați modul și culoarea luminii frontale.



Atenție

■ Luminile colorate sunt funcții opționale, iar această funcție nu este disponibilă pentru dispozitivele care nu selectează această opțiune.

4.5.6 Actualizarea dispozitivului


APP oferă funcție de actualizare a firmware-ului de la distanță pentru robot. Intrați pe pagina de upgrade


◆ Etape de operare

1. Conectați robotul și intrați în pagina principală de monitorizare a dispozitivului;

2. Faceți clic pe pictograma setări din colțul din dreapta sus al paginii pentru a intra în pagina de setări a dispozitivului.

3. Faceți clic pe „Versiune dispozitiv” pentru a accesa pagina de actualizare a dispozitivului.

2. Faceți clic pe „Actualizați acum” în fereastra pop-up pentru a iniția procesul de actualizare și așteptați actualizarea progres pentru a finaliza. 

 Sfaturi

■ În timpul actualizării, trebuie să activați Wifi sau 4G al telefonului pentru a vă asigura că telefonul poate accesa Internetul.

Procesul de actualizare durează aproximativ 3-5 minute și dispozitivul va fi oprit automat după finalizarea upgrade-ului.

4.6 Descrierea scenariului de utilizare

Robotul poate ajuta utilizatorii să obțină mișcare în picioare, autoîngrijire parțială și antrenament pasiv de genuflexiuni.

4.6.1 Antrenamentul pasiv de genuflexiuni

Pentru produsele pentru copii a fost dezvoltat un mod de antrenament pasiv, care poate comuta automat între pozițiile în picioare și șezând prin setarea unghiului și frecvenței antrenamentului pasiv, obținând efectul antrenamentului pasiv.

◆ Stabilirea pașilor

Înainte de a începe antrenamentul, dispozitivul trebuie să fie pornit și blocat și să nu fie încărcat;

1. Calibrarea dispozitivului: În primul rând, balansați brațul oscilant în poziție verticală, faceți clic pe setările de calibrare înainte de antrenament și faceți clic pe „Sunt în picioare” pentru a calibra.

Dacă nu este setat, utilizatorului i se va solicita automat să îl seteze. Utilizatorul trebuie doar să balanseze brațul oscilant în poziție verticală și să facă clic pe „Sunt în picioare” pentru a finaliza setarea. Utilizatorii trebuie să îl seteze o singură dată.

Dacă există o eroare de setare, puteți face clic pe „Setări de calibrare înainte de antrenament” în colțul din dreapta sus al ecranului pentru a o reseta.

2. Setarea unghiului: Faceți clic pe pictograma unghi din colțul din stânga jos, glisați pentru a seta unghiul de antrenament ghemuit și trageți în jos pentru a închide pentru a finaliza setarea. Unghiul implicit este de 30°, iar APP cere ca unghiul să depășească 5° în mod implicit. Dacă este mai mică de 5°, va fi tratată ca 5°;

3. Setarea frecvenței ghemuit: faceți clic pe pictograma frecvență din colțul din stânga jos, selectați pentru a seta frecvența pentru acest antrenament și trageți în jos pentru a închide pentru a finaliza setarea. Frecvența implicită este 5, iar utilizatorii pot alege în intervalul 1 ~ 50.

◆ Etapele antrenamentului:

1. După finalizarea setărilor, faceți clic pe „Operare automată” pentru a funcționa automat în conformitate cu cerințele setărilor.

2. În timpul funcționării, APP va afișa „ghemuit” și „în picioare” pentru a indica starea de funcționare a brațului oscilant, precum și unghiul dinamic curent și progresul antrenamentului.

3. În timpul funcționării, utilizatorii pot întrerupe, continua sau ieși în orice moment.

4.6.2 Descrierea utilizării în scenariu exterior

Robotul este potrivit în principal pentru medii interioare generale, ajutând utilizatorii în mișcarea în picioare și autoîngrijirea parțială. Robotul poate fi folosit și pe drumuri plate și dure în aer liber, cum ar fi zonele rezidențiale și accesele fără bariere ($\leq 5^\circ$). Nu utilizați produsul în medii rutiere speciale, cum ar fi noroi, nisip și iarbă etc.



Atenție

- În cazul în care robotul trebuie utilizat în aer liber sau în alte medii complexe, este necesar să se consulte în prealabil avizul producătorului și să-l folosească cu însoțirea membrilor familiei sau a îngrijitorilor;
 - Când conduceți robotul în sus, printr-un acces fără bariere, utilizatorii trebuie să mențină o poziție verticală și este interzis să urce pante într-o stare nedreaptă.
 - Când coborâți o pantă, se recomandă să balansați brațul oscilant înapoi la un anumit unghi în timp ce reduceți viteza și să finalizați procesul de coborâre într-o poziție semi-ghemuită. Operațiunile de oprire de urgență sunt interzise. Produsul are o funcție automată de decelerare la coborâre pentru a asigura siguranța utilizatorului atunci când coborâți panta.
 - Dacă este imposibil să continuați deplasarea și trebuie împins, acesta poate fi deplasat în sus pentru a deschide comutatorul de blocare a motorului butucului (vezi diagrama din Secțiunea 2.1.5) și împins manual;
- după apăsare, trageți comutatorul de blocare în jos pentru a activa funcția de frână automată a roții din față.

4.7 Descrierea avertismentului de siguranță

Pentru a asigura siguranța utilizatorilor, produsul nostru a proiectat diverse mesaje vocale inteligente, cu scopul de a-i determina pe utilizatori să acorde atenție și să gestioneze situațiile corespunzătoare din prima dată.

Solicitare vocală

Voce de avertizare	Scenariul corespunzător
Mod de mare viteză	Acesta va fi declanșat la trecerea de la viteză mică la viteză mare
Alarma	Când apare alarma SOS, declanșați alarma
Modul de blocare	Modul de pornire este modul de blocare în mod implicit. Acesta va fi declanșat la trecerea de la neblocare la blocare
Eliberați încuietura	Acesta va fi declanșat când faceți clic pe butonul de deblocare în starea blocată
Modul de împingere	Acesta va fi declanșat atunci când mențineți o apăsare scurtă a tastei de viteză și tastei SOS simultan
Ieșiți din modul de apăsare	Acesta va fi declanșat la apăsarea oricărui buton sau la apăsarea butonului în modul de apăsare
Mod upgrade	Când APP detectează o nouă versiune, faceți clic pentru a face upgrade
Upgrade finalizat	Acesta va fi declanșat la sfârșitul upgrade-ului cu un singur modul
Actualizarea dispozitivului	Echipamentul este în curs de modernizare
Lansare	Lansare. Tonul de pornire va suna timp de 3 secunde
Tonul tastei	Sunet de tastare de expansiune în sus și în jos
Încărcare	În încărcare
Încărcare finalizată	Acesta va fi declanșat după finalizarea încărcării
Frână tip bandă deschisă	Frâna de tip bandă a dispozitivului se deschide
Protecție baterie	Defecțiune baterie
Protecția motorului	Aparatul are o defecțiune a motorului
Protecție roata fata	Driverul hubului are o defecțiune
Protecția dispozitivului	Comunicația dintre placa principală de control sau driver este deconectată
Protecție basculant	Legatorul este anormal sau este pornit în poziție diferită de zero
Închidere	Închidere. Tonul de oprire va suna timp de 3 secunde
Denivelarea dispozitivului	Acesta va fi declanșat pentru denivelarea dispozitivului
Înclinarea dispozitivului	Acesta va fi declanșat atunci când dispozitivul este înclinat. Unghiul dintre stânga și dreapta, față și spate depășește 5°
Îndoire ascuțită a dispozitivului	Acesta va fi declanșat atunci când dispozitivul este sub îndoire ascuțită
Upgrade eșuat	Acesta va fi declanșat atunci când actualizarea eșuează
Modul Downhill	Va fi declanșat la intrarea în modul downhill și continuă să difuzeze
Ieșiți din modul în jos	Acesta va fi declanșat la ieșirea din modul de coborâre
Putere scăzută, vă rugăm să încărcați	Puterea bateriei este mai mică de 20% și va fi declanșată în fiecare minut
Activare blocare pentru copii	Transmite o dată când intri în modul de blocare pentru copii
Sub încuietura pentru copii	Transmite la fiecare 2 minute în modul de blocare pentru copii
Blocarea pentru copii este dezactivată	Transmite o dată când ieși din modul de blocare pentru copii

Prompt pop-up APP

Titlul interfeței pop-up	Descrierea interfeței de utilizare pop-up	Scenariul corespunzător
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a motorului roții din față 2	Motorul de antrenare stânga/dreapta al roții din față a produsului are o defecțiune la supracurent
Sfaturi pentru conducere	Frână cu bandă deschisă, vă rugăm să opriți frâna roții din față	Frâna motorului de antrenare stânga/dreapta a roții din față a produsului nu este închisă sau defectă
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a controlerului	Controlerul produsului este defect
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a sistemului de control	Controlerul produsului are o eroare de comunicare
Protecție basculant	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție 1	În timpul pornirii, balansoarul nu este în poziția de mijloc
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a comunicării cu motorul roții din față	Controlerul produsului are o deconectare de comunicare
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a motorului roții din față 3	Tensiunea controlerului produsului este prea mare
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a motorului roții din față 4	Motorul roții din față a produsului este deconectat
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a motorului roții din față 5	Controler de produs protecție de mare putere
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a motorului superior 1	Protecție la supracurent motor superior
Protecția motorului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a motorului superior 2	Motorul superior este deconectat
Sfaturi pentru baterie	Nu utilizați robotul în timp ce bateria se încarcă	Bateria se încarcă
Protecție baterie	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a bateriei 2	Protecția prizei bateriei sau defecțiune
Protecție basculant	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție 2	Rockerul este deconectat sau defect
Stare de blocare	/	Produsul este în stare de blocare
Stare de împingere	/	Produsul este într-o stare de împingere
Limitarea vitezei modul	/	Produsul este într-o stare de limitare a vitezei
Sfaturi de utilizare	Vă rugăm să setați brațul oscilant al robotului	Poziția brațului oscilant al produsului nu este calibrată
Protecția sistemului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a controlerului principal 1	Timeout de comunicare CAN pentru controlul produsului
Protecția sistemului	Vă rugăm să reporniți robotul și să eliberați starea de protecție a unității 1	Timeout de comunicare CAN drive 1 produs

V. Descriere despre serviciul produsului

5. Declarație de protecție a mediului:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.
- 4) Produsele electrice datorate materialelor lor de construcție, dacă nu sunt eliminate corect, pot duce la pericole pentru mediu și, în plus, pentru sănătate.

6. Raportarea incidentelor:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

7. Declarație de conformitate:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

8. Condiții de garanție:

Produsul este garantat pe o perioadă de doi (2) ani garanție pe cadru și șase (6) luni baterie, de la data achiziționării.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp, cum ar fi tapițeria, roțile, anvelopa pentru roți, centura de siguranță, suporturile pentru picioare sau frâne.

Daunele sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție.

Niciun service sau piesă de schimb nu este acoperit dacă nu a fost inspectat de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile în garanție sunt plătite de utilizator-client sau de dealer.

Când utilizatorul sau furnizorul solicită garanția, furnizați o dovadă validă de cumpărare și formularul de garanție completat, cu o fotografie a numărului de serie al produsului și o fotografie sau un videoclip cu problema care a apărut. În cazul în care utilizatorul nu poate furniza documentele de mai sus, dacă putem confirma că produsul sau piesa se află încă în perioada de garanție, vom

5.2 Formular de garanție

DETALII CUMPĂRĂTORI:	
NUMELE COMPLET:	
TELEFON:	
CUMPĂRARE DATA:	
NUMĂR DE FACTURA:	
NUMĂR DE SERIE:	
LOT:	
DETALII DEALER:	
NUMELE COMPLET:	
ADRESA:	
TELEFON:	
	SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA DEALERULUI

5.3 Garanție de service

Acest document se aplică produselor Brangbang (denumite în mod colectiv „produs”) achiziționate de utilizatori și pieselor, fittingurilor și dispozitivelor externe configurate (denumite în mod colectiv „piese”) atunci când produsele sunt livrate. Pentru alte produse sau piese (cum ar fi produse promoționale, cadouri și alte accesorii atașate după ex-fabrică) care nu sunt incluse în această gamă, serviciile lor de garanție și garanție vor fi efectuate în mod independent, în conformitate cu clauzele de garanție corespunzătoare.

Dacă produsul are defecte de performanță din cauza materialelor, procesului sau problemelor de fabricație în condiții normale de utilizare și întreținere, în perioada de garanție, vom furniza servicii de reparații, înlocuire și alte servicii de garanție în conformitate cu reglementările din acest document. „Defecte de performanță” va fi explicată în conformitate cu reglementările legale referitoare la garanție (adică, „trei garanții”). „Condiții de utilizare și întreținere normale” înseamnă că instalarea, utilizarea, întreținerea, păstrarea și transportul etc. ale produselor respectă cerințele instrucțiunilor, iar produsul este utilizat în mod rezonabil pentru scopul sau aplicația prevăzută. „Afectarea utilizării normale” înseamnă că produsul nu își poate îndeplini funcțiile care trebuie furnizate în mod rezonabil.

Cu excepția cheltuielilor care vor fi suportate de utilizatori în conformitate cu directivele anticipate sau cu legile, Compania nu va colecta cheltuieli suplimentare de la utilizatori pentru serviciile de garanție. Conținutul de mai sus reprezintă toate garanțiile noastre pentru calitatea produsului și serviciul. Nu există nicio altă expresie sau taciturnitate pentru garanție.

Dacă dealer-ul sau orice terță parte are promisiuni suplimentare față de utilizatori, utilizatorii vor cere să se adeverească, Compania nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

5.4 Conținutul a trei garanții

5.4.1 Descrierea a trei garanții

(1) Perioada de „trei garanții”: data de începere a celor trei garanții se calculează de la data semnării utilizatorului pentru comanda logistică.

(2) Domeniul de aplicare a „trei garanții”: perioada de „trei garanții” se aplică pieselor originale, cu excepția pieselor de uzură specificate. Pentru reglementările de asigurare a calității pentru piesele de uzură, consultați 5.4.3 *Catalog și termenul limită de asigurare a calității pieselor de uzură* în Manual.

(3) Descriere pentru expirarea garanției: în cazul în care perioada de „trei garanții” a depășit, utilizatorul poate solicita reparații de la Companie și trebuie să plătească costurile de reparație corespunzătoare.

(4) Detalii de garanție: în perioada de „trei garanții”, înlocuirea sau întreținerea pieselor nu va prelungi perioada inițială de garanție. Perioada de garanție a pieselor înlocuite se încheie cu sfârșitul perioadei de garanție a întregului dispozitiv.

5.4.2 Perioada de garanție pentru piesele de uzură

Reglementările de asigurare a calității pentru piesele de uzură sunt prezentate în tabelul de mai jos:

S/N	Lista de piese	Domeniul garanției	Perioada de garanție
1	Buton de control al panoului	Eșecul funcției	180 de zile
2	Bascul de control al panoului	Eșecul funcției	180 de zile
3	Curele de protecție pentru picioare	Ruperea suturii, curele rupte, incapabil băț	180 de zile
4	Încărcător	Nu se poate încărca și descărca	180 de zile
5	Ansamblu clip	Clipul nu poate fi fixat, blocat și funcția este invalidă	180 de zile
6	Curea cu clips	Ruperea suturii, curele rupte	180 de zile
7	Piese de pachete moi	Detașarea și decolorarea moalei pachet nu din cauza factorilor umani	180 de zile
8	Piese de coajă	Vopseaua decojită și crăpată pe coajă nu datorita factorilor umani	180 de zile
9	Piese decorative din cauciuc	Crăparea nu se datorează factorilor umani	180 de zile
10	Purtarea echipamentului	Deconectare, spargere	180 de zile

5.4.3 Exonerarea responsabilităților „trei garanții”.

În cazul următoarelor condiții în cadrul garanției, cele „trei garanții” își vor pierde eficacitatea:

1. Certificatul de garanție efectiv sau factura de achiziție nu pot fi furnizate;
2. Daunele sunt cauzate de operare greșită, utilizare greșită sau transport necorespunzător, întreținere a păstrării;
3. Daunele sunt cauzate de forță majoră sau evenimente accidentale, precum incendiu, război, atac terorist etc.;
4. Deteriorarea este cauzată de dezasamblare și restructurare fără permisiunea producătorului;
5. Deteriorarea apare în urma întreținerii cu accesorii neoriginale;
6. Deteriorările apar după repararea produsului de către personalul de întreținere care nu a fost autorizat de producător;
7. Îmbătrânirea naturală, decolorarea sau consumul se întâmplă din cauza utilizării produsului;
8. Defecțiunea sau deteriorarea este cauzată de ploaie, zăpadă, pete, reactiv sau coroziune chimică etc.;
9. Mașina nu este o mașină originală, cum ar fi mașina de reșapare etc.;
10. Alte probleme legate de calitatea non-produsului, cum ar fi defecțiuni sau deteriorări provocate de om;
11. Obiecții cu privire la culoare, formă și aspect etc.;
12. Daunele apar dincolo de perioada de garanție specificată.

Dacă apare situația de mai sus, utilizatorul va căuta soluții de la partea responsabilă relevantă, iar Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru aceasta. Dacă produsul nu poate fi utilizat în mod normal din cauza pieselor, accesoriilor sau software-ului care nu se află în perioada de garanție sau în domeniul de aplicare a garanției, acesta nu va fi considerat o defecțiune în domeniul garanției. Aceste probleme vor fi rezolvate prin actualizarea acestor piese, accesorii și software în conformitate cu prevederile relevante ale garanției.

Condițiile bune și finisarea produselor și a materialelor atasate nu se încadrează în gama de garanție, clienții trebuie să verifice la primirea produsului și nu au voie să propună obiecții la orice neconformitate.

VI. Întreținere zilnică

Categoria articolului	Conținutul articolului
Articole de întreținere/articole de inspecție	<p>1. Verificați în mod regulat puterea bateriei principale prin panoul de control.</p> <p>Când puterea este sub 20% sau indicatorul luminos de alimentare de pe panoul de control al produsului arată 1 rețea, aceasta ar trebui să fie încărcată cât mai curând posibil.</p>
	<p>2. Îndepărtați în mod regulat praful de pe întreg dispozitivul și impermeabilizați interiorul și panoul de control al produsului; evitați plasarea dispozitivului în apropierea apei sau a surselor de căldură. Dacă nu este folosit o perioadă lungă de timp, se recomandă acoperirea produsului cu folie de ambalare.</p>
	<p>3. În funcție de frecvența antrenamentului de ghemuit, adăugați în mod regulat ulei lubrifiant la conexiunea dintre brațul oscilant, arcul de gaz și legătura scaunului pentru a evita orice zgomot anormal în timpul antrenamentului.</p>
	<p>4. Verificați în mod regulat dacă roata universală funcționează fără probleme sau este blocată de obiecte străine și dacă șuruburile de fixare sunt slăbite.</p>
	<p>5. Verificați dacă șuruburile de fixare ale tubului de aluminiu al brațului oscilant și ale tubului de aluminiu al cotierei și șurubul știftului de fixare de pe arcul cu gaz sunt slăbite.</p>
	<p>6. Dacă nu este utilizat pentru o lungă perioadă de timp, ar trebui să fie încărcat complet pentru depozitare și este reîncărcat în fiecare lună sau înainte de reutilizare.</p>

VII. Disclaimer

Conținutul *Manual de produs* sunt drepturile de proprietate intelectuală ale MOBIAC SA (denumită în continuare „Compania”); Drepturile de autor aparțin Companiei. Toate părțile acestui produs sunt deținute de Companie, inclusiv fișierele și software-ul, etc. Fără permisiunea scrisă a Companiei, nu este permisă copierea, extragerea sau traducerea Manualului și a conținutului acestui document.

Compania întocmește *Manual de produs* cu atitudinea de a fi responsabil pentru utilizatori, totuși, Compania nu garantează că tot conținutul prezentului articol este corect. The *Manual de produs* este un document tehnic pur și nu există niciun conținut de insinuare sau aluzie la terți. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru neînțelegerile utilizatorilor din cauza erorii imprimantei. În cazul pierderii directe sau indirecte de informații sau a cauzei rezilierii din acest motiv *Manual de produs* sau toate informațiile despre acest produs, Compania nu își asumă nicio responsabilitate.



















Utilizatorii trebuie să opereze robotul MOBIAC SA în strictă conformitate cu instrucțiunile din *Manual de produs* și site-ul nostru oficial (www.mobiakcare.com) și nu trebuie să încalce interdicțiile din Manualul de utilizare în timpul utilizării robotului.

Dacă utilizatorii sau terții nu reușesc să opereze robotul în strictă conformitate cu instrucțiunile din *Manual de produs* sau operați prin încălcarea articolelor interzise din *Manual de produs*, iar vătămările personale sau daune materiale ale utilizatorilor sau terților sunt cauzate de aceasta, responsabilitățile legale corespunzătoare vor fi asumate de către executori specifici.

Produsele Companiei sunt îmbunătățite și actualizate în mod constant, astfel încât utilizatorii trebuie să se autentifice pe site-ul oficial al MOBIAC SA pentru a solicita instrucțiunile și informațiile de actualizare a condițiilor de funcționare sau să solicite dealerilor manualul de utilizare actualizat. Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul *Manual de produs* fara notificare.

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοιβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive



Οδηγίες Χρήσης/ Manual de utilizare

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ "JOY" / STAND-UP WELCHELTHE "JOY"

REF 0805725

CE

Ημερομηνία έκδοσης: 15/06/2024

Πρόλογος

Αγαπητοί πελάτες:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το έξυπνο ρομπότ υποβοηθούμενης κίνησης (εφεξής, "ρομπός MOBIAK") *Εγχειρίδιο Προϊόντος* είναι ένα σημαντικό έγγραφο, το οποίο παρέχει πληροφορίες για το ρομπότ, τις μεθόδους λειτουργοφορίες και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το *Εγχειρίδιο Προϊόντος* για να καταλάβετε πώς πρέπει να το χειρίζεστε και να το συντηρείτε σωστά. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχειρίδιο, προτείνεται να το φυλάξετε σε ασφαλή σημείο σε περίπτωση ανάγκης γρήγορης πρόσβασης.

Το εγχειρίδιο παρουσιάζει προϊόντα ρομπότ και όλες τις σχετικές λειτουργίες. Οι λειτουργίες που περιγράφονται ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο δικό σας προϊόν και θένται και θέσιμες μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα. Ανατρέξτε στα έγγραφα πώλησης (σύμβαση αγοράς ή κατάλογος αποστολής) για τα στοιχεία του στοιχείου του πελαίτο ποστολής το προϊόν πριν επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της MOBIAK ή το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών πελατών της.

Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο ισχύουν κατά τη σύνταξη του εγχειριδίου. Για την κάλυψη των αναγκών των πελατών και τη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις, Eria Etaθή συνεχίσει να βελτιστοποιεί και να βελτιώνει τις ρυθμίσεις και τις επιδόσεις των προϊόντων προϊόντων. Επομένως, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ του δικού σας προϊόντος και των οδηγιών οδηγιών του δικού σας. Τα στοιχεία, τα σχήματα ή οι περιγραφές του εγχειριδίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χειριδία οποιαδήποτε αξίωση.

-Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν δίνονται οδηγίες με όρους όπως μπροστά, πίσω, αριστερά οδηγίες με όρους όπως μπροστά, πίσω, αριστερά, πενριά, πενρος και προς τα κάτω, ο χρήστης πρέπει να βλέπει μπροστά του τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος κατα να και να υποβραχιόνιο με τα δύο χέρια του.


- Τα σχήματα χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην κατανόηση και είναι μόνο σχηματικά δαμαματικά δαμαματικά δρανόηση να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Περιεχόμενα

I. Προφυλάξεις ασφαλείας	3
1.1 Περιγραφή συμβόλων	3
1.2 Άτομα κατάλληλα για τη χρήση αυτού του προϊόντος.....	3
1.3 Άτομα ακατάλληλα για τη χρήση αυτού του προϊόντος.....	4
1.4 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας	4
1.5 Προφυλάξεις στο περιβάλλον αποθήκευσης.....	4
1.6 Παρατήρηση για τη χρήση.....	5
II. Παρουσίαση προϊόντος	6
2.1 Σώμα συσκευής.....	7
2.1.1 Μονάδα υποστήριξης κορμού.....	8
2.1.2 Μονάδα βραχίονα ταλάντωσης.....	8
2.1.3 Άνω μονάδα.....	9
2.1.4 Μονάδα πλαισίου.....	10
2.1.5 Προστατευτικό ποδιών.....	11
2.1.6 Μονάδα καθίσματος	11
2.1.7 Μονάδα ρύθμισης ανύψωσης της πλατφόρμας ποδιών	12
2.2 Προαιρετικά αξεσουάρ	12
2.3 Φορετός εξοπλισμός.....	12
2.4 Εφαρμογή για κινητά	13
III. Τεχνικές παράμετροι.....	14
3.1 Διαστάσεις.....	14
3.2 Επιδόσεις και άλλα στοιχεία	15
IV. Οδηγίες χρήσης.....	16
4.1 Προετοιμασία πριν από τη χρήση	16
4.1.1 Δήλωση χρήσης.....	16
4.1.2 Περιγραφή της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου.....	16
4.2 Εργονομική ρύθμιση.....	17
4.2.1 Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας ποδιών	17
4.2.2 Ρύθμιση ύψους άνω μονάδας	18
4.2.3 Ρύθμιση προστατευτικού ποδιών	19
4.2.4 Ρύθμιση μήκους μονάδας βραχίονα ταλάντωσης	20
4.2.5 - Ρύθμιση μαξιλαριού υποστήριξης κορμού	21
4.4 Οδηγίες λειτουργίας.....	21
4.4.1 Διαδικασία επιβίβασης	21
4.4.2 Λειτουργία οδήγησης ρομπότ	22
4.4.3 Αλλαγή στάσης σώματος	22
4.4.4 Απομάκρυνση από το ρομπότ	23
4.4.5 Φόρτιση μπαταρίας	23
4.4.6 Χρήση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά.....	23
4.5 Οδηγίες λειτουργίας της εφαρμογής	24
4.5.1 Πλησιάστε για να συνδεθείτε.....	24
4.5.2 Σάρωση κωδικού QR για σύνδεση.....	26
4.5.3 Αναζήτηση για σύνδεση	28
4.5.4 Τηλεχειρισμός	29
4.5.5 Γενικές ρυθμίσεις.....	31
4.5.6 Αναβάθμιση συσκευής	32
4.6 Περιγραφή σχετικά με το σενάριο χρήσης.....	34
4.6.1 Παθητική άσκηση βαθιών καθισμάτων	34
4.6.2 Περιγραφή σεναρίου χρήσης σε εξωτερικό χώρο	35
4.7 Περιγραφή προειδοποιήσεων ασφαλείας.....	36
V. Περιγραφή για το σέρβις του προϊόντος	38
5.2. Κάρτα εγγύησης	38
5.3 Υπηρεσίες εγγύησης	39
5.4 Περιεχόμενο τριών εγγυήσεων	39
5.4.1 Περιγραφή για τις «τρεις εγγυήσεις»	39
5.4.2 Κανονισμοί τριών εγγυήσεων	40
5.4.3 Περίοδος εγγύησης για φθειρόμενα εξαρτήματα	41
5.4.4 Εξαιρέσεις στις υποχρεώσεις των «τριών εγγυήσεων».....	42
5.5 Απόκτηση υπηρεσιών	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
VI. Καθημερινή συντήρηση.....	43
VII. Αποποίηση ευθυνών.....	44


1.3 Άτομα ακατάλληλα για τη χρήση αυτού του προϊόντος

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τα ακόλουθα άτομα:

Προειδοποίηση

- Άτομα που πάσχουν από ορθοστατική υπόταση και πρέπει να αναπαύονται σε ήρεμο περιβάλλον.
- Άτομα με μη επουλωμένα κατάγματα και εξαρθρώσεις, σοβαρές παραμορφώσεις των αρθρώσεων αρθρώσεων, ήσσοων, ωσεις σοβαρή οστεοπόρωση (T <-2,0) και διαφορές στο μήκος των κάτω άκρων που υπερβαίνουν τα 2 cm.
- Άτομα των οποίων ο μυϊκός τόνος των κάτω άκρων είναι πολύ υψηλός και δεν είναι σε θέση να θέναι να θέναι να θέναι να θέναι να ψηλός τους.
- Άτομα με νοητική αναπηρία, γνωστικές διαταραχές, διαταραχές της όρασης, προβλήματα ακοής της δυνητικούς λειτουργικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.


1.4 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Προσοχή

- Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Προστατέψτε τον πίνακα ελέγχου από νερό ή άλλα υγρά ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη δυσλειτουργία ώστε να αποφύγετε δυσλειτουργία του.
- Μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος διαφορετική από την ονομαστική τάση, ώστε να να ποτατοποτική περίπτωση πυρκαγιάς ή ζημιάς στο προϊόν.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην αγγίζετε τον φορτιστή με βρεγμένη βρεγμένης φόρτιση, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Κατά τη φόρτιση, συνδέετε πρώτα το βύσμα στην πρίζα και έπειτα το βύσμα στο πρυσμα στο πρυσμα στο πρυσμα στο πρυσμα στο πρυσμα στην πρίζα και έπειτα το βύσμα στο πρυσμα στο πρυσμα στο πρυσμα στο πρυσμα στην πρίζα την πρόκληση ζημιάς σε αυτό.
- Μην φορτίζετε κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος ή καταιγίδων και σε αυτές τις περιπτώσεις διακοπών ρεύματος ή καταιγίδων και σε αυτές τις περιπτώσεις πεπετωώσεπετωώσετων βύσμα του φορτιστή από την πρίζα.
- Μην λυγίζετε υπερβολικά, τραβάτε στρίβετε ή δένετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην ανοίγετε και αντικαθιστάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε περίπτωση που έχει υποστεί υποστεί ζημιάς ζημιάς εξουσιοδότηση.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών της MOBIAC για περαιτέρω πληροφορίες.

1.5 Προφυλάξεις στο περιβάλλον αποθήκευσης

Προσοχή

- Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον πάνω από 40 °C ή κάτω από 0 °C. Η στάθμη της μπαταρίας πρέπει να είναι πάνω από 80%. Για μακροχρόνια χρήση, συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασίες μεταξύ ~ 15 °C °C.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επίπεδο έδαφος χωρίς εμπόδια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εδάφη με λάσπη, άμμο, γρασίδι, κ.λπ.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρο κοντά σε πηγή υψηλής θερμοκρασίας ή στον ήλιο στον ήλιο χυγιοντά σε πηγή υψηλής διάστημα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πλε τως απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη του προϊόντος πριν το αποθηκεύσετε.
- Για μακροχρόνια αποθήκευση, αποθηκεύστε το προϊόν σε επίπεδο, σταθερό, καλά αεριζόμενο, αεροίον σε επίπεδο δροσερό μέρος και καλύψτε το με ένα αδιάβροχο ύφασμα.
- Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το προϊόν για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτοστα.

1.6 Παρατήρηση για τη χρήση



Προσοχή

- Αυτό το προϊόν μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο έναν χρήστη κάθε φορά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από δύο ή περισσότερους χρήστες μαζί.
- Μην βάζετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στα κενά μεταξύ των βραχιόνων ταλάντωνων ταλλάντωντροϊτόστρος ιτόστρος των βραχιόνων ταλάντωσης και των υποβραχιονίων, ή μεταξύ των βραχιόνων ταλάντωσης καλάντωσης καλάντωσης καλάντωσης και τωραχιονίων ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα τραυματισμού ή δυσλειτουργίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση, ώστε να αποφύγετε τις δυσλειτουργίες.
- Εκτός από το τεχνικό προσωπικό που ορίζεται από την Εταιρεία, απαγορεύεται αυστηρά από την Εταιρεία επισκευή και τροποποίηση του προϊόντος. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και το προσωπικό τεχνικό εξυπηρέτησης της MOBIAK.

II. Παρουσίαση προϊόντος

Αυτό το προϊόν είναι ένα έξυπνο ρομπότ υποβοήθησης κίνησης που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα ανεξάρτητα. Εξάρτητα. Εθνης κίνησης. Μπορεί να παρέχει υποστήριξη για τη διαβίωση και την αποκατάσταση για άτομα με προβλήματα κρατατασταση και την συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης σε όρθια θέση, της μερικής αυτοεξυπηρέτησης, της άσκησης καθισμάτων, κ.λπ. Το προϊόν περιλαμβάνει το σώμα της συσκευής και την εφαρμογή για κινητά.


Το σώμα της συσκευής είναι ο φορέας για την εκτέλεση των λειτουργιών του ρομπότ, με πολλά ζυθέλεση των λειτουργιών του ρομπότ, με πολλά ζυθέλεση των του ρομπότ προσαρμόζονται σε χρήστες διαφορετικού ύψους και βάρους.

Η εφαρμογή για κινητά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένο έλεγχο του ρομπότ, παρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένο έλεγχο του ρομπότ, παρησιμοποιηθολσης κατάστασης χρήσης σε πραγματικό χρόνο και ρυθμίσεις των παραμέτρων διαφόρων ηλεκτρονικάώνοχονικάώχουχονικάώχου.



2.1 Σώμα συσκευής

Το σώμα της συσκευής μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες μονάδες: μονάδα υποστήριξης κορμού, μονάδα κορμού, μονάδα ταλάντωσης, μονάδα υποβραχιονίων, άνω μονάδα, μονάδα πλαισίου, προστατευτικό ποδιών και μονάδα καθίσματος.

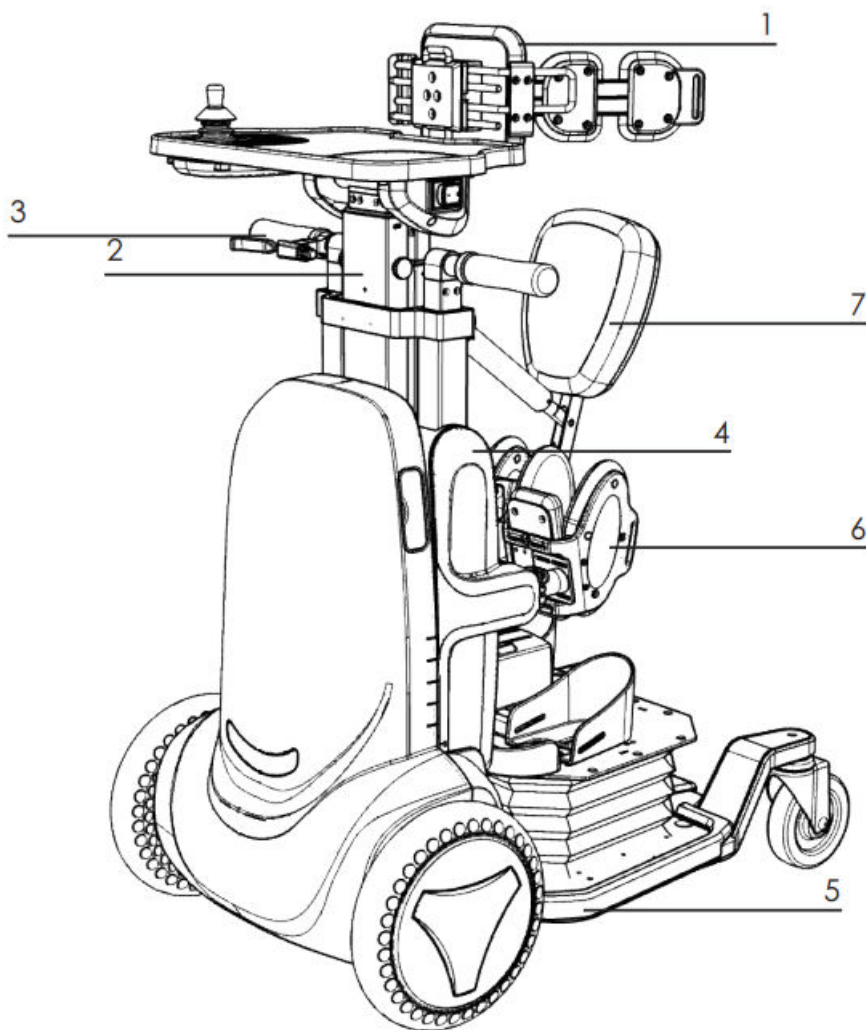


1 - Μονάδα υποστήριξης κορμού 2 - Μονάδα βραχίονα ταλάντωσης 3 - Μονάδα υποβραχιονίων 4 -
μοΑδνω 4 - οΑδνω ταλάντωσης πλαισίου 6 - Προστατευτικό ποδιών 7 - Μονάδα καθίσματος

2.1.1 Μονάδα υποστήριξης κορμού

Η μονάδα υποστήριξης κορμού βρίσκεται στο επάνω μέρος του ρομπότ, συνδέεται με τη μονάδα του μονάδα του μονάδα του ρομπότ και στηρίζει τη μέση και την κοιλιά του χρήστη, εμποδίζοντας τον κορμό του χρήστη να γέρνει ή γέρνεται. Η μονάδα υποστήριξης κορμού διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου για τον έλεγχο του χειρισμαίτης χειρισμοχους του προϊόντος.

Προκειμένου να βελτιωθεί η άνεση και η προσαρμοστικότητα του χρήστη, η μονάδα υποστήριξης κορμού διαθέτει δύο μαξιλάρια στα σχομέτο στα στού επαφή με τον χρήστη: ένα για τη μπροστινή πλευρά του κορμού και ένα για τα πλευρά. Το μαξιλάρι υποστήριξης της μπροστινής πλευράς του κορμού χρησιμοποιείται για τη στερέω θέσης Το χρησιμοποιείται θώρακα του χρήστη και μπορεί να ρυθμιστεί μπροστά, πίσω και κατά ύψος με εργαλεία ρύθμισης. Το μαξιλάρι υποστήριξης των πλευρών χρησιμοποιείται για τη στερέωση της θέσης των πλευρών ρυθμιστεί κατά πλάτος αριστερά και δεξιά με εργαλεία ρύθμισης. Επιπλέον, παρέχεται μια προαιρετική φορητή συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τησέσης τέσης της πλάτης του χρήστη.

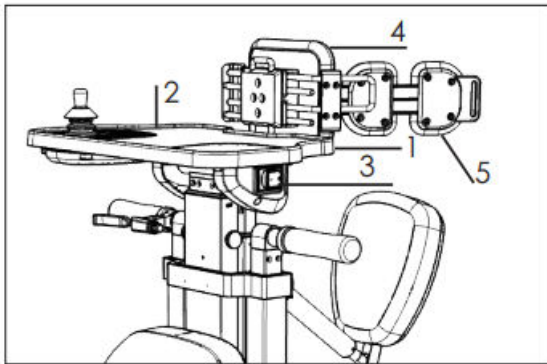

1 - Επιφάνεια κέντρου ελέγχου 2

- Κέντρο ελέγχου


3 - Διακόπτης τροφοδοσίας

4 - Μαξιλάρι υποστήριξης μπροστινής πλευράς κορμού 5 -

Μαξιλάρι υποστήριξης πλευρών

2.1.2 Μονάδα βραχίονα ταλάντωσης

Η μονάδα του βραχίονα ταλάντωσης συνδέεται με τη μονάδα υποστήριξης κορμού και με την άνδω . Ο βραχίονας ταλάντωσης μπορεί να ασφαλιστεί σε οποιαδήποτε θέση εντός του εύρους ταλάντωσης ταλάντωσης έναν κινητήρα για κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω, ώστε να βοηθήσει τον χρήστη να στικαρθιο κάτω κάθετα. Επιπλέον, ο βραχίονας ταλάντωσης μπορεί επίσης να κλειδώσει σε μια θέση μετά από ένα πρόβλεο πρόβλεον ρεύματος.

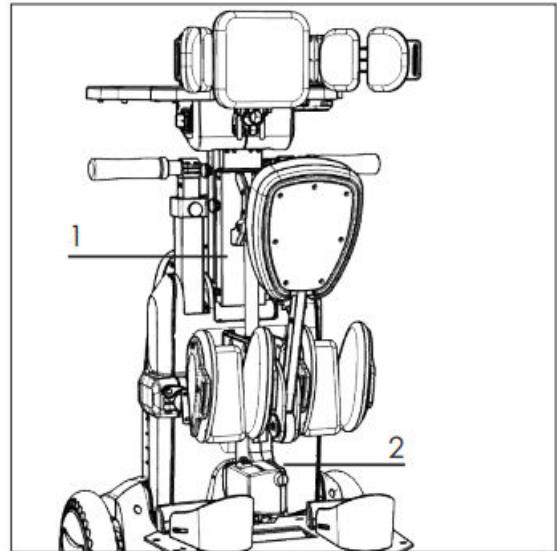


1 - Βραχίονας ταλάντωσης

2 - Κινητήρας βραχίονα ταλάντωσης

2.1.3 Άνω μονάδα




Η άνω μονάδα συνδέεται με τα υποβραχιόνια, τον βραχίονα ταλάντωσης, το πλαίσιο και τα πεντοστάτα, προστατώποστα, τον βραχίονα ταλάντωσης το ύψος της μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ανάλογα με το ύψος του χρήστη.

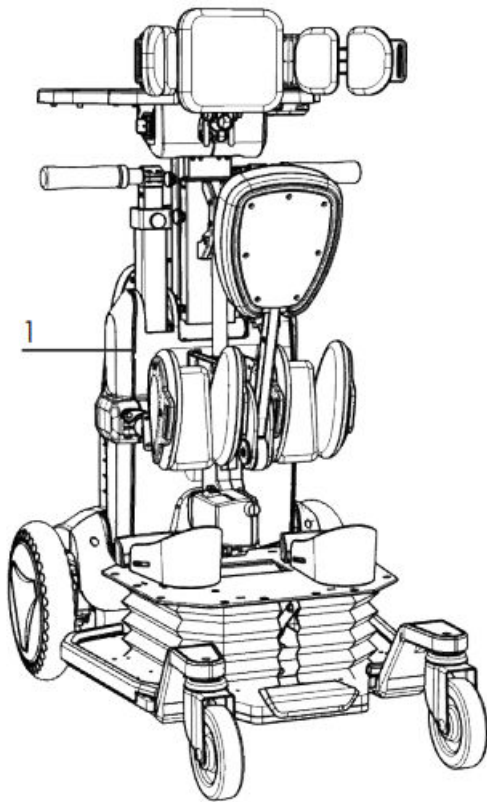

1 - Άνω μονάδα

2.1.4 Μονάδα πλαισίου

Το πλαίσιο συνδέεται με την άνω μονάδα και τη μονάδα πλατφόρμας ποδιών, η οποία είναι ο φονάδας ο φορμας ποδιών κάθε εξάρτημα της μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας μπροστινού τροχού του πλαισίου, πλαισίου, LED τροχού, του διακόπτη κλειδώματος του κινητήρα, του διακόπτη ρύθμισης της άνω μονάδας, κ.λπ.

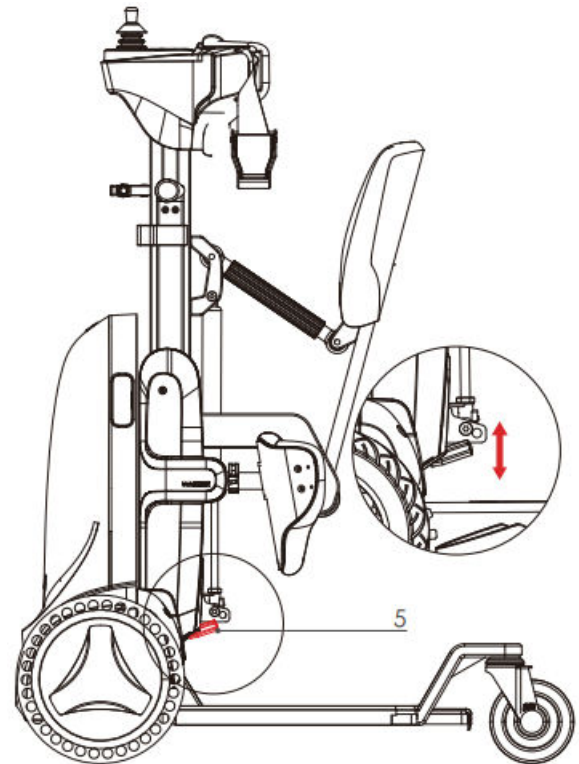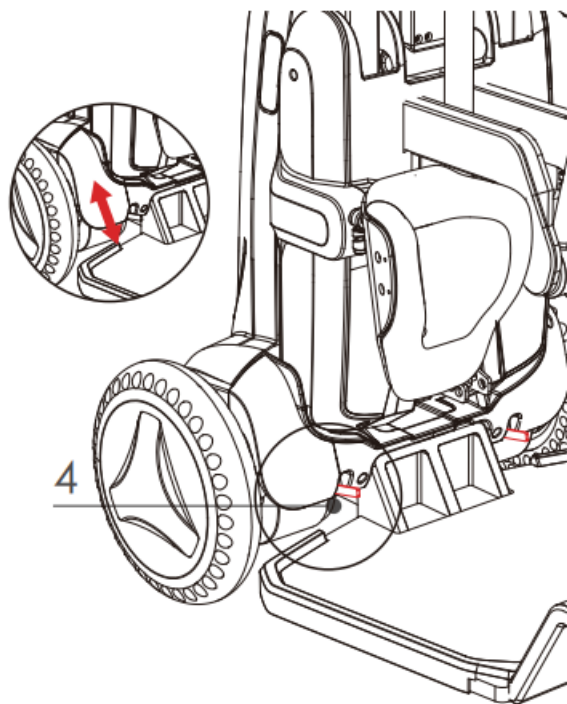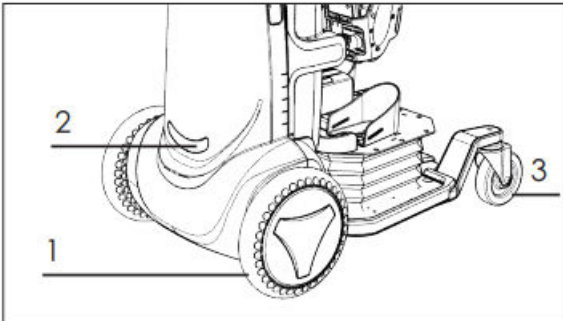

1 - Μονάδα μπροστινού τροχού πλαισίου 2

- Λυχνία LED

3 - Πίσω τροχός


4 - Διακόπτης κλειδώματος κινητήρα (τραβήξτε προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε)

5 - Διακόπτης ρύθμισης άνω μονάδας (τραβήξτε προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε)

2.1.5 Προστατευτικό ποδιών

Το προστατευτικό ποδιών χρησιμοποιείται κυρίως για την υποστήριξη των κάτω άκρων του χρήστη κατά την άσκηση. Υπάρχουν μαξιλάρια στα σημεία όπου το προστατευτικό ποδιών έρχεται σε επαφή με τον χρήστη, χρήστης άνεσης του. Προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή σε χρήστες διαφορετικού σωματότυπου, η θέση του μαξου μαήστες διαφορετικού σωματότυπου προστατευτικού ποδιών σε σχέση με τη μονάδα πλαισίου μπορεί να ρυθμιστεί μπροστά, πίσω, προς τα, πίσω, αρι, πεναριστωε κάτω.


Το προστατευτικό ποδιών μπορεί επίσης να ρυθμιστεί κατά πλάτος, ώστε να προσαρμόζεται στον ζετα στον στον πλάτος παρέχει καλύτερη προστασία και σταθερότητα.

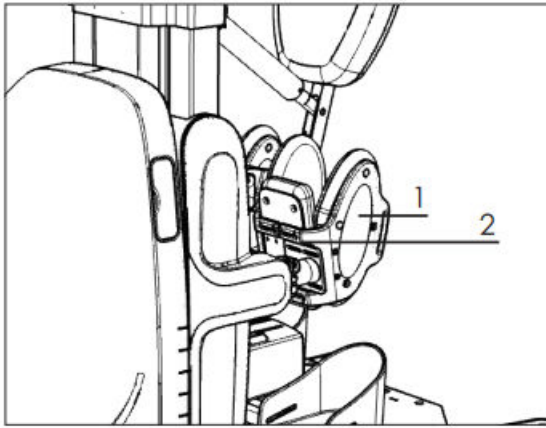

- 1 - Προστατευτικό ποδιών
- 2 - Μονάδα ρύθμισης προστατευτικού ποδιών
- 3 - Μονάδα ρύθμισης πλάτους προστατευτικού ποδιών

2.1.6 Μονάδα καθίσματος


Η μονάδα καθίσματος παρέχει κυρίως υποστήριξη των γλουτών του χρήστη κατά τη διαδικασίών μεποστήριξη των γλουτών του χρήστη κατά τη διαδικασίών μεποστήριξη των καθιστή στην όρθια θέση και διαθέτει μαξιλάρια στα σημεία όπου η μονάδα καθίσματος έρσφεταματος έρσχετομαρια στα σημεία χρήστη για βελτίωση της άνεσης. Προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή σε χρήστες διαφορετικού σωματότυπου, η απόσταση μεθαστύος μετασες και του προστατευτικού θώρακα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του συνδέσμου ρύθμισης του καθίσματος.

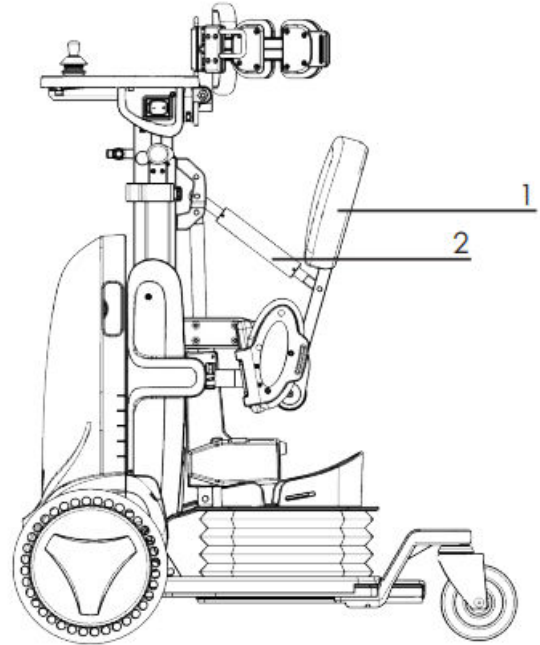

- 1 - Μονάδα καθίσματος
- 2 - Σύνδεσμος ρύθμισης καθίσματος

2.1.7 Μονάδα ρύθμισης ανύψωσης της πλατφόρμας ποδιών

Για προσαρμογή στο ύψος του χρήστη και στις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στο ύψος του του χρήστη, ρύθμιση μονάδα ρύθμισης ανύψωσης της πλατφόρμας ποδιών. Με τον διακόπτη ρύθμισης στο πίσω μέρος μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της πλατφόρμας πλατφόρμας πλατφόρμας χρειάται να ρυθμίσετε το ύψος της εργαλεία ρύθμισης. Στην πλατφόρμα ανύψωσης ποδιών υπάρχει μια ξεχωριστή βάση που στερεώσεως ποδιών υπάρχει μια ξεχωριστή βάση που στερεώνεται στην πλανφτι μαγνητόμήχηρήστη ταινία. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το μέγεθος και τη θέση στερέωσης της βάσης ανλογα μενάτις μέγεθος και τη θέση στερέωσης της βάσης ανλογα μενάτις μενάτις.

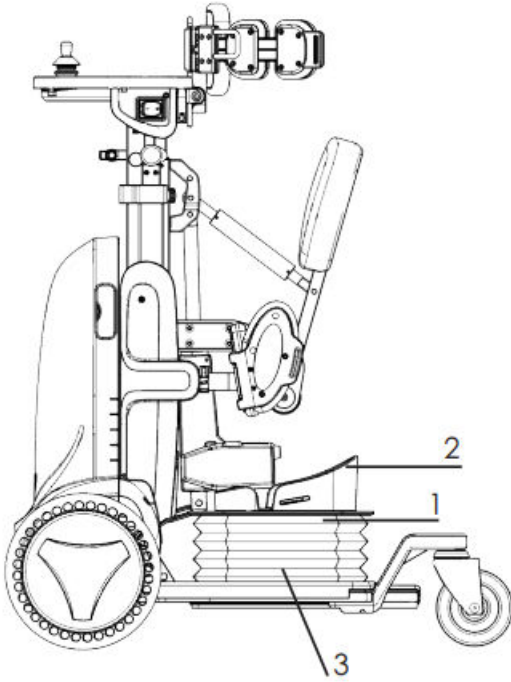

- 1 - Μονάδα ρύθμισης ανύψωσης πλατφόρμας 2
- Διακόπτης ρύθμισης
- 3 - Πλατφόρμα ποδιών

2.2 Προαιρετικά αξεσουάρ

Οι χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών της MOBIAK για πληρετας παρακάτω προαιρετικά αξεσουάρ.

2.3 Φορητός εξοπλισμός

Ο φορητός εξοπλισμός είναι προαιρετικό αξεσουάρ που χρησιμοποιείται για να παρέχει σταθερή σταθερή όταν ο χρήστης κάθεται ή κινείται.



Συμβουλές

■ Ο φορητός εξοπλισμός είναι προαιρετικό αξεσουάρ και οι χρήστες με δυνατό κορμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες τους ή να ζητήσουν τη βοήθειά τους με τις ανάγκες τους.

2.4 Εφαρμογή για κινητά


Μέσω Bluetooth, η εφαρμογή για κινητά μπορεί να συνδεθεί με το ρομπότ. Η εφαρμογή για κινητά είναι κατάλληλη για συσκευές με Android και iOS και περιλαμβάνει τις παρακάτω παρακάτω παρακάτω συσκευές με

1. Χειριστείτε το ρομπότ εξ αποστάσεως.
2. Παρέχετε σχόλια για την κατάσταση χρήσης διαφόρων λειτουργιών του ρομπότ.
3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους κάθε ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου.
4. Αναβαθμίστε το λογισμικό του ρομπότ.

III. Τεχνικές παράμετροι

3.1 Διαστάσεις

Το ρομπότ παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και οι διαστάσεις του παρουσιάζονται εδώ:

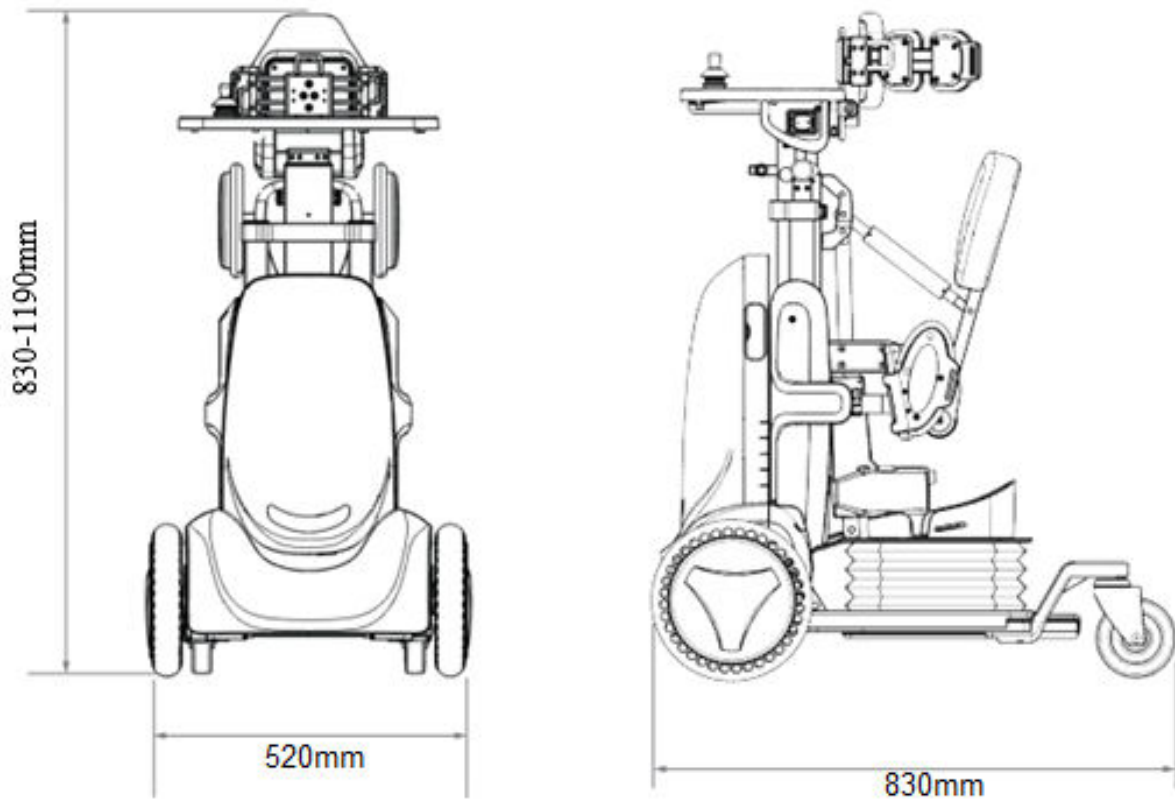

3.2 Επιδόσεις και άλλα στοιχεία

Κατηγορία	Παράμετροι
Ταχύτητα οδήγησης	≤4,5Km/h
Αυτονομία	Οδηγείτε με σταθερή ταχύτητα 15 Km/h σε επίπεδο δρόμο και σε θερμοκρασία 25°C
Κλίση οδήγησης	5°
Υψος εμποδίων	≤40mm
Πλάτος τάφρου	≤50mm
Υψος χρήστη	1,1m-1,5m
Βάρος χρήστη	20 kg-60 kg
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	0,63m
Βάρος συσκευής	90 kg ± 3 kg
Μέγιστο φορτίο	60 kg
Bluetooth	2,4GHz, 1mW
Υποδοχή τροφοδοσίας ρομπότ	DC29.4V4A
Υποδοχή φορτιστή	AC220V

IV. Οδηγίες χρήσης

4.1 Προετοιμασία πριν από τη χρήση

4.1.1 Δήλωση χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, έλεγχος, κ.λπ.):


Διαβάστε προσεκτικά το *Εγχειρίδιο Προϊόντος* που συνοδεύει το προϊόν και μάθετε όλα όσα χρειάζονται για την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Για την καλύτερη περιγραφή του προϊόντος, στο *Εγχειρίδιο* παρέχονται κάποιες εικόνες που παρουσιάζουν λεπτομερώς κάποια σημεία του περιβλήματος και του καλύμματος. Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, μην αφαιρείτε το περίβλημα ή το προστατευτικό κάλυμμα, φαλυμντα, δημιουργηθούν προβλήματα στην εγγύηση του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με το *Εγχειρίδιο Προϊόντος*.

Εάν το *Εγχειρίδιο* καταστραφεί ή το χάσετε, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το προσωπικό εξυπηρέτησης MOBIAC.

4.1.2 Περιγραφή της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται ακριβώς πάνω από το προστατευτικό θώρακα και περιλαμβάνει μιλαμβνι μινδεια υτικά από προστατευτικό κατάστασης, τα κουμπιά λειτουργίας, το χειριστήριο και τον κεντρικό διακόπτη, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα του κεντρικού διακόπτη,

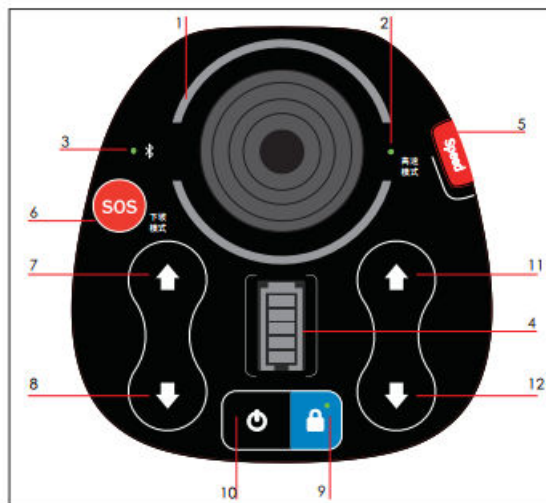

01 - Κυκλική ενδεικτική λυχνία κατάσταση

- ◆ α. Πράσινο για λειτουργία οδήγησης
- ◆ β. Μπλε για λειτουργία κλειδώματος
- ◆ γ. Μαύρο και μπλε εναλλάξ για λειτουργία ώθησης
- ◆ δ. Κόκκινο για χειριστήριο που δεν λειτουργεί κανονικά 02

- Ενδεικτική λυχνία ταχύτητας

- ◆ α. Ανάβει σε υψηλή ταχύτητα κίνησης
- ◆ β. Σβήνει σε χαμηλή ταχύτητα κίνησης 03 -

Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης Bluetooth


- ◆ α. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth
- ◆ β. Ανάβει κανονικά όταν έχει γίνει σύνδεση Bluetooth 04

- Ενδεικτική λυχνία στάθμης μπαταρίας

- ◆ Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε στάθμη μπαταρίας 20% και η μπαταρία θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

05 - Κουμπί ταχύτητας

- ◆ Εναλλαγή μεταξύ υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας.

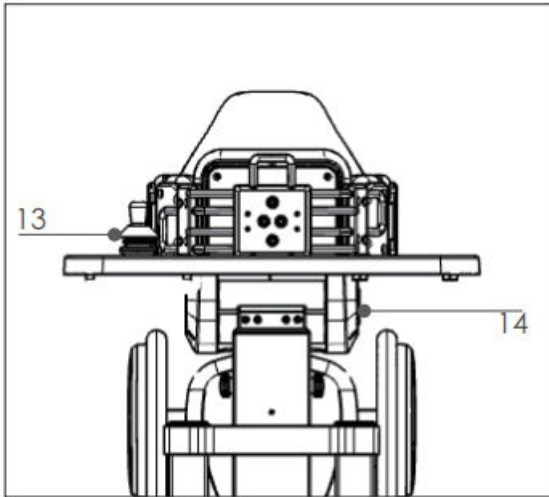

06 - Κουμπί λειτουργίας κατάβασης

◆ Πατήστε ελαφρώς για να εισέλθετε ή να εξέλθετε από τη λειτουργία κατάβασης.

Η λειτουργία SOS είναι μια προαιρετική λειτουργία. Μετά την επιλογή της, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3" για να εισέλθετε σέλθετε στουρλεια στουρ.

07 - Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα ταλάντωσης για να μετακινηθείτε προς τα πάνω

08 - Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα ταλάντωσης για να μετακινηθείτε προς τα κάτω

09 - Κουμπί κλειδώματος

◆ Πατήστε ώστε το ρομπότ να εισέλθει σε λειτουργία κλειδώματος και να μην επιτρέπεται ο τηλεχειρισμός του.

10 - Κουμπί ενεργοποίησης

◆ Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3" για να ξεκινήσετε το ρομπότ ή για να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

11 - Κουμπί απενεργοποίησης κλειδώματος για παιδιά

◆ Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά 11 και 05 για τουλάχιστον 3" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

12 - Κουμπί ενεργοποίησης κλειδώματος για παιδιά

◆ Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά 12 και 05 για τουλάχιστον 3" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παζιδουρη παζιτιά τη λειτουργία. κλειδώματος για παιδιά, τα κουμπιά και το χειριστήριο δεν λειτουργούν, ώστε να αποτραπεί ο το χειριστήριο δεν λειτουργούν, ώστε να αποτραπεί ο τιαπείός τυγχός ο τυχός παιδιά.

13 - Χειριστήριο

◆ Η κατεύθυνση οδήγησης του ρομπότ ελέγχεται με το τράβηγμα του χειριστηρίου.

14 - Διακόπτης τροφοδοσίας

◆ Ο κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας του ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και για επανεκκίνηση σε περίπτωση βλάβης.

4.2 Εργονομική ρύθμιση

Η διαδικασία ρύθμισης του ρομπότ πριν από τη χρήση του ρυθμίζεται για τις επιμέρους μονάδες μονάδες μονάδες.

Ρύθμιση επιμέρους μονάδων της συσκευής

Η ρύθμιση των επιμέρους μονάδων της συσκευής εφαρμόζει τις αρχές της εργονομίας, ώσκειής εφαρμόζει τις αρχές της εργονομίας, ώστονομίας, ώστονομίας κατάλληλο για χρήστες διαφορετικού ύψους και βάρους. Η ρύθμιση των επιμέρους μονάδων περιλαμβάνει τα εξής:

1 - Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας ποδιών 2 -

Ρύθμιση ύψους άνω μονάδας 3 - Ρύθμιση

προστώπτυστατοούθμιση ύψους άνω μονάδας

4 - Ρύθμιση μήκους μονάδας βραχίονα ταλάντωσης 5 -

Ρύθμιση μαξιλαριού υποστήριξου κορμού

4.2.1 Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας ποδιών


Η πλατφόρμα ποδιών συνδέεται με το πλαίσιο και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν χειροκίνητα χειροκίνητα και οι χρήστες πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τυπική ρύθμιση:


Όσο υψηλότερος είναι ο χρήστης, τόσο πιο χαμηλά ρυθμίζεται η πλατφόρμα των ποδιών. Οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στον Πίνακα σύγκρισης για τη ρύθμιση της πλατφόρμας ποδιών. Όταν το ύψος του χρήστη είναι πάνω από 145cm, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αφαιρέσει ματηφόπο ποδιών.


Πίνακας σύγκρισης για τη ρύθμιση της πλατφόρμας ποδιών	
Ύψος (cm)	Ύψος πλατφόρμας
110-120	14-11 cm
120-130	11-8 cm
130-140	8-5 cm
140-145	5-4 cm

4.2.2 Ρύθμιση ύψους άνω μονάδας


Η άνω μονάδα συνδέεται με τα υποβραχιόνια, τον βραχίονα ταλάντωσης και το πλαίσιο. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν χειροκίνητα το ύψος της άνω μονάδας ανάλογα με το μήκος των ποδιών. 

◆ Τυπική ρύθμιση

Οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στον *Πίνακα σύγκρισης για τη ρύθμιση του άνω πλαισίου*  για την κατάλληλη ρύθμιση.

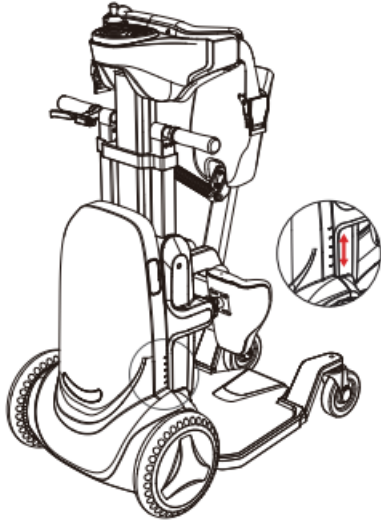

◆ Βήματα ρύθμισης

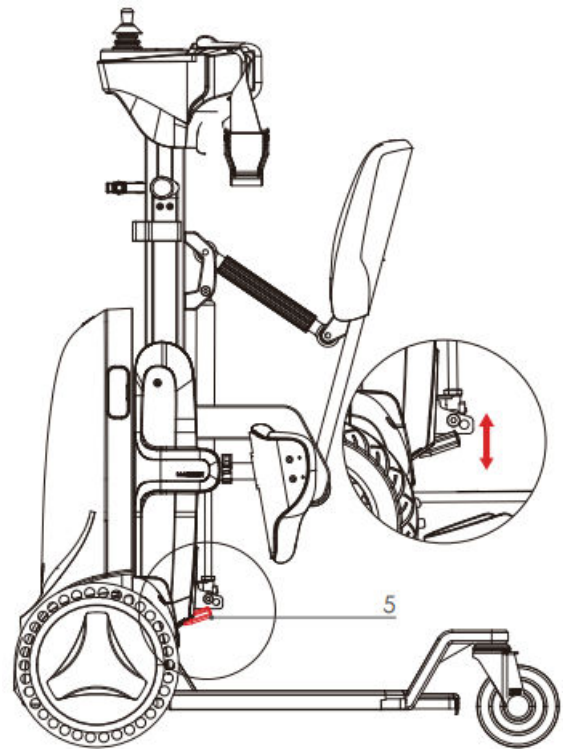


Συμβουλές

Πίνακας σύγκρισης για τη ρύθμιση του άνω πλαισίου

Υψος (cm)	Γραμμή ένδειξης
110-150	0 γραμμές
150-155	0 ~ 1 γραμμή
155-165	1 ~ 2 γραμμές
165-175	2 ~ 3 γραμμές
175-185	3 ~ 4 γραμμές
185-190	4 ~ 5 γραμμές

■ Οι γραμμές ένδειξης στον πίνακα σύγκρισης είναι τιμές αναφοράς και οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τη ρύθμιση κατάλληλα ανάλογα με τις πραγματικές καταστάσεις.

◆ Βήματα ρύθμισης

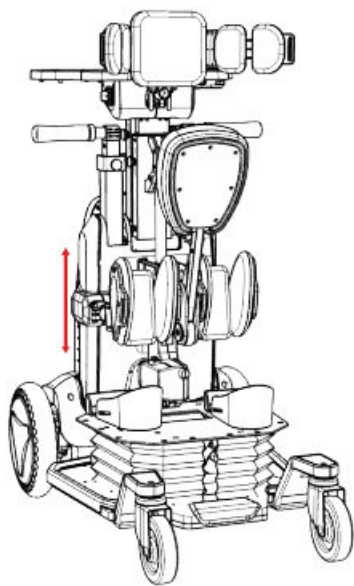

1. Ανασηκώστε το κλειδί ρύθμισης της άνω μονάδας και διατηρήστε την στο ύψος που θέλετε.
2. Κρατήστε τη λαβή και ανασηκώστε ή πιέστε προς τα κάτω την άνω μονάδα για να την ρυθμίσετε στην ρυθμιζόμενη θέση που θέλετε προς τα κάτω την άνω θέση.
3. Αφήστε το κλειδί ρύθμισης. Το κλειδί ρύθμισης θα επανέλθει αυτόματα στην κάτω θέση του και το ύψος της άνω μονάδας θα αυτορυθμιστεί.



Προσοχή

■ Αφού ρυθμίσετε την άνω μονάδα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άνω άκρο του προστατευτικού ταβλιού είναι σταθερό και ότι το άνω άκρο του προστατευτικού ταβλιού είναι σταθερό αφού ρυθμίσετε την άνω μονάδα από την επιγονατίδα.

4.2.3 Ρύθμιση προστατευτικού ποδιών

Το πλάτος, το μήκος επέκτασης και η γωνία του προστατευτικού ποδιών μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη.

Ρύθμιση πλάτους μονάδας προστασίας ποδιών

◆ Τυπική ρύθμιση

Πίνακας σύγκρισης για ρύθμιση μονού προστατευτικού ποδιών:


Πίνακας σύγκρισης για ρύθμιση πλάτους μονού προστατευτικού ποδιών	
Πλάτος άρθρωσης γονάτου (cm)	Θέση γραμμής ένδειξης
6-7 cm	Ένδειξη 1
7-8 cm	Ένδειξη 2
8-9 cm	Ένδειξη 3
9-10 cm	Ένδειξη 4
10-12 cm	Ένδειξη 5

Πίνακας σύγκρισης για ρύθμιση διπλού προστατευτικού ποδιών:

Πίνακας σύγκρισης για ρύθμιση διπλού προστατευτικού ποδιών	
Απόσταση γονάτων σε όρθια στάση (cm)	Θέση γραμμής ένδειξης
15,5-18,5cm	Ένδειξη 1
18,5-21,5cm	Ένδειξη 2
21,5-24,5cm	Ένδειξη 3
24,5-27,5cm	Ένδειξη 4

◆ Βήματα ρύθμισης

1. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του προστατευτικού ποδιών.
2. Το πλάτος του μονού προστατευτικού ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 θέσεις, ενώ το ποδιό μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 θέσεις.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

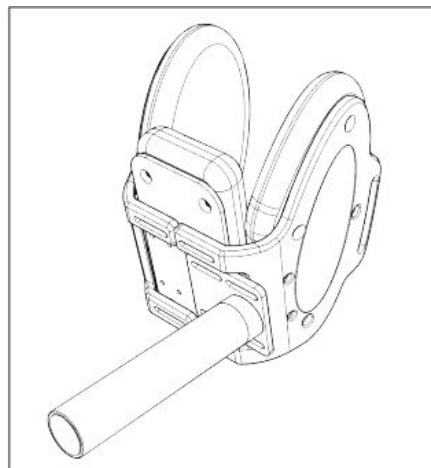



Προσοχή


- Μετά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης είναι καλά ασφαλισμένες.

Ρύθμιση μήκους και γωνίας μονάδας προστασίας ποδιών

◆ Τυπική ρύθμιση

Πριν μεταβείτε σε όρθια θέση: Συνιστάται η επέκταση του προστατευτικού ποδιών κατά 3cm.

Αφού μεταβείτε σε όρθια θέση: Ρυθμίστε το προστατευτικό ποδιών στην κατάλληλη θέληλη θέληλη θέληλη θέλαζονφοστατευτικό ποδιών πόδι βρίσκεται σε φυσική όρθια θέση και ότι χωράει ένα δάχτυλο ανάμεσα στο μαξιλάρι το μαξιλάρι του χωράει ένα δάχτυλο ανάμεσα στο μαξιλάρι το μαξιλάρι του χωράει ποδιού.

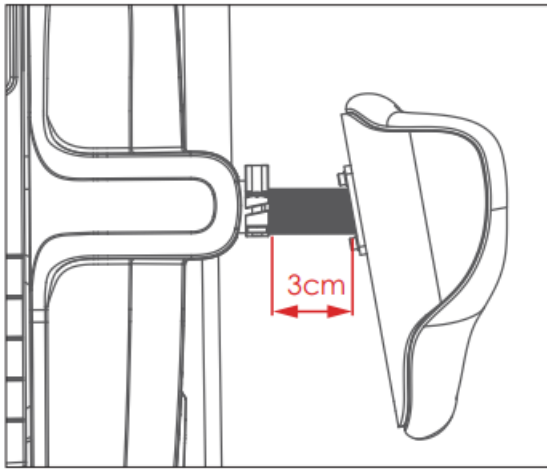

◆ Βήματα ρύθμισης

1. Ανοίξτε την πόρπη
2. Ρυθμίστε το μήκος επέκτασης και τη γωνία του προστατευτικού ποδιών.
3. Πατήστε την πόρπη.



Προσοχή

- Μετά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η πόρπη είναι κλειδωμένη.

4.2.4 Ρύθμιση μήκους μονάδας βραχίονα ταλάντωσης

Ρυθμίστε το μήκος του βραχίονα ταλάντωσης ανάλογα με το μήκος του μηρού

◆ Τυπική ρύθμιση

Οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στον Πίνακα σύγκρισης για τη ρύθμιση του βραχίονα ταλάντωσης για την κατάλληλη ρύθμιση

◆ Βήματα ρύθμισης

1. Αφαιρέστε τον βραχίονα ταλάντωσης από το υποβραχιόνιο υπό μια συγκεκριμένη γωνία για χεיתה για χεיתהροχιόνιο υπό μια συγκεκριμένη
2. Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες για να ρυθμίσετε σωστά τον βραχίονα ταλάντωσης προς τα πάνω/κάτω πάνω τον σωστά επέκταση και σύμπτυξη.
3. Επεκτείνετε ή συμπτύξτε τον βραχίονα ταλάντωσης στο απαιτούμενο μήκος.
4. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, σφίξτε τις βίδες με το χέρι.

4.2.5 - Ρύθμιση μαξιλαριού υποστήριξης κορμού

Ρυθμίστε την μπροστινή και την πίσω θέση και το πλάτος του μαξιλαριού υποστήριξης κορμού ανάλογα με το σωματότυπο του χρήστη

◆ Τυπική ρύθμιση

Το μαξιλάρι υποστήριξης κορμού μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω και προς τα κάτω για μεγαλύτερη ύστερη χρήση στην όρθια θέση. Το πλάτος του μαξιλαριού υποστήριξης κορμού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το πλοστήριξης κορμού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το πλοστήριξης κορμού άνεση του χρήστη.

◆ Βήματα ρύθμισης της επάνω και της κάτω θέσης και του πλάτους

1. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης του μαξιλαριού στήριξης
2. Ρυθμίστε το επάνω και το κάτω μέρος και το πλάτος του μαξιλαριού στήριξης
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, σφίξτε τις βίδες

◆ Βήματα ρύθμισης μπροστινής και πίσω θέσης

1. Ανοίξτε κλιπ ασφάλισης για τη ρύθμιση της μπροστινής και της πίσω θέσης
2. Ρυθμίστε την μπροστινή και την πίσω θέση του μαξιλαριού στήριξης κορμού
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε την πόρπη.

4.4 Οδηγίες λειτουργίας

4.4.1 Διαδικασία επιβίβασης

Βήμα 1: Κάντε την κατάλληλη προετοιμασία

1. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή (αφού την εγκαταστήσετε) για να ελέγξετε εξ αποστοστα ποστάστοσταποστοσεως 30 cm από το σώμα του χρήστη.



Προσοχή

- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο φορετός εξοπλισμός και τα κλιπ ασφαλείας είναι σε καλστασκατάστας βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι επαρκής.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι παράμετροι διαστάσεων της συσκευής. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, συνεχίστε με τη διαδικασία επιβίβασης.

Βήμα 2: Καθίστε στο κάθισμα, σφίξτε τον ιμάντα και στερεώστε τους ιμάντες του προστατευτικού προστατευτικού προστατευτικού και στερεώστε τους

1. Με τη βοήθεια άλλων, καθίστε στο κάθισμα και τοποθετήστε και τα δύο πόδια στην πόδια στην πλαματοπον και τοποθετήστε και τα δύο πόδια στην πλαφο πλαφο πλαφο.

2. Συνδέστε το φορετό εξάρτημα.

3. Στερεώστε τους ιμάντες του προστατευτικού ποδιών.



Προσοχή

- Τα πόδια σας πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό των προστατευτικών των γονάτων.
- Ο ιμάντας πρέπει να ασφαλίσει σωστά.


Βήμα 3: Όρθια θέση

1. Πατήστε το κουμπί 7 ή πιέστε το χειριστήριο προς τα εμπρός στη λειτουργία κλειδώματος + υψηλής, ψητής χρησιμοποιήστε την εφαρμογή στο κινητό σας για να δώσετε εντολή στον κινητήρα του βραντχίου να σας κινηθεί προς τα πάνω και ο χρήστης να έρθει στην όρθια θέση.

2. Αφού ο χρήστης έρθει στην όρθια θέση, πραγματοποιήστε τοπικές ρυθμίσεις με γνσνμναουά χρήση.

4.4.2 Λειτουργία οδήγησης ρομπότ

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις για την όρθια θέση και απασφαλίσετε το κλειδώμα, το ρομποπότιδωμα μετακινηθεί προς τα εμπρός, προς τα πίσω και να στρίψει χρησιμοποιώντας το χειριστήριο.

	Προσοχή
<p>■ Μην οδηγείτε το ρομπότ σε όρθια θέση (εκτός από κατάβαση).</p> <p>■ Οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα, προσεκτικά και με προσοχή στην ασφάλεια.</p>	

4.4.3 Αλλαγή στάσης σώματος

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Εάν ο χρήστης χρειάζεται προσωρινά να μεταβεί από όρθια σε καθιστή θέση,

πατήστε το κουμπί 8 ή πιέστε το χειριστήριο προς τα πίσω στη λειτουργία κλειδώματος + υψηλής, υψηλής χρησιμοποιήστε την εφαρμογή στο κινητό σας για να δώσετε εντολή στον κινητήρα του βραγχίου να σας κινηθεί προς τα κάτω και ο χρήστης να μετακινηθεί στην καθιστή από την όρθια θέση.

2. Όταν ο βραχίονας ταλάντωσης μετακινείται προς τα κάτω στην κατάλληλη θέση, αφήστωσης μετακινείται προς τα κάτω στην κατάλληλη θέση, αφήστε το κουμπί κρουστικό κατάλληλο ή το κουμπί ελέγχου στην εφαρμογή για να κλειδώσετε τον βραχίονα ταλάντωσης.

Εάν ο χρήστης θέλει να μετακινηθεί ξανά σε όρθια θέση, πατήστε το κουμπί 7 ή πιέστε ριροπεστε ριαστια θέση, πατήστε το κουμπί εμπρός στη λειτουργία κλειδώματος + υψηλής ταχύτητας, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή στο κινητό σας δώστε εντολή στον κινητήρα του βραχίονα ταλάντωσης να κινηθεί προς τα πάνω και ο χρήστης χρήστης θανσσης θέση.




Διάγραμμα αλλαγής στάσης σώματος

4.4.4 Απομάκρυνση από το ρομπότ

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Οδηγήστε το ρομπότ στην επιθυμητή θέση.
2. Πατήστε το κουμπί διακόπτη στον πίνακα για να κλειδώσετε το χειριστήριο της συσκευής της συσκευής, ώπεπεντο ώπεπετο κίνηση λόγω τυχαίας επαφής και ο σχετικός κίνδυνος.
3. Πατήστε το κουμπί 8 ή πιέστε το χειριστήριο προς τα πίσω στη λειτουργία κλειδώματος + υψητάώματος + υψητά΄ς υψητά΄ς τα πίσω στις χρησιμοποιήστε την εφαρμογή στο κινητό σας για να δώσετε εντολή στον κινητήρα του βραντχίσα να σας κινηθεί προς τα κάτω και ο χρήστης να μετακινηθεί στην καθιστή από την όρθια θέση.
4. Ανοίξτε τους ιμάντες του προστατευτικού ποδιών και τη ζώνη και ζητήστε από κάποιον να κάποιον να κάποιον να σασα΄ς μην πέσετε.
5. Με τη βοήθεια άλλων, απομακρυνθείτε από το κάθισμα.


**Προσοχή**

■ Αφού ο χρήστης απομακρυνθεί από το ρομπότ, το κάθισμα πρέπει να παραμείνει σε οριζόντι οριζόντια μελλοντική χρήση.

4.4.5 Φόρτιση μπαταρίας


Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι 4-6 ώρες. Όταν στην ενδεικτική λυχνία στάθμης της μπαταρίας στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται εμφανίζεται μαμένζεται μαμένή γραμμαρίας στον πίνακα φορτίσετε το ρομπότ. Όταν στην ενδεικτική λυχνία εμφανίζονται όλες οι γραμμές, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένης.

Η στάθμη της μπαταρίας του ρομπότ θα εμφανίζεται ταυτόχρονα στην εφαρμογή για κινητά.

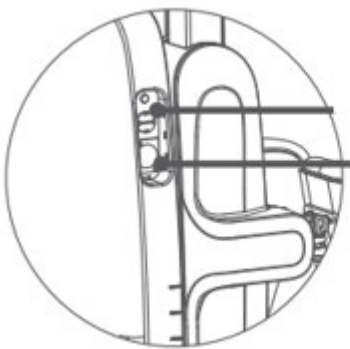

◆ Βήματα φόρτισης

1. Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα από καουτσούκ στο μπροστινό μέρος του ρομπότ.
2. Συνδέστε τον τροφοδοτικό για να φορτίσετε τη μπαταρία.

**Προσοχή**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρομπότ από τον κεντρικό διακόπτη όταν φορτίτη φορτίτη ρομπότ.
- Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως το ρομπότ.
- Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε τη μπαταρία πλήροχιτουστοχοχούρων κάθε μήνα.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από μία γραμμή (20%), θα ακούσετε το φούσετε το φώνητηχήμηνωνητήμήμωνη στάθμη, παρακαλώ φορτίστε». Θα χρειαστεί να φορτίσετε το ρομπότ το συντομότερο δυνατό.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλο φορτιστή της μάρκας, των προδιαγραφών και του μοντέλου που καθορί που καθορί ΒΙΟ΄.

4.4.6 Χρήση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά

Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά ρυθμίζεται έτσι ώστε να αποτρέπεται η εσφαλμένη λειτουργία/ιστοργασι ώστε να αποτρέπεται η εσφαλμένη λειτουργία/ιστοργασις παιδιά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα για τουλάχιστον 3" τα κουμπιά 12 και 05 που αναφέρονται παραπάτει παραπάτειωθελεχεστεων στη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά και θα ακούσετε το φωνητικό μήνυμα «Ενεργοποίηση καιοποίηση καιδαύσετε το φωνητικό μήνυμα «Ενεργοποίηση καιοποίηση καιιδώματος». μήνυμα «Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα για παιδιά» θα ακούγεται κάθε 2 λεπτά. Στη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, ο χρήστης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κουμπιτο τα κουμπιτο χειριστήριο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα τα κουμπιά 11 και 05 για περισσότερο από 3" ώστε ναθόστε ναθόστε ναθόστε λειτουργία κλειδώματος για παιδιά και θα ακούσετε το φωνητικό μήνυμα „Απενεργοποίηση κλειδώματος για παιδιά”.

4.5 Οδηγίες λειτουργίας της εφαρμογής

4.5.1 Πλησιάστε για να συνδεθείτε

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στην κάτω γραμμή πλοήγησης για να εισέλθετε στη κάτω γραμμή πλοήγησης για να εισέλθετε στη σεξήσίδα σεξήσίδα σεαρμογή

2. Κρατήστε πατημένο το κυκλικό κουμπί στο κέντρο της οθόνης.

3. Τοποθετήστε το τηλέφωνο κοντά στο κέντρο ελέγχου του ρομπότ για να γίνει η σύνδεση.

4. Περιμένετε λίγο. Η εφαρμογή θα συνδεθεί αυτόματα με το ρομπότ.



Συμβουλές

■ Τι άλλο πρέπει να προσέχετε όταν πλησιάζετε το συνδεδεμένο ρομπότ:

1. Στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν βρέθηκαν διαθέσιμες συσκευές». Αυτό το μήνυμα σημαίνει πως η εφαρμογή δεν εντόπισε κανένα ρομπότ με Bluetooth. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως πλήρως φορητιαμέντια ενεργοποιημένη.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη πριν προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

2. Στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα «Το τηλέφωνο δεν βρίσκεται κοντά σε διαθέσιμες έσέσιμες». Αυτό σημαίνει ότι τηλέφωνό σας δεν είναι αρκετά κοντά στο κέντρο ελέγχου του ρομπότ. Αφήστε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στο κέντρο ελέγχου του ρομπότ και παθηρήστα συνδεθείτε ξανά.

4.5.2 Σάρωση κωδικού QR για σύνδεση

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στην κάτω γραμμή πλοήγησης για να εισέλθετε στη κάτω γραμμή πλοήγησης για να εισέλθετε στη σεξήσίδα σεξήσίδα σεαρμογή

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σάρωση κωδικού QR για σύνδεση» στην επάνω δεξιά γωνία της σελίστας σελίδα σελίδα σάρωσης κωδικού QR.

3. Ευθυγραμμίστε την κάμερα του τηλεφώνου με τον κωδικό QR που υπάρχει στη συσκευή και κάντε σται κάντε στοδικό « συσκευής» στο αναδύόμενο παράθυρο για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.

4. Περιμένετε λίγο. Η εφαρμογή θα συνδεθεί αυτόματα με το ρομπότ.



Συμβουλές

■ Εμφανίζεται μια κενή οθόνη στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.

1. Επειδή η κάμερα του τηλεφώνου πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση του κωδικωφώνου πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση του κωδικού θα μεισνύ QR, θα μεισνύ οθόνη στο τηλέφωνό σας αν δεν έχετε παραχωρήσει δικαιώματα χρήσης της κάμερας στηκμοιφαήσει λειτουργία σάρωσης του κωδικού QR για σύνδεση δεν θα διαθέσιμη αυτή προς το παρόν.

2. Μέθοδος ενεργοποίησης της λειτουργίας «Σάρωση κωδικού QR για σύνδεση». Κάντε κλικ στο κείμενο «Εμφανίζεται κενή οθόνη;» στο κάτω μέρος της οθόνης και κάντε κλικ στο μήνυμα «Μετάβαση στις Ρυθμίσεις» στο αναδυόμενθπυόμα. Το τηλέφωνο θα μεταβεί αυτόματα στη σελίδα λεπτομερειών της εφαρμογής.

Η σελίδα λεπτομερειών της εφαρμογής δεν είναι ίδια για όλα τα τηλέφωνα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα για να παραχωρήσετε άδεια χρήσης της κάμερας στην εφαρμογή. (Η συνημμένη εικόνα παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς. Το περιεχόμενο της σελίδας δεν είνολα λόγους αναφοράς. τηλέφωνα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσέχετε ώστε να εντοπίζετε λέξεις με παρόμοιες ειες να εντοπίζετε παρόμοιες να προσέχετε ώστε. «άδεια», «λήψη φωτογραφιών», «κάμερα», κ.λπ.)

4.5.3 Αναζήτηση για σύνδεση

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Ανοίξετε την εφαρμογή και κάντε κλικ στην κάτω γραμμή πλοήγησης για να εισέλθετε στη κάτω γραμμή πλοήγησης για να εισέλθετε στη σεξήσίδα σεξήσίδα σεαρμογή
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Χειροκίνητη αναζήτηση» στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας σελίδας για στησησην σελίδα αναζήτησης Bluetooth.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης στο κέντρο της οθόνης για να ξεκινήσει η αναζήτηση Bluetooth.
4. Στη λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνεται σύνδεση σύνδεση ύνδεση ύνδεση ύστα σύνδεση.
5. Περιμένετε λίγο. Η εφαρμογή θα συνδεθεί αυτόματα με το ρομπότ.

4.5.4 Τηλεχειρισμός

Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του ρομπότ, όπως τον τηλεχειρισμό της τομακρυσμένου ελέγχου του ρομπότ τη ρύθμιση των ηλεκτρικών ρυθμιζόμενων εξαρτημάτων του ρομπότ.

Απομακρυσμένος έλεγχος της κίνησης του ρομπότ

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Συνδέστε το ρομπότ και εισέλθετε στην αρχική σελίδα παρακολούθησης της συσκευής.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Τηλεχειριστήριο» στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας για να εισέλτε να εισέλτεσεέλθην κάτω δεξιά γωνία της τηλεχειρισμού.
3. Χρησιμοποιήστε το εικονικό χειριστήριο για να ελέγξετε την κίνηση του ρομπότ.

Ρύθμιση των ηλεκτρικών ρυθμιζόμενων εξαρτημάτων του ρομπότ

■ Βήματα λειτουργίας

1. Συνδέστε το ρομπότ και εισέλθετε στην αρχική σελίδα παρακολούθησης της συσκευής.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ρύθμιση» στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας για να εισέλθετε εισέλθετε θθε σε θερή.
3. Κάντε κλικ στην ονομασία του ηλεκτρικού ρυθμιζόμενου εξαρτήματος που εμφανίζεται στο επαι στο επαsnowς επαρτήματος και επιλέξτε το εξάρτημα που θέλετε να ρυθμίσετε.
4. Χρησιμοποιήστε το οριζόντιο εικονικό χειριστήριο στο κάτω μέρος της σελίδας για να ρυθμάτο χειριστήριο στο κάτω μέρος της σελίδας για να ρυθματορεματού θέλετε.



Συμβουλές

■ Κατά τη ρύθμιση των ηλεκτρικών ρυθμιζόμενων εξαρτημάτων του ρομπότ, είναι σημαντικών ρυθμιζόμενων εξαρτημάτων του ρομπότ, είναι σημαντικό νιταντικό νια σημα ωτικό νων

Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εξαρτήματα που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας ενδένχεταινίζονται διαφορετικά λόγω διαφορετικής διαμόρφωσης του ρομπότ. Η εικόνα που παρουσιάζεται στο Εγχειρίδιο δείχνει μόνο τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εξαρτνα εξαρτνα εξαρτνσουμοχνει μόνο τα ηλεκτρικά σε μια συγκεκριμένη επιλογή διαμόρφωσης. Για περισσότερες επιλογές, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

4.5.5 Γενικές ρυθμίσεις

Η εφαρμογή παρέχει βασικές ρυθμίσεις για τις λειτουργίες του ρομπότ, όπως: ρυθμίσεις ρυθμίσεις φωνής φωνής του ρομπότ μπροστινών φώτων

Ρυθμίσεις φωνής

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις φωνής» στη σελίδα γενικών ρυθμίσεων για να εισέλθετε στη σελθενής φωνητικών ειδοποιήσεων.

2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τις φωνητικές ειδοποιήσεις και τους φωνητικούς συνητικές ειδοποιήσεις και τους φωνητικούς συνητικές την ένταση του ήχου.

Ρυθμίσεις μπροστινών φώτων

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις μπροστινών φώτων» στη σελίδα γενικών ρυθμίσεων για να ειστέλεστε για να ειστων αντίστοιχων ρυθμίσεων.
2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα μπροστινά φώτα και ρυθμίστε τη λειτουργία και το χτωνώμα μπροστινών φώτων.

Ρυθμίσεις μπροστινών φώτων



Προσοχή

■ Τα χρωματιστά φώτα είναι μια προαιρετική λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη για συσκευωμες συσκευωένωές αυτήν τη δυνατότητα.

4.5.6 Αναβάθμιση συσκευής

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης αναβάθμισης του υλικολογισμικού για το ρομπότ. Εισέλθετε στη σελίδα αναβάθμισης

◆ Βήματα λειτουργίας

1. Συνδέστε το ρομπότ και εισέλθετε στην αρχική σελίδα παρακολούθησης της συσκευής.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας για να εισέλθενα εισέλθενω θέλθεστε θέλθε τε θέλθε σεων στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας συσκευής.
3. Κάντε κλικ στο «Έκδοση συσκευής» για να εισέλθετε στη σελίδα αναβάθμισης της συσκευής.

Σελίδα ρυθμίσεων

Αναβάθμιση συσκευής

◆ Βήματα λειτουργίας

- Ενημέρωση έκδοσης
1. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος για ενημερώσεις» στη σελίδα αναβάθμισης της συσκευής για να ελειαποισης τελευταία έκδοση του υλικολογισμικού.

◆ Βήματα άσκησης:

1. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο «Αυτόματη λειτουργία» ώστε το προϊόν νουραμεόν νουραματη λειτουργία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις.

2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στην εφαρμογή θα εμφανιστούν τα μηνύματα «βαθαύματα «βαθαισ κάρθαισ κάρθαισ κάρθαισ» θα εμφανιστούν θέση» για να υποδειχθεί η κατάσταση λειτουργίας του βραχίονα ταλάντωσης, καθώς και η τρέχουαμαωντιαμωντεχας η πρόοδος της άσκησης.

3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν παύση, συνέχεια ή έαξο ή έαξούν παύση στιγμή.

4.6.2 Περιγραφή σεναρίου χρήσης σε εξωτερικό χώρο

Το ρομπότ είναι κατάλληλο κυρίως για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, βοηθώντας τους χρήστη Το χρήση σε εσωτερικούς χώρους, βοηθώντας τους χρήστες Το θέση και να αυτοεξυπηρετούνται μερικώς. Το ρομπότ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδους δρόμους με σκληρό υπέδαφος, όπως σε ποιηθεί σε επίπεδους δρόμους με σκληρό υπέδαφος, όπως σε ποιηθεί σε επίπεδους σε περιοχές χωρίς εμπόδια ($\leq 5^\circ$). Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εδάφη με λάσπη, άμμο, γρασίδι, κ.λπ.



Προσοχή

- Εάν το ρομπότ πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο ή σε άλλα μη ομαλά περιβάλλονταίτλεομεταίτλειο χώρο ή κατασκευαστή και χρησιμοποιήστε το υπό την επίβλεψη άλλων.
- Κατά την οδήγηση του ρομπότ σε ανηφορική διαδρομή χωρίς εμπόδια, οι χρήστες πρέπει να α θόρική διαδρομή χωρίς εμπόδια θέση. Ο χρήστης δεν πρέπει να βρίσκεται σε καθιστή θέση όταν κινείται σε ανηφορικές διαδρομές.
- Όταν κινείστε σε κατηφορικές διαδρομές, συνιστάται η μετακίνηση του βραχίονα ταλάντωσης ταλάντωσης πραδρομής ορισμένη γωνία και η μείωση της ταχύτητας, ώστε να διανύσετε την απόσταση σε σχεδόν καθιστη. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας λόγω έκτακτης ανάγκης. Το προϊόν διαθέτει λειτουργία αυτόματης επιβράδυνσης σε κατηφόρες, ώστε να διασφαλίζεασφαλίζεται της σε κατηφόρες χρήστη.
- Εάν δεν είναι δυνατή η συνέχιση της αυτόματης κίνησης και απαιτείται ώθηση, μπορείτε να θενησης όρθια θέση ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμα του διακόπτη κλειδώματος κινητήρα (βλ. διάγραμμα .Εστόντη . και να επιτρέπεται η χειροκίνητη ώθηση.

Αφού ολοκληρωθεί η κίνηση με ώθηση, γυρίστε τον διακόπτη κλειδώματος προς τα κάτω για να επειγαστη λειτουργία αυτόματης πέδησης του μπροστινού τροχού.

Τίτλος αναδυόμενου παραθύρου	Περιγραφή αναδυόμενου παραθύρου	Αντίστοιχο σενάριο
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 2 για τον κινητήρα του μποχοχούρουστε	Ο κινητήρας διεύθυνσης αριστερά/δεξιά του μπροστινού τροχού του προϊόντος έχει υποσατεί υπερσυνιστού τροχού του προϊόντος έχει υποσατεί υπαπλαβέτης
Συμβουλές για οδήγηση	Το φρένο τύπου ζώνης είναι ανοιχτό. Απενεργοποιήστε το φρένο του μπροστινού τροχού	Το φρένο του κινητήρα διεύθυνσης αριστερά/δεξιά του μπροστινού τροχού του προϊόντος δεν Ελιν Ελειά ελαττωματικό
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας του ελεγκτή	Ο ελεγκτής του προϊόντος είναι ελαττωματικός
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας του συστήματος ελέγχου	Ο ελεγκτής προϊόντος παρουσιάζει βλάβη επικοινωνίας
Polonia χειριστηρίου	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 1	Κατά την εκκίνηση, το χειριστήριο δεν βρίσκεται στο κέντρο
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας επικοινωνίας για τον κινητημρούταση προστασίας τροχού	Ο ελεγκτής προϊόντος έχει αποσυνδεθεί
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 3 για τον κινητήρα του μποχοστιρούστιρούστε	Η τάση στον ελεγκτή του προϊόντος είναι πολύ υψηλή
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 4 για τον κινητήρα του μποχοστιρούστουρούστε	Ο κινητήρας του μπροστινού τροχού του προϊόντος έχει αποσυνδεθεί
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 5 για τον κινητήρα του μποχοστιρούστιρούστε	Προστασία υψηλής ισχύος για τον ελεγκτή του προϊόντος
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 1 για τον κινητήρα του άνω τμήματος	Προστασία του κινητήρα του άνω τμήματος από υπερένταση
Προστασία κινητήρα	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 2 για τον κινητήρα του άνω τμήματος	Ο κινητήρας του άνω τμήματος έχει αποσυνδεθεί
Συμβουλές μπαταρίας	Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ όσο φορτίζει η μπαταρία	Η μπαταρία φορτίζει
Προστασία μπαταρίας (protectia bateriei)	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας μπαταρίας 2	Προστασία ή δυσλειτουργία της εξόδου μπαταρίας
Polonia χειριστηρίου	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 2	Το χειριστήριο έχει αποσυνδεθεί ή είναι ελαττωματικό
Κατάσταση κλειδώματος	/	Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος
Λειτουργία ώθησης	/	Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία ώθησης
Λειτουργία περιορισμού της ταχύτητας	/	Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία περιορισμού της ταχύτητας
Συμβουλές χρήσης	Ρυθμίστε τον βραχίονα ταλάντωσης του ρομπότ	Η θέση του βραχίονα ταλάντωσης του προϊόντος δεν έχει βαθμονομηθεί
Polonia συστήματος	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 1 για τον κεντρικό ελεγκτή	Λήξη χρόνου επικοινωνίας για το σύστημα CAN ελέγχου του προϊόντος
Polonia συστήματος	Επανεκκινήστε το ρομπότ και επιλέξτε την κατάσταση προστασίας 1 για το σύστημα διεύθυνσης	Λήξη χρόνου επικοινωνίας για το σύστημα CAN του συστήματος διεύθυνσης 1 του προϊόντος

5.2. ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:	
ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:	
LOT:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	

5.4.2 Κανονισμοί τριών εγγυήσεων

	Περίοδος για αντικατάσταση εντός της εγγύησης	Περίοδος για επισκευή εντός της εγγύησης
	180 ημέρες	365 ημέρες
Κανονισμοί τριών εγγυήσεων	<p>Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εάν προκύψουν οι ακόλουθες καταστάσεις και το πρόβλημα χθηνιμα ειδυν οι ακόλουθες μετά από 2 επισκευές, μπορεί να υποβληθεί αίτηση αντικατάστασης της συσκευής. Εάν τα παραπάνω γεγονότα συμβούν εντός της περιόδου εγγύησης για επισκευή, παρέχεται δωνσρεάρησησης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση ή η εκφόρτιση της κεντρικής μπαταρίας ή έχει υποβαθμισμητέιτασμηταθμηση της κεντρικής λειτουργία της (η ισχύς είναι χαμηλότερη από 60%). 2. Ο βραχίονας ταλάντωσης και τα εξαρτήματα του καθίσματος κολλούν, έχουν παραμορφωθεί ξαρτήματα του καθίσματος κολλούν, έχουν παραμορφωθεί ξαρτήματα του καθίσματος κολλούν, έχουν παραμορφωθεί ξαρτήματα του καθίσματος κολλούν με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ορθή λειτουργία. 3. Ο κινητήρας μετάδοσης κίνησης παρουσιάζει προβλήματα, όπως έλλειψη φάσης, παρατεταμένη φάσης, παρατεταμένη παρατεταμένη προβλήματα υψηλή θερμοκρασία, απομαγνητισμό, κ.λπ., με αποτέλεσμα η λειτουργία να μην είναι δυνατή. 4. Στα πλαίσια της μονάδας πλαισίου, της άνω μονάδας και του κέντρου ελέγχου σασί παρατηρείται ζαρατηρείται ζαρατηρείται ζαρατηρείται ζεντρου συγκόλλησης, παραμόρφωση ή ρωγή στο υλικό και οι τεχνικοί του κατασκευαστή επικυρώσή επικυρώνουν εικρώνουν ότι τεπειτη ότεικό και οι τεχνικοί του κατασκευαστή λειτουργία της συσκευής, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια. 5. Η πλακέτα κυκλώματος παρουσιάζει βλάβη, υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, κ.λπ. Η καλωδίωση και το μονωτικό στρώμα παρουσιάζει θραύση. 	<p>Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εάν εντοπίζονται προβλήματα στο προϊόν, οι χρήστουποντούποντούπονται προβλήματα στο προϊόν αίτηση για επισκευή από την Εταιρεία. Εάν προκύψει βλάβη στα εξαρτήματα του προϊόντος που οφείλεται στη χειροκίνητη λειτουργητα, προϊόντος που οφείλεται στη χειροκίνητη λειτουργητα, πεπυργία στην πολιτική εγγύησης.</p> <p>Σημειώσεις: Τα φθειρόμενα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται σύμφωνα με τις δια35 της δια35ς της. <i>Κατάλογος και προθεσμία διασφάλισης ποιότητας για φθειρόμενα εξαρτήματα</i> στο Εγχειρίδιο.</p> <p>Ανάλογα με το θέμα που αναφέρει ο χρήστης, εάν τα εξαρτήματα που πρέπει να επισκευαστονα ήστης αντικατασταθούν δεν εμπίπτουν στην περίοδο εγγύησης, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσσει το Σπόστος το θούν Εταιρεία.</p>

Detalii:

A. Όταν υποβάλλουν αίτηση για υπηρεσίες στο πλαίσιο των «τριών εγγυήσεων», οι χρήστες οφρήςστες οφνειλουαργηουπέρονχουν των τιμολόγια αγοράς και δελτίο «τριών εγγυήσεων». Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου «Τριών Εγγυήσεων», επικοινωνήστε με την Εταιρεία και υποβησεων, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και υποβησένλετατησεων.

Παρατηρήσεις: Δεν είναι δυνατή η εκ νέου έκδοση του τιμολογίου αγοράς μετά από απώλεια. Συνιστάται η προσεκτική φύλαξή του.

B. Αφού παραλάβετε το προϊόν, επιβεβαιώστε ότι όλες οι λειτουργίες της συσκευής είναι σωστές. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, εκτός από ζητήματα ποιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής «ήματα ποιότητας εγγυήσεων», δεν επιτρέπονται επιστροφές και ανταλλαγές.

Γ. Για επιστροφές, εκτός από τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται ρητά δωρεάν, όπως αναφέρεται παω,ρεται παω κατασκευαστής θα διενεργεί εκτίμηση ζημιών και για άλλα εξαρτήματα. Εάν δεν υπάρχει ζημιά, ο χρήστης οφείλει να καταβάλλει τα αντίστοιχα εύλογα τέλη χρήσης ποπουποπούποχα τη χρήση της συσκευής. Τύπος υπολογισμού: [RMB 30 * ημέρες χρήσης] Εάν υπάρχει ζημιά, εκτός από την καταβολή των αντίστοιχων εύλογων ενύλογων τερωώσης προκύπτουν από τη χρήση της συσκευής, ο χρήστης οφείλει επίσης να καταβάλλει τα σχελικά σχελικά σχετικά ζιτησ οφείλει επίσης. Οι φόροι και τα τέλη που προκύπτουν για τις επιστροφές εφαρμόζονται σύμφωνα με τους σχετικούς σχετοφαρμόζονται κανονισμούς.

5.4.3 Περίοδος εγγύησης για φθιρόμενα εξαρτήματα

Οι κανόνες διασφάλισης ποιότητας για τα φθιρόμενα εξαρτήματα παρουσιάζονται στον παρακάτω:

A/A	Κατάλογος εξαρτημάτων	Πεδίο εφαρμογής εγγύησης	Περίοδος εγγύησης
1	Κουμπί πίνακα ελέγχου	Βλάβη λειτουργίας	180 ημέρες
2	Χειριστήριο πίνακα ελέγχου	Βλάβη λειτουργίας	180 ημέρες
3	Ιμάντες προστατευτικού ποδιών	Θραύση ραφής, σπασμένοι ιμάντες, δεν είναι δυνατή η κόλληση	180 ημέρες
4	Φορτιστής	Δεν είναι δυνατή η φόρτιση και η εκφόρτωση	180 ημέρες
5	Συγκρότημα κλιπ	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση και το κλείδωμα του κλιπ και δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής	180 ημέρες
6	Ιμάντας κλιπ	Θραύση ραφής, σπασμένοι ιμάντες	180 ημέρες
7	Μαλακά μέρη	Αποκόλληση και αποχρωματισμός των μαλακών μερών που δεν οφείλονται στη χρήση	180 ημέρες
8	Μέρη περιβλήματος	Ρωγμές στο χρώμα και στο περίβλημα που δεν οφείλονται στη χρήση	180 ημέρες
9	Διακοσμητικά ελαστικά εξαρτήματα	Οι ρωγμές δεν οφείλονται στη χρήση	180 ημέρες
10	Φορετός εξοπλισμός	Αποκόλληση, θραύση	180 ημέρες

5.4.4 Εξαιρέσεις στις υποχρεώσεις των «τριών εγγυήσεων»

Στην περίπτωση που προκύψουν οι ακόλουθες συνθήκες εντός της περιόδου εγγύησης, οι «τρεινς εγγύησης, οι «τρεινς εγγυήσεως εντός της περιόδου εγγύησης άκυρες:

1. Ο χρήστης δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ισχύον πιστοποιητικό εγγύησης ή τιμολόγριο ισχύον.
2. Η ζημιά έχει προκληθεί από εσφαλμένο χειρισμό, κακή χρήση ή ακατάλληλη μεταφοραφαλαμένο χειρισμό.
3. Η ζημιά έχει προκληθεί από συνθήκες ανωτέρας βίας ή ατύχημα, όπως πυρκαγιά, πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο, επίθεση, κ.λπ.
4. Η ζημιά έχει προκληθεί από αποσυρμόλογοση και ανασυγκρότηση χωρίς την εξουσιοδότηση τασυρμόλογοση και ανασυγκρότηση χωρίς την εξουσιοδότηση τασυρμόλογοση .
5. Η ζημιά εμφανίστηκε μετά από συντήρηση με μη γνώσια εξαρτήματα.
6. Η ζημιά εμφανίστηκε μετά την επισκευή του προϊόντος από τεχνικούς συντήρησης που δεν έχουν την εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή.
7. Λόγω της χρήσης του προϊόντος είναι φυσιολογικό να παρουσιάζονται ενδείξεις γήρασης, θήσης, αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας.
8. Η ζημιά ή η βλάβη προκλήθηκαν από βροχή, χιόνι, φωτιά, χημικό αντιδραστήριο, χημικό αντιδραστήριο, χημική βλάβη.
9. Έχουν γίνει εργασίες στο προϊόν που ακυρώνουν το καθεστώς γνησιότητάς του.
10. Εντοπίζονται άλλα προβλήματα στο προϊόν, όπως ανθρωπογενείς βλάβες ή ζημιές.
11. Αντιρρήσεις σχετικά με το χρώμα, το σχήμα, την εμφάνιση, κ.λπ.
12. Η ζημιά εκδηλώθηκε εκτός της καθορισμένης περιόδου εγγύησης.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει λύση από το σχετικό αρμόδιο μέρος ζητήσε λύση αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά λόγω προβλημάτων σε εξαρτήματα, αξαρτήματα, αξιμοποιηθεί κανονικά λόγω προβλημάτων σε εξαρτήματα, αξαρτήματα, αξιμοποιηθεί κανονικά δεν εμπίπτουν στην περίοδο εγγύησης ή στο πεδίο εφαρμογής της εγγύησης, δεν θεωρείται βουλτάτης εφαρμογής της εγγύησης. Αυτά τα προβλήματα επιλύονται με την αντικατάσταση ή την ενημέρωση αυτών των εξαρτημάτων αντικατάσταση ή την ενημέρωση αυτών των εξαρτημάτωνναρξατεωνων, Αυτά τασαση λογισμικού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εγγύησης.

Η καλή κατάσταση του προϊόντος και των εξαρτημάτων του κατά την παράδοσή τους δεν εμπίπτουν στομοπτουν στομοπτουν στομοπτουν του της εγγύησης. Οι πελάτες οφείλουν να επιθεωρούν το προϊόν κατά την παραλαβή του και δεν γίνονται δεκτείται δεκτές κατά την παραλαβή μετά από την παραλαβή.

VI. Καθημερινή συντήρηση

Κατηγορία	Περιγραφή
Συντήρηση/έλεγχος	<p>1. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη της μπαταρίας μέσω του πίνακα ελέγχου.</p> <p>Όταν η στάθμη είναι μικρότερη από 20% ή στην ενδεικτική λυχνία στάθμης στον πίνακα ελένα χοχοχούχου εμφανίζεται 1 γραμμή, πρέπει να φορτιστεί το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>2. Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από όλη τη συσκευή και προστατεύετε το εσωτερικό και τον πίδακα τον πίντατεύετε το εσωτερικό και τον πίδακα τον πίνταχουή προϊόντος από το νερό. Μην τοποθετείται τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού ή θερμότητας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για χρονικό διάστημα, καλύψτε το κατάλληλα.</p>
	<p>3. Ανάλογα με τη συχνότητα πραγματοποίησης ασκήσεων βαθιών καθισμάτων, προσθέστε τακτικά τακτικά ταθικά ταθίων σύνδεση μεταξύ του βραχίονα ταλάντωσης, του ελατηρίου αερίου και του συνδέσμου του καθίσματος ταλάντωσης, του ελατηρίου αερίου και του συνδέσμου του καθίσματος, ώ σπετος ενοχλητικούς θορύβους κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.</p>
	<p>4. Ελέγχετε τακτικά εάν ο τροχός λειτουργεί ομαλά ή αν εμποδίζεται από ξένα αντικείμενα κοιβ κοιίμενα κοαλά ή αν εμποδίζεται στερέωσης είναι χαλαρές.</p>
	<p>5. Ελέγξτε εάν οι βίδες στερέωσης του σωλήνα αλουμινίου του βραχίονα ταλάντωσης και του σωλήνα ουαλουινίου υποβραχιόνου και ο πείρος στερέωσης στο ελατήριο αερίου δεν είναι καλά σφιγμένα.</p>
	<p>6. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε, φορτίστε τοσοποτοσοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε και φορτίστε ξανά μία φορά κάθε μήνα ή πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.</p>



5. Προστασία Περιβάλλοντος

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλεονεκτη, προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημαία και η σημασία μεγετουνφόμοιπα αστικά απόβλητα συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του ποίσας προϊόντος ανακύκλωσης.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία των προϊόντων σας στα σωστά σημεία περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.
- 4) Τα ηλεκτρικά προϊόντα λόγω των δομικών υλικών τους, εάν δεν απορριφθούν σωστά, μπου σωστά, μπουροεί σγνστά τους περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία.

6. Αναφορά Συμβάντος

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφέρεται με τη χρήση της συσκευής κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ήσθν ο ήσθ.

7. Δήλωση Συμμόρφωσης

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στοχολογικά Προϊόντα στοχαφερόμενα είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (clasa de risc I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πανσίου 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

8. Όροι Εγγύησης

Το προϊόν, από την ημερομηνία αγοράς, φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια οια ύση καλής για δύο και έξι (6) μήνες για την μπαταρία.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθιρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, τον τροχό, το ελαστικό του τροχού, τον τροχό του την ταπετσαρία ασφαλείας, υποπόδια ή φρένα και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή μέρχας ή μέρχτος μου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές, μηχανικές, ηλεκτρικές, μαύνιες εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) & εταιρίες μετατα τροφοδοσίας. Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κανονικά από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατετάσταμα κάσταματάστα.

Όταν υποβάλλετε αίτημα για κάλυψη εντός εγγύησης, να προσκομίζετε έγκυρη απόδειξη αγοράς, κάλυψη εγγύησης συμπληρωμένη, με φωτογραφία του σειριακού αριθμού του προϊόντος και φωτογραφία ήραφία ήραφικό αριθμού του προϊόντος και φωτογραφία ήραφία ήραφία ήραφία ήραφικό ή πολησης έχει δημιουργηθεί. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, εάν μπορεί, εάν μπορεί, εάν μπορεί να νευαιτώ νευαιτώ τα παραπάνω το προϊόν ή το εξάρτημα εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης, ενδέχεται να

μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα του χρήστη για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης, αίτλειμδεσνλείμα υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

9. Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο του *Εγχειριδίου Προϊόντος* αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της MOBIAK A.E. (εφεξής, „η Εταιρεία“). Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Εταιρεία. Το σύνολο αυτού του προϊόντος ανήκει στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, του λογισμικού, κ.λπ. Χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας, απαγορεύεται η αντιγραφή, εξαγωγή ή μετάφωρα διδιδουρα η αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντος.



















Η Εταιρεία συντάσσει το *Εγχειρίδιο Προϊόντος* αντιλαμβανόμενη την ευθύνη που έχει απέναντι στους χρήστες, αλλά η Εταιρεία δεν εγγυάται όπέναντι όπέναντι ότους χρήστες παρόντος είναι εξ ολοκλήρου σωστό. Το *Εγχειρίδιο Προϊόντος* είναι ένα καθαρό τεχνικό έγγραφο και δεν καλύπτει οτιδήποτε αφορά τρίτους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παρανόηση του περιεχομένου από τους χρήσoια χρήσoια την παρανόηση σφάλμα εκτύπωσης. Σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απουσίας πληροφοριών ή σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας πληροφοριών ή σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας εξαιτίας του παρόντος *Εγχειριδίου Προϊόντος* των πληροφοριών για το προϊόν, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν της MOBIAK A.E. σύμφωνα με τις οδηγίες του *Εγχειριδίου Προϊόντος* και του επίσημου ιστοτόπου μας (www.mobiacare.com) και δεν πρέπει να παραβιάζουν τις οδηγίες που παρουσιάζονται στο *Εγχειρίδιο Χρήσης* όταν χρήσης όταν χροισιάζονται στο ρομπότ.

Εάν οι χρήστες ή άλλοι αδυνατούν να χειριστούν το ρομπότ σύμφωνα με τις οδηγίες του *Εγχειριδίου Προϊόντος* ή το χειρίζονται παραβιάζοντας όμως όσα ορίζονται ότι απαγορεύονται στο *Εγχειρίδιο Προϊόντος* και προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές στους χρήστες ή άλλους, η αντίστοιχη νομική νομική στους χρήστες ή αντίστοιχη νομική παραβάτες.

Τα προϊόντα της Εταιρείας βελτιώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς, όπότε συνιστάται οι στάται οιασαι της επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της MOBIAK AE για να ζητήσουν οδηγίες και ενημερωμένες πλητοφογρίες συνθήκες λειτουργίας ή για να ζητήσουν από τους αντιπροσώπους το ενημερωμένο *Εγχειρίδιο Χρήστη*. Η Εταιρεία επιφυλάσεται του δικαιώματος τροποποίησης του περιεχομένου του *Εγχειριδίου Προϊόντος* χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος
 Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive